



●認知症のような予測できない行動をとる・自力で危険な状態から回避することができない利用者は使用しない。
 ご使用される方の心身の状態や利用環境により、手すりフレームのすき間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては生命に関わる重大事故につながるおそれがあります。
 特にベッドの上で予測できない行動をとられる利用者の方や、自力で危険な状態から回避することができない利用者の方につきましては、ご使用を控えていただくか、はさまれ防止の防護具である当社製のオプション品「たちあっぷフレームベルト」のご使用をお願いします。

！重度者（特に介護度4・5）の方が利用する場合は、十分モニタリング、フィッティングを行なった上で使用してください。
 また、ご使用に適さなくなった場合は、直ちに使用をやめ、医師や介護士、ケアマネジャー等の専門家に相談し、適切な処置を受けてください。



たちあっぷフレームベルト



●ベースや手すりフレームが濡れた状態で使用しない。
 転倒の原因になるおそれがあります。乾いた布で拭き取ってからご使用ください。



●使用に際しては、利用者の身体の状態により介護者が付き添うなど、安全には十分な配慮をする。
 利用者の身体状態や利用状況などを考慮し、十分な検討をしてからご使用ください。
 検討の際は、取扱店やケアマネジャーなどの専門家に相談することもお勧めします。



矢崎化工株式会社

■本社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
 福祉介護機器部 TEL 054(281)8867 FAX 054(284)0863

介護支援ページ
kaigo-web

<http://www.kaigo-web.info/>

■北海道支店 福祉介護機器課
 〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
 TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■仙台支店 福祉介護機器課
 〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
 TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■関東支店 福祉介護機器課
 〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
 TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522

■東京支店 福祉介護機器課
 〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
 TEL 04(2944)7111 FAX 04(2944)7007

■神奈川支店 福祉介護機器課
 〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
 TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■静岡支店 福祉介護機器課
 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
 TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988

■名古屋支店 福祉介護機器課
 〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池48-2
 TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■大阪支店 福祉介護機器課
 〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
 TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

■広島支店 福祉介護機器課
 〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
 TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■高松支店 福祉介護機器課
 〒761-8058 香川県高松市勤使町227
 TEL 087(866)6411 FAX 087(867)1916

■九州支店 福祉介護機器課
 〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
 TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026