

取扱説明書

CKA-HA



たちあっぷフレームベルト CKA-HA・CKA-HB

※ご使用者様へ :この説明書はよくお読みになり、必ず保管してください。
※販売店様へ :この説明書は必ずお客様にご説明の上、お渡しください。

CKA-HB




製品の特長

- たちあっぷのフレームのすき間に頭部が入り込むことを防止するベルトです。
- 取り付けには固定ネジを締めることで使用中の外れ防止ができます。
- もちろん、手すりを握る動作の邪魔になりません。


■ たちあっぷフレームベルト 仕様

品名	品番	サイズ	対象のたちあっぷ品番	材質
たちあっぷ フレームベルト	CKA-HA	取付状態でのサイズ (外寸法)335×130mm	CKA-01 CKA-02 CKA-03 CGA-3	生地部 :ナイロン マジックテープ部:ナイロン 固定ネジ :真鍮/ ニッケルメッキ
	CKA-HB	取付状態でのサイズ (外寸法)775×130mm	CKA-04	

CKA-HA取付例

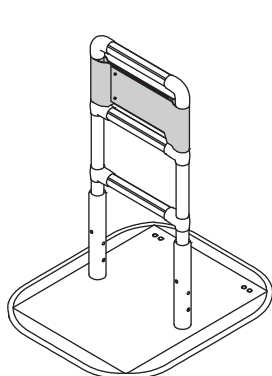

CKA-HB取付例

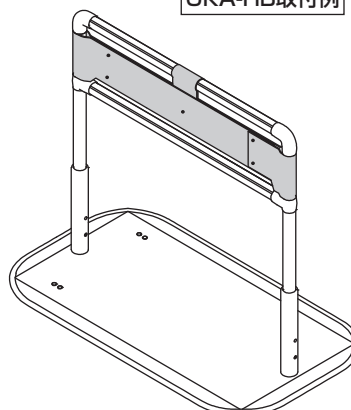

■ 安全上のご注意

※いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

●安全に関する図表示

		記号は禁止(してはいけない)行為であることを告げるものです。 (左図の場合は分解禁止)
		記号は強制(必ず守る)内容であることを告げるものです。 (左図の場合は必ず守る)

⚠ 注意

	●「たちあっぷ」フレームに取り付ける以外の用途では使用しないでください。
	●使用前に使用者の状態確認をしてください。 使用者の心身の状態や症状を確認してください。
	●使用前に取付状態を確認してください。 正しく取り付けられていて、マジックテープ同士が固定されていることを確認してください。
	●製品に異常を見つけた場合は使用を止めてください。 固定ネジ不良、マジックテープの外れ・破れ等、正しく取り付けられない場合や機能を損なう状態の場合は、直ちにご使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。




⚠ 注意	
❗ 必ず守る	●室内で使用してください。 本製品は室内専用のため、屋外では使用しないでください。
🚫 禁止	●水やお湯に濡れる場所では使用しないでください。
	●火のそばでは使用しないでください。
	●屋外や直射日光の当たる場所では使用しないでください。 変質や変色をする恐れがあります。

■ たちあっぷフレームベルト 取付方法


※取り付け、取り外しは必ず納入業者の方をお願いしてください。

●初めにご確認ください

○シートの取り付け可能箇所(●印)

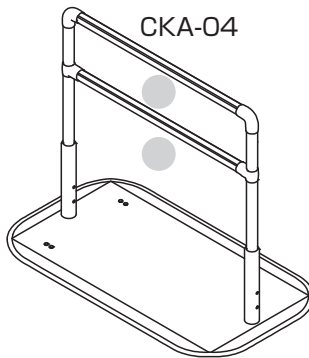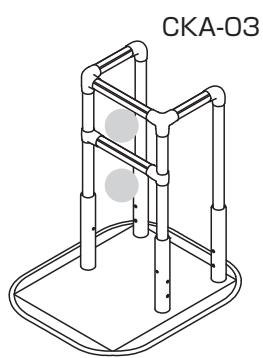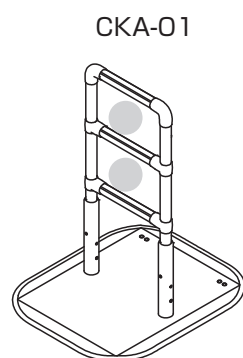

○シートの取付向き

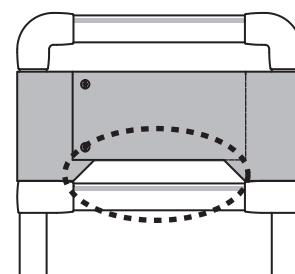




切り込みのある方を下にして取り付けます。

●CKA-HA取付方法



必要工具: ⊕または⊖ドライバー (2番) …2本

①ベルトのマジックテープをはがして広げます。固定ネジAをベルトの穴に差し込み(図1)、フレームの左側から縦パイプに巻きつけ(図2)、穴が重なるように位置を合わせ、マジックテープ同士を手で強く押さえつけるように取り付けます。


⚠ 注意 ベルトの折り込みは使用者から反対側になるように取り付けてください。

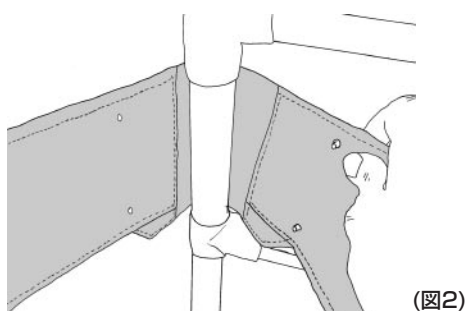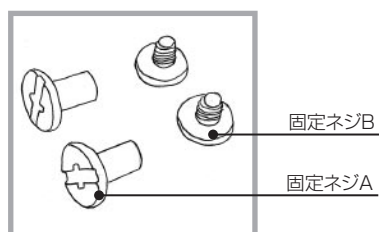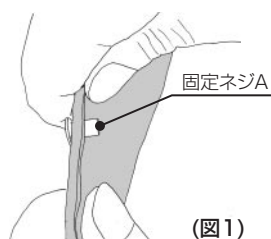


②フレーム右側の縦パイプにベルトを引っ張りながら巻きつけ(図3)、穴が重なるように位置を合わせ、マジックテープ同士を手で強く押さえつけるように取り付けます(図4)。

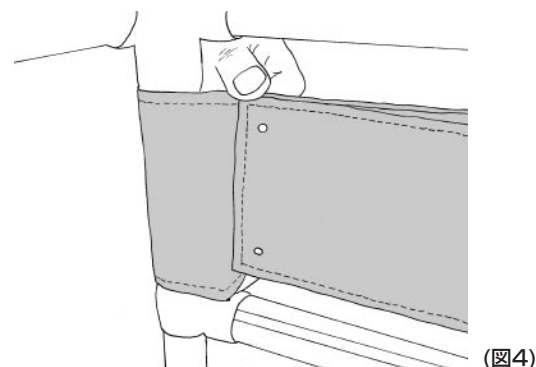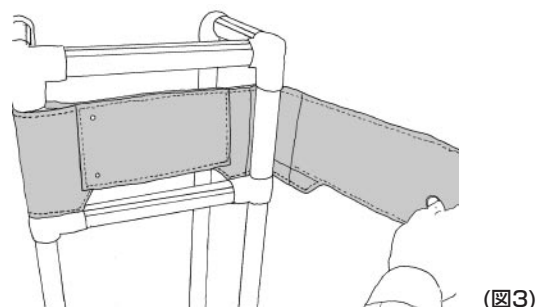

③固定ネジBを固定ネジAにねじ込み(図5)、ドライバー2本で、**2箇所**しっかり締め付け固定します(図6)。

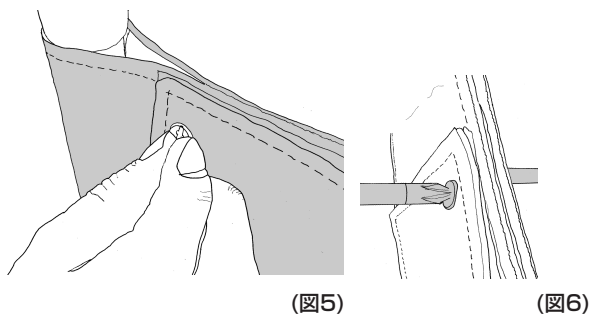

④手で強く押さえつけるように、マジックテープ同士を固定します(図7)。

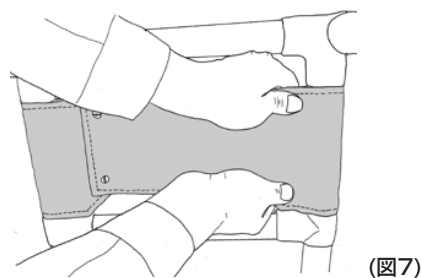


最後に手でベルトを押し、固定されているかを確認して取り付け完了です。

●CKA-HB取付方法


必要工具：⊕または⊖ドライバー（2番）…2本

①ベルトのマジックテープをはがして広げます。固定ネジAをベルトの穴に差し込み(図1)、フレームの左側から縦パイプに巻きつけ(図2)、穴が重なるように位置を合わせ、マジックテープ同士を手で強く押さえつけるように取り付けます。マジックテープが固定されましたら、固定ネジBを固定ネジAにねじ込み仮止めをします。


⚠ 注意 ベルトの折り込みは使用者から反対側になるように取り付けてください。

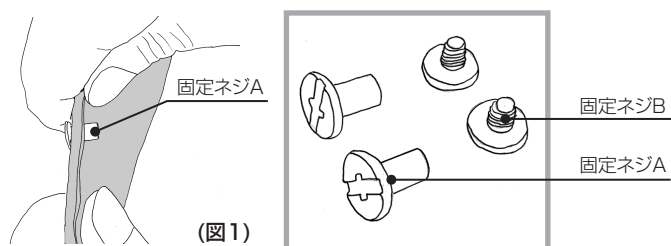


②中間のベルトをフレーム上部の横パイプに巻きつけ、固定ネジAをベルトの穴に差し込み、穴が重なるように位置を合わせ(図3)、マジックテープ同士を手で強く押さえつけるように取り付けます(図4)。マジックテープが固定されましたら、固定ネジBを固定ネジAにねじ込み仮止めをします。

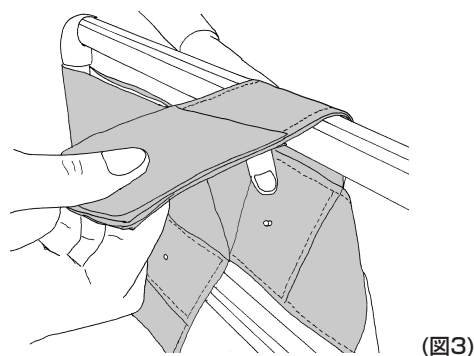

③フレーム右側の縦パイプにベルトを引っ張りながら、穴が重なるように位置を合わせ、マジックテープ同士を手で強く押さえつけるように取り付けます(図5)。

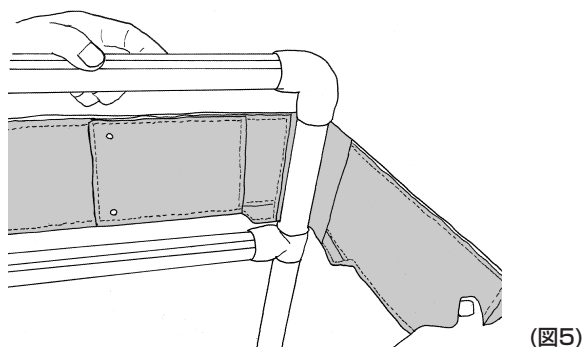


④固定ネジBを固定ネジAにねじ込み(図6)、ドライバー2本で、**全5箇所**しっかり締め付け固定します(図7)。

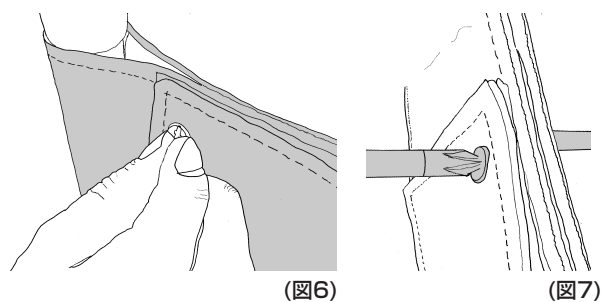

(次ページにつづく)

(前ページ「CKA-HB取付方法」のつづき)

- ⑤手で強く押さえつけるように、マジックテープ同士を固定します(図8)
- 最後に手でベルトを押し、固定されているかを確認して取り付け完了です。

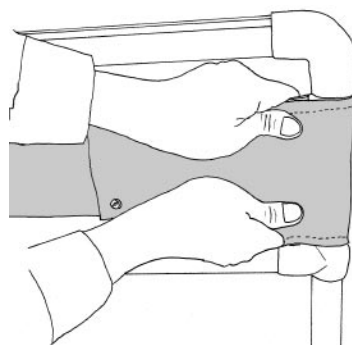

(図8)

⚠ 注意	
 確認	●フレームベルトが確実に固定されているか確認してください。 固定されていない場合は再度付け直してください。
	●固定ネジが確実に締め付けられているか確認してください。 締め付けされていない場合は再度、締め付けてください。
 必ず守る	●マジックテープ同士が重なるように取り付け、手で強く押さえつけて固定してください。
	●マジックテープの粘着力が落ちてきた場合は交換してください。 粘着力の効力は永久的なものではありません。粘着力が十分でない場合は、はずれる原因となります。ご使用をお止めになり、交換してください。

■ 日常のお手入れ

- 柔らかい布で乾拭き、または水拭きしてください。その後乾燥させてください。
- 汚れが目立つ場合は、中性洗剤等を柔らかい布やスポンジに含ませて拭き取り、その後水拭きして、乾燥させてください。
- マジックテープ面にゴミ等が付着していると、粘着力の低下につながりますので取り除いてください。

⚠ 注意	
 必ず守る	●お手入れ後は必ず乾燥させて使用してください。 乾燥不足だとカビが発生する原因になります。
 禁止	●直射日光での乾燥は避けてください。 変質・変色するおそれがあります。

お願い

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置せずに各自治体の取り決めに従ってください。廃棄方法が分からない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

矢崎化工株式会社

■本社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
福祉介護機器部 TEL 054(281)8867 FAX 054(284)0863

介護支援ページ
Kaigo-web
<http://www.kaigo-web.info/>

■北海道支店 福祉介護機器課
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■神奈川支店 福祉介護機器課
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■広島支店 福祉介護機器課
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■仙台支店 福祉介護機器課
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■静岡支店 福祉介護機器課
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988

■高松支店 福祉介護機器課
〒761-8058 香川県高松市勸使町227
TEL 087(866)6411 FAX 087(867)1916

■関東支店 福祉介護機器課
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522

■名古屋支店 福祉介護機器課
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■九州支店 福祉介護機器課
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

■東京支店 福祉介護機器課
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04(2944)7111 FAX 04(2944)7007

■大阪支店 福祉介護機器課
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822



外袋 PE

09060906

DW-112-00