

保管用

よくお読みください

## ベットでとまるくん CKA-CA

### お買い上げありがとうございます


販売店様：この説明書は必ずお客様に説明してからお渡してください。

使用者様：使用前にこの説明書を必ずお読みになり大切に保管してください。

※「たちあっぷ」の取扱説明書とあわせてご覧ください。


「ベットでとまるくん」は、「たちあっぷ」をベッドで使用するための安定度を向上させる製品です。

「ベットでとまるくん」を正しくご使用いただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずよくお読みください。

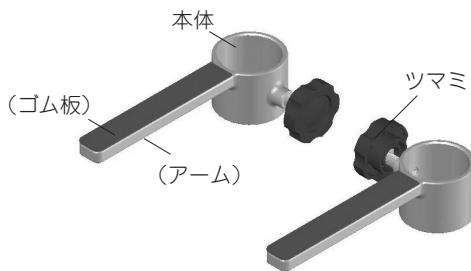

名 称	数 量	サイズ	材 質
本体	2 (左右)	—	アルミ、ゴム
ツマミ	2	M8	ステンレス、プラスチック

※製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。

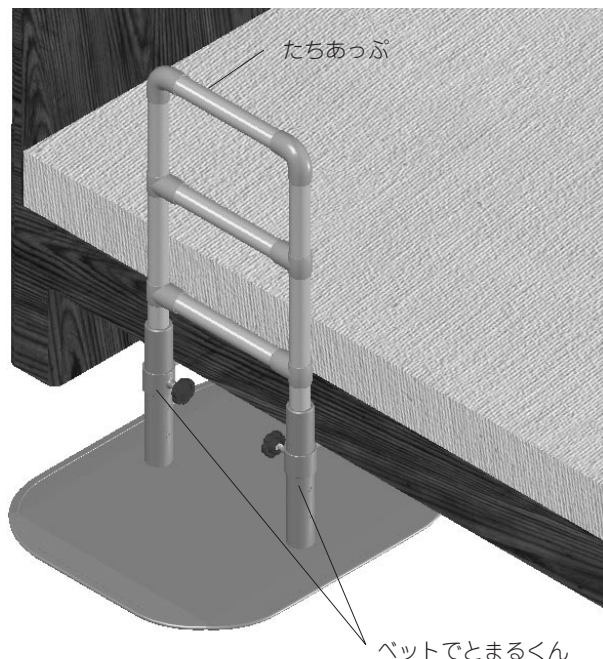

## ⚠️ 安全にご使用いただくためのご注意

### ⚠️ 安全上のご注意

- 足を掛けたり、踏み台として使用しない。
- ツマミ部分が突起していますので、衣服などを引っ掛けないように注意する。
- ベッドを移動する際は、「ベットでとまるくん」を外してから移動する。
- 製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。  
正しく設置できない場合や機能を損なう状態の場合は、直ちにご使用を中止し「たちあっぷ」をお買い上げの販売店にご連絡ください。
- 水平方向の力を加えるとたちあっぷが移動する可能性があるため注意する。  
「ベットでとまるくん」は、「たちあっぷ」の安定性を向上させるものであり、固定するものではありません。  
水平方向の力を加えますと「たちあっぷ」が移動し、すき間ができる可能性があるため注意してください。
- 設置後、ツマミの締め忘れがない事を必ず確認する。
- 定期的にツマミのゆるみ、部品の破損がない事を確認する。  
不具合がある場合は、使用を中止してください。
- 改造・加工は、絶対に行わない。
- 「ベットでとまるくん」に直接足を掛ける、踏み台としての使用はしない。

## ⚠ 設置上のご注意

- 「たちあつぷ」の安定性向上以外の目的で使用しない。  
「ベットでとまるくん」は、「たちあつぷ」をベッドで使用する場合の安定性を向上させる製品です。  
それ以外の目的で使用しますと事故やケガの原因になります。
- 弊社製品と他社製品を組み合わせない。  
破損やケガの原因になります。また、他社製品と組み合わせた製作物の安全は保証できません。
- 「ベットでとまるくん」のアームとベッドサイドフレームは、垂直になるように取り付ける。「たちあつぷ」はベッドと平行にして、すき間を空けないように設置する。
- 屋外や直射日光の当たる場所では使用しない。  
金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。
- 火のそばでは使用しない。  
変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。
- 水やお湯に濡れる場所では使用しない。  
変質や破損をするおそれがあります。
- 設置後、ガタツキ、ねじやツマミのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認する。
- 必ず左右セットで使用する。
- 組み立ては納入業者の方が行う。
- 一般家庭の室内で使用する。
- 製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管する。  
高温多湿の場所で保管しますと、変形、結合部の外れの原因になります。
- ツマミの締め付けは指定トルク以上で締め付けない。  
金具やねじが破損するおそれがあります。ツマミの締め付けトルクは、2~4N・m [20~40kgf・cm]です。
- 改造・加工は絶対に行わない。事故の原因になります。
- 定期的にガタツキ、ねじやツマミのゆるみ、締め忘れ、部品の破損がないことを確認する。

## ⚠ 日常のお手入れ

- ・お手入れは、水か中性洗剤をふくませた布をかたくしぼって拭いてください。シンナー、ベンジン類で拭くと変質して破損するおそれがあります。
- ・たわしや磨き粉などで磨くと傷がつくおそれがあります。
- ・直射日光は避けて陰干しにしてください。

## ⚠ 点 検

- ・定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじのゆるみ、締め忘れや破損・その他異常がないことを確認してください。
- ・異常があった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

## ⚠ 消毒方法

- ・消毒は納入業者、または、消毒施設のある業者に依頼してください。
- ・アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒等を推奨します。この製品の使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。
- ・オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは、使用しないでください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

## ● 矢崎化工株式会社

■本 社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1  
福祉介護機器部 TEL 054(281)8867 FAX 054(284)0863

介護支援ページ  
**kaigo-web**

<http://www.kaigo-web.info/>

■北海道支店 福祉介護機器課  
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1  
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■仙台支店 福祉介護機器課  
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280  
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■関東支店 福祉介護機器課  
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88  
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522

■東京支店 福祉介護機器課  
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3  
TEL 04(2944)7111 FAX 04(2944)7007

■神奈川支店 福祉介護機器課  
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4  
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■静岡支店 福祉介護機器課  
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1  
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988

■名古屋支店 福祉介護機器課  
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池48-2  
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■大阪支店 福祉介護機器課  
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1  
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

■広島支店 福祉介護機器課  
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17  
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■高松支店 福祉介護機器課  
〒761-8058 香川県高松市勅使町227  
TEL 087(866)6411 FAX 087(867)1916

■九州支店 福祉介護機器課  
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1  
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026