


ベットでとまるくん CKAシリーズ用 メンテナンスマニュアル

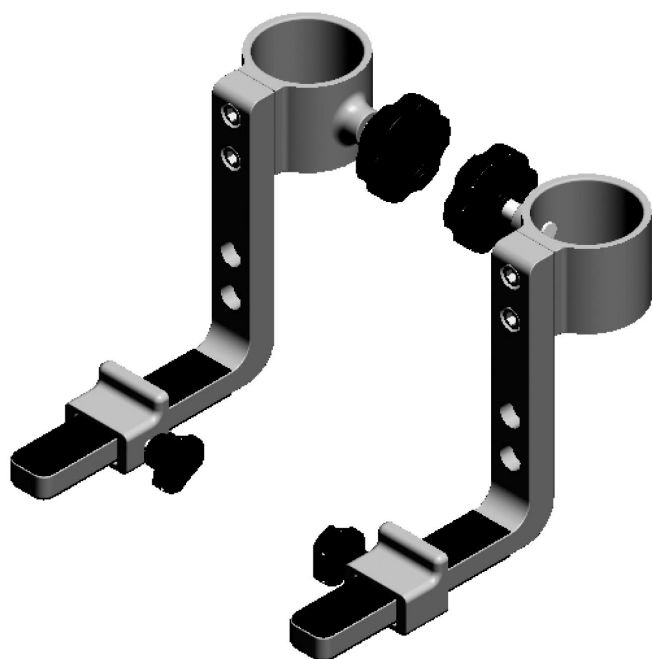

CKA-CK

目次		
1. メンテナンスの目安	2	初めに
2. メンテナンス方法	3～4	方法
! 安全に関する表示	2	
[1] 拭き取り	3	
[2] ねじのゆるみ点検	3	
[3] 部品交換（ねじ、ゴム以外）	3	
[4] ねじの交換	4	
[5] ゴムの交換	4	
[6] 塗装面の補修	4	
3. メンテナンス部品表	5	部品表

お買い上げありがとうございます

販売店様：このメンテナンスマニュアルを必ずお読みになり大切に保管してください。

矢崎化工株式会社

保管用

よくお読みください

！安全に関する表示

 警告	誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。	 禁止	してはいけない内容です。
 注意	誤った使用をされた場合、「傷害や財産への障害につながる可能性がある」内容を注意しています。	 必ず守る	必ず守っていただく内容です。

1. メンテナンスの目安

場 所	状 態	対 処 方 法
全体	➡ 汚れ	➡ 2. メンテナンス方法 [1] 拭き取り
	➡ ガタツキがある	➡ 2. メンテナンス方法 [2] ねじのゆるみ点検 [3] 部品交換（ねじ、ゴム以外）
	➡ 部品がうまく取り付けかない	➡ 2. メンテナンス方法 [3] 部品交換（ねじ、ゴム以外）
	➡ 部品の変形、深いキズ、亀裂	➡ 2. メンテナンス方法 [3] 部品交換（ねじ、ゴム以外）
	➡ ねじがスムーズに回らない	➡ 2. メンテナンス方法 [3] 部品交換（ねじ、ゴム以外） [4] ねじの交換
アーム	➡ ゴムの外れ、破損、劣化	➡ 2. メンテナンス方法 [5] ゴムの交換
	➡ キズによる塗装の剥がれ	➡ 2. メンテナンス方法 [6] 塗装面の補修
ジョイント	➡ キズによる塗装の剥がれ	➡ 2. メンテナンス方法 [6] 塗装面の補修
ストッパー	➡ キズによる塗装の剥がれ	➡ 2. メンテナンス方法 [6] 塗装面の補修

2. メンテナンス方法

＜メンテナンスに必要な工具＞：六角レンチ（対辺5mm）・カッター


[1] 拭き取り

- 汚れが軽い場合は、水で濡らした布で拭き、その後乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で浸した布で拭き、洗剤が残らないように水ぶきした後、乾拭きしてください。

⚠ 注意	
🚫 禁止	●シンナー・ベンジン・クレゾール・塩素系洗剤等は使用しない。 変質・変色または劣化により破損するおそれがあります。
	●たわしや研磨剤等を使用して磨かない。 傷がつくおそれがあります。
❗ 必ず守る	●直射日光は避けて、陰干しにする。 変形や破損するおそれがあります。

[2] ねじのゆるみ点検

- ①ツマミ、ツマミ S を締め付けてください。
- ②六角穴付きねじ (M6 × 12) が指定トルク 2.7N・m {28kgf・cm} で締め付けられていることを確認してください。

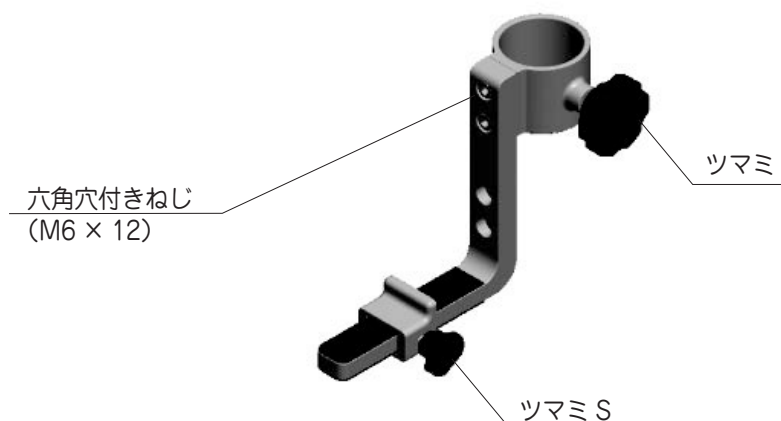

[3] 部品交換（ねじ、ゴム以外）

- 部品がうまく取り付けられない場合や、部品に変形、深いキズ、亀裂がある場合は部品交換を行なってください。
- 他の部品に付着している水分、油、汚れなどを取り除いてから新しい部品を取り付けてください。
- 組立方法の詳細は、取扱説明書をご確認ください。

⚠ 注意	
❗ 必ず守る	●部品交換を行なう際は、指定部品を使用する。 メンテナンス部品表をご参照ください。
	●ねじの締め付けは指定トルクで行なう。
	●部品交換を行なった際は、ご使用前にねじのゆるみ、ガタツキがないことを再確認する。


[4] ねじの交換

- ねじがスムーズに回らない場合は、ツマミや六角穴付きねじの交換を行なってください。
- ねじ交換を行なっても、ねじがスムーズに回らない場合や締め付けができない場合は、ねじ穴が潰れている可能性があります。
- ジョイントやストッパーのねじ穴を確認し、ねじ山が潰れている場合は部品交換を行なってください。
- ジョイントアームやストッパーの水分、油、汚れなどを取り除いてから新しいねじを取り付けてください。
※六角穴付きねじの締め付けトルクは、 $2.7\text{N} \cdot \text{m}$ { $28\text{kgf} \cdot \text{cm}$ } です。

⚠ 注意	
 禁止	●ねじは指定トルク以上で締め付けない。

[5] ゴムの交換

- ゴムに破損や劣化がある場合には、ゴムを交換してください。
- 交換を行う場合には、まず古いゴムを取り外し、アームに残っている粘着剤を取り除いてから、新しいゴムを貼り付けてください。
- 短い方のゴム (A) を交換する場合には、メンテナンス部品の (とまるくんゴム板) を 8mm 切り取ってご使用ください。
- 長い方のゴム (B) を交換する場合には、切らずにご使用ください。

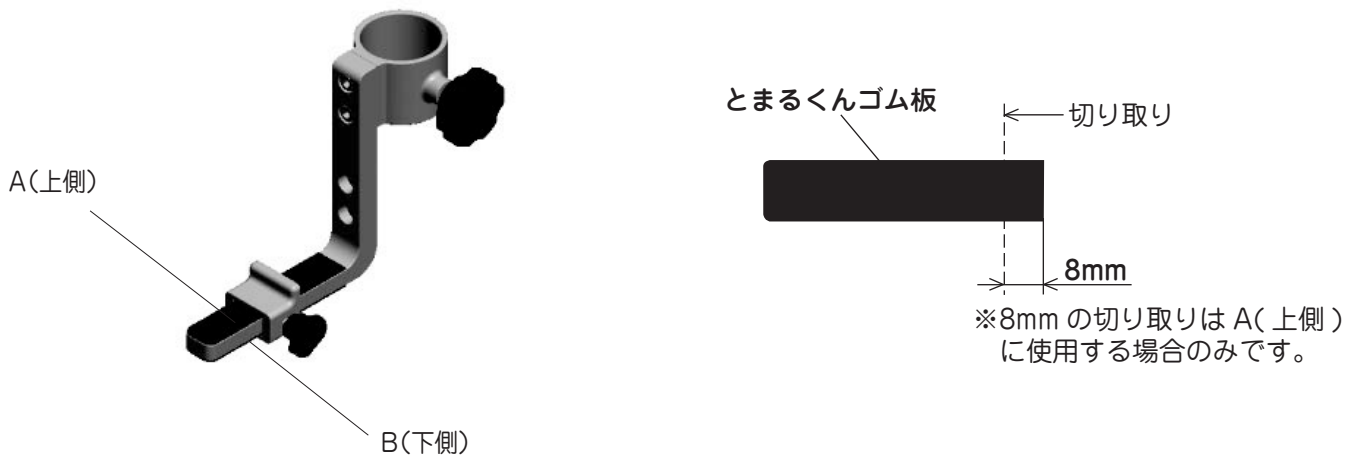


[6] 塗装面の補修

- 汚れ、油などを拭き取り、アクリル系塗料または専用塗料 (たちあっぷ塗料 MB) で塗装してください。
(メンテナンス部品表参照)
- 塗装を行なう際は、屋外または換気の良い場所で作業を行なってください。密閉された作業場で行なう場合は、局所排気装置を設け、塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 塗装中は、必要に応じてマスクや手袋を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。

3. メンテナンス部品表

CKA-CK

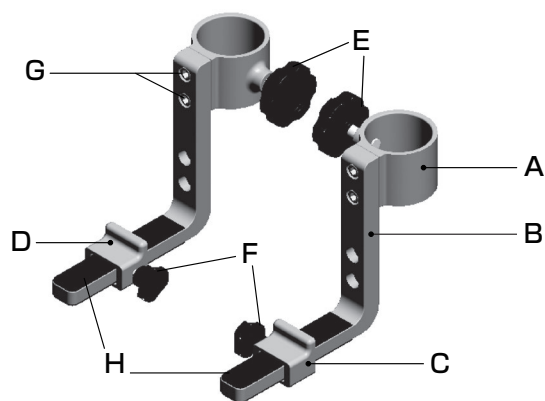

記号	部品名	部品番号	部品図	材質	入数
A	とまるくん ジョイント	CKA-CD		アルミ合金	6 個
B	とまるくん アーム (ゴム板付)	CKA-CE		アルミ合金 / ゴム	6 本
C	とまるくん ストッパー R	CKA-CFR		アルミ合金	4 個
D	とまるくん ストッパー L	CKA-CFL		アルミ合金	4 個
E	とまるくん ツマミ (M8 × 20)	CGA-CG		樹脂 / ステンレス	4 個
F	とまるくん ツマミ S (M5 × 10)	CGA-CH		樹脂 / ステンレス	4 個
G	六角穴付きねじ (M6 × 12)	CGA-CI		ステンレス	50 本
H	とまるくん ゴム板 (粘着テープ付)	CGA-CJ		ゴム	10 枚
—	たちあっぷ 塗料 MB	CKA-AF		アクリル系塗料	1 個 (15ml)
—	六角レンチ (対辺 5mm)	CKA-MJ 5M		スチール	5 本

※製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

● 矢崎化工株式会社

介護支援ページ
Kaigo-web
<http://www.kaigo-web.info/>

■ 本 社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

■ 北 海 道 支 店 福祉介護機器課
〒072-0007 北海道美幌市東 6 条北 8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■ 仙 台 支 店 福祉介護機器課
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■ 関 東 支 店 福祉介護機器課
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522

■ 東 京 支 店 福祉介護機器課
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007

■ 神 奈 川 支 店 福祉介護機器課
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■ 静 岡 支 店 福祉介護機器課
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988

■ 名 古 屋 支 店 福祉介護機器課
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■ 大 阪 支 店 福祉介護機器課
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

■ 広 島 支 店 福祉介護機器課
〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■ 九 州 支 店 福祉介護機器課
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

10122304

DW-137-05