


トイレ固定用アンクルⅡ

品番：CKJ-E

トイレ固定用アンクルⅡはトイレ用たちあっぷⅡを寸胴型便器、壁面に取付可能とする専用アダプターです。

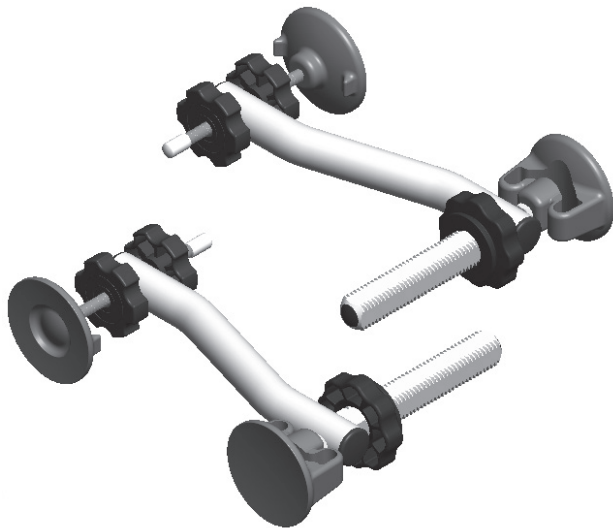

目次

！ 安全に関する表示	2
1. 使用上のご注意	2
2. 設置上のご注意	2
3. 仕様	2
4. 部品表	3
5. 取付可能な便器・壁面	3
6. 設置手順	4
7. ご使用前の確認	7
8. お手入れ方法	8

お買い上げありがとうございます

販売店様：この説明書は必ずお客様に説明してからお渡しください。

ご利用者様：使用前にこの説明書を必ずお読みになり大切に保管してください。

※「トイレ用たちあっぷⅡ」の取扱説明書と合わせてご覧ください。

！安全に関する表示

※いずれも安全に関する内容ですので必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。	禁止	してはいけない内容です。
⚠ 注意	誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。	必ず守る	必ず守っていただく内容です。


1. 使用上のご注意

※トイレ用たちあっぱⅡの使用については「トイレ用たちあっぱⅡ」取扱説明書の「1. 使用上のご注意」も合わせてご確認ください。

⚠ 警告			
禁止	●製品が破損、または正常な状態でないときは絶対に使用しない。 ねじ等のゆるみ、便器・壁面への固定が不十分な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。	●体重が 100kg 以上の方は使用しない。 製品の外れや破損により転倒、ケガをするおそれがあります。	
⚠ 注意			
必ず守る	●定期点検（推奨点検期間 1 カ月ごと）を行う。 定期的に点検を行い、ガタつき・ねじやハンドルなどのゆるみ・部品の破損・その他異常がないことを確認してください。（「7. ご使用前の確認」参照）	●製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。 正しく設置できない場合や機能を損なう状態の場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。	



2. 設置上のご注意

※トイレ用たちあっぱⅡの設置については「トイレ用たちあっぱⅡ」取扱説明書の「3. 設置上のご注意」も合わせてご確認ください。

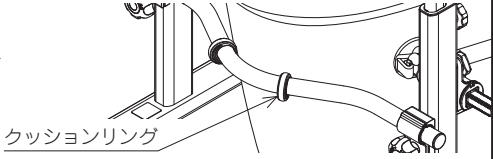⚠ 警告			
禁止	●弊社製品と他社製品を組み合わせない。 破損やケガの原因になります。また、他社製品と組み合わせた製作物の安全は保証できません。	●改造・加工は絶対に行わない。 事故の原因になります。	
	●取付可能な洋式便器・壁面以外に取り付けない。（「5. 取付可能な便器・壁面」参照） 取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。		
	●設置後、ガタつき・ねじやハンドルなどのゆるみ・締め忘れがないことを必ず確認する。 取付けが不安定な場合は「7. ご使用前の確認」をご確認ください。取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。	●便器側に固定する際は便器が床にしっかりと固定されているか確認する。 （本製品はポータブルトイレで使用できません） 取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。	
必ず守る	●床が老朽化などにより強度がない場合は取り付けない。 床自体に強度がない場合は荷重により床が沈んだり、便器との隙間を発生させ、便器・床・下水管等の破損の原因になります。また、取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。		
	●便器に固定する際はクッションリングを便器にすき間なくあてた状態で取り付ける。（「6. 設置手順」参照） 取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。		 クッションリング

⚠ 注意			
禁止	●各ハンドルは工具を使用して締め付けない。 破損するおそれがあります。	●屋外や直射日光の当たる場所では使用しない。 金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。	
必ず守る	●クッションフロア材の床やビニールクロス材の壁（塩化ビニル製）などに長時間設置するとそれらの素材にへこみや色移りする場合があるので、注意する。	●定期的にガタつき・ねじやハンドルなどのゆるみ・部品の破損がないことを確認する。	
	●組み立て、高さ調整などの設置は納入業者が行う。		

3. 仕様

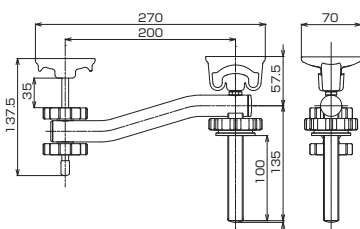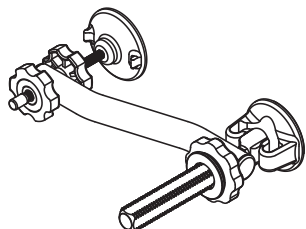


単位：mm

品 名	トイレ固定用アングルⅡ
品 番	CKJ-E
質 量	860g(左右 1 セット)
利用者体重	100kg 以下

左右どちらも同じ仕様です。

4. 部品表

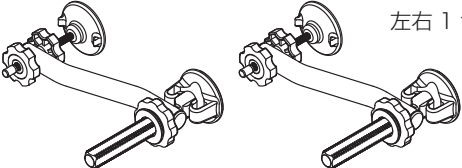名称	部品図	材質
トイレ固定用アングルⅡ		アルミ、ゴム、樹脂 ステンレス、軟質樹脂

5. 取付可能な便器・壁面


- トイレ固定用アングルⅡは便器を挟み込む固定と壁面へ突っ張る固定の2通りの取付けができます。
- ご使用前に取付け可能な便器・壁面であるか、ご確認ください。

■便器側への取付け

● 便器後方に丸み・凹みがない便器



取付可能

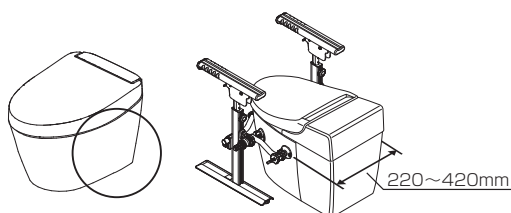


- ・ 便器後方の挟み込み部分に凹み部分がないタンクレストイレ便器などに取付けできます。
- ・ 樹脂製便器や挟み込み部分が樹脂カバーと干渉する場合は便器側への取付けはできません。
- ・ 取付け可能な便器の幅は 220～420mm(便器後側の取付位置の幅)です。

● 便器後方に丸み・凹みがある便器




取付できない

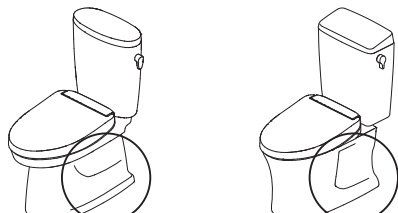

- ・ 便器後方に向け丸みや凹みがある便器には取付けできません。
- ・ トイレ固定用アングルセット (CKJ-B) をご使用ください。

CKJ-B▶

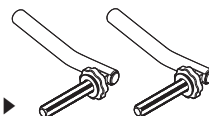


操作パネルが長い温水洗浄便座をお使いの場合

● 操作パネルの厚みが中央から 260mm 以下



取付可能

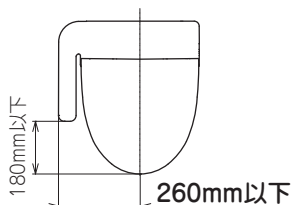


便器先端より 180mm 以下の範囲内にある長い操作パネルで、便器中央より 260mm 以下の厚みがある場合取付けできます。

● 操作パネルの厚みが中央から 260mm 以上



取付できない
場合がある

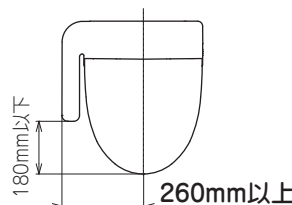

便器先端より 180mm 以下の範囲内にある長い操作パネルで、便器中央より 260mm 以上の厚みがある場合取付けできない可能性があります。

■壁面側への取付け


- 取付け可能な壁の幅は 730～900mm(壁から壁の幅)
- 主にクロスやタイルなどの壁に取付けが可能です。
- 下記の壁には取付けできません。

⚠ 警告

 禁止	● 砂壁、土壁は表面が崩れやすいため設置しない。 壁表面が崩れ、製品がズれることにより転倒、ケガをするおそれがあります。	● 設置面に段差や凹凸がある壁は設置が不十分となるため設置しない。 製品の外れにより転倒、ケガをするおそれがあります。
	● 壁面にひび割れや深い傷などがある場合は設置しない。 壁の破損や製品の外れにより転倒、ケガをするおそれがあります。	● 壁面が劣化していたり、壁面強度が低下している壁には設置しない。 壁の破損や製品の外れにより転倒、ケガをするおそれがあります。

設置箇所の確認

- ① 床に十分強度があることを確認し、取付けをしてください。
老朽化などで床に強度がない場合は荷重により床が沈んだり、便器との隙間を発生させ、便器・床・下水管等の破損の原因になります。
また、取付けが不安定になるため、事故やケガの原因になります。
- ② 設置前には製品が取り付けられる箇所の汚れを雑巾などで取り除いてから取付けをしてください。(水分が付着した場合は乾拭きしてください。)
- ③ クッションフロア材の床、ビニールクロス材(塩化ビニル製など)の壁にご使用の場合、長期間設置していると色移り(移行)現象により表面が変色する場合があります。
- ④ 床や壁などに長期間設置していると設置面に多少の凹みが発生したり、未設置部分との汚れの差で色の違いが発生する場合があります。
- ⑤ 壁面に長期間設置していると壁面の材質によってはゴム部分に壁紙がはりつく場合があります。

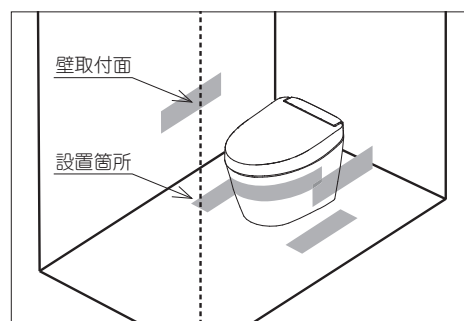


6. 設置手順

※組み立て、高さ調節などの設置は納入業者が行ってください。


- ここでは便器を挟み込む固定を基本に説明します。
- 壁面への固定はトイレ固定用アングルⅡの差し込み方法を逆にすることで同様の取付方法にて設置ができます。

6-1. アームレストスタンドセットと横幅調整パイプの組立て

6-1-1 横幅調整ハンドルをゆるめてから横幅調整パイプをアームレストスタンドセットに差し込みます。
横幅調整金具セットを押さえながら横幅調整ハンドルを締め付けて固定してください。

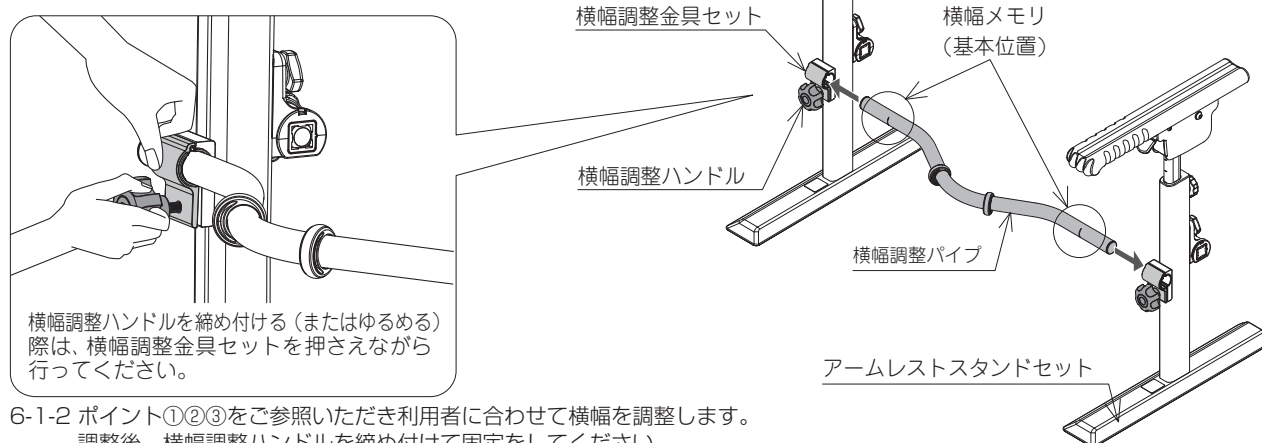

6-1-2 ポイント①②③をご参照いただき利用者に合わせて横幅を調整します。
調整後、横幅調整ハンドルを締め付けて固定をしてください。

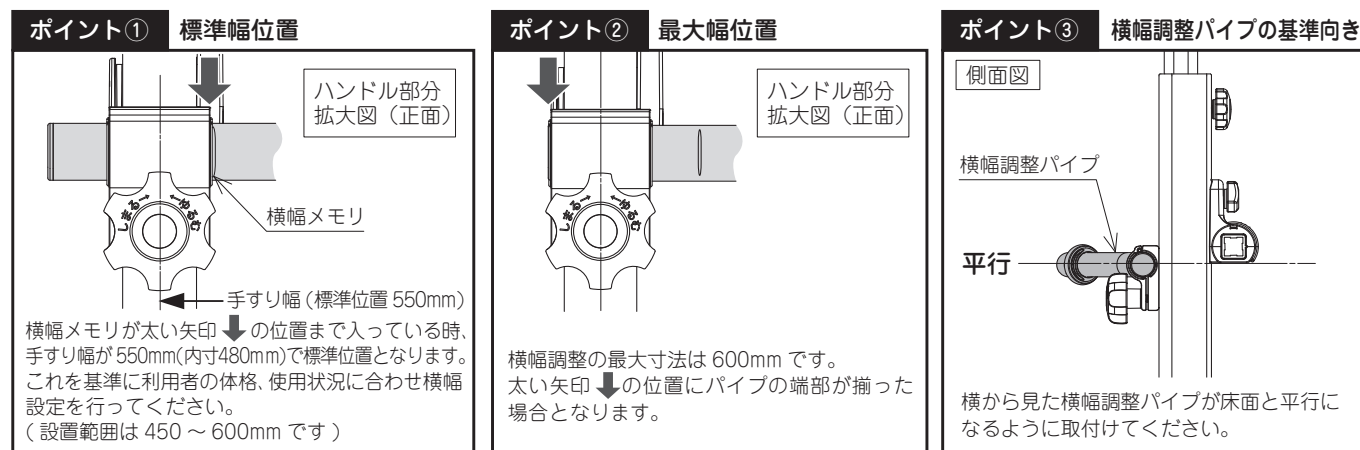

6-2. トイレ固定用アングルⅡをアームレストスタンドセットに差し込む

6-2-1 トイレ固定用ハンドル、調整ツマミを矢印の方向に回転させ、図の位置まで移動させます。
6-2-2 その後、固定の仕方にあわせてアームレストスタンドセットに差し込んでください。

図 6-2-1




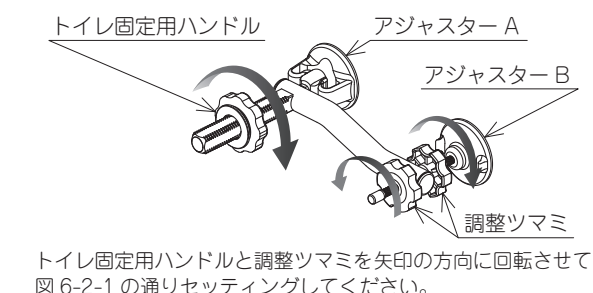


図 6-2-2



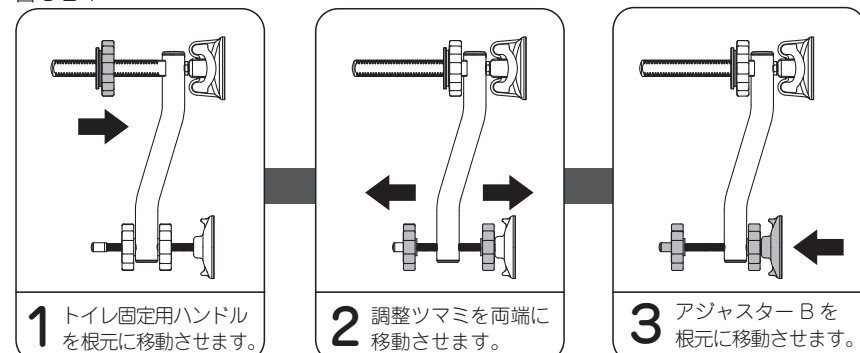
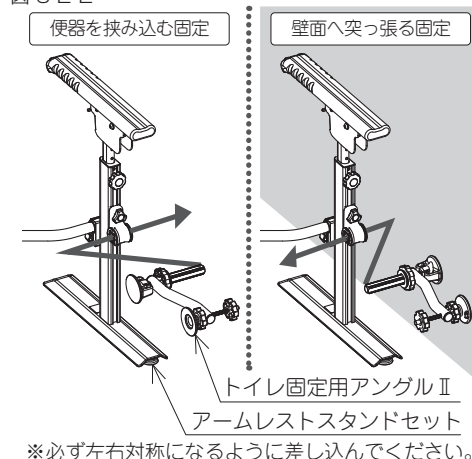


ポイント④ 取付け高さ

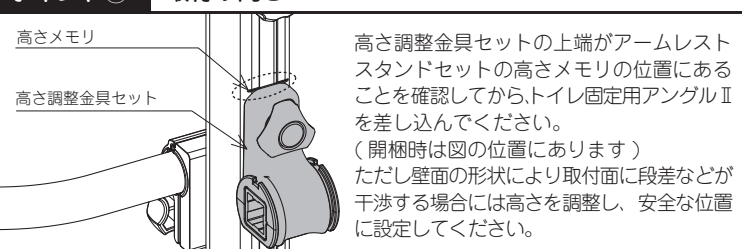

6-3. クッションリングと横幅調整ハンドルの調整

本体を、両側のクッションリングが便器の先端に当たる位置まで、便器正面から押し付けます。

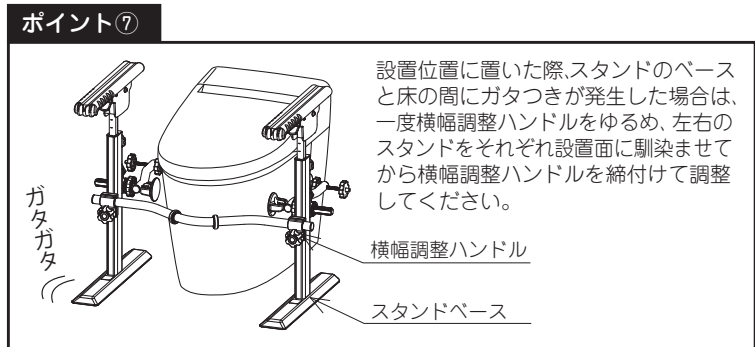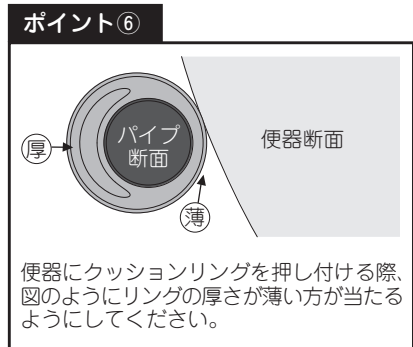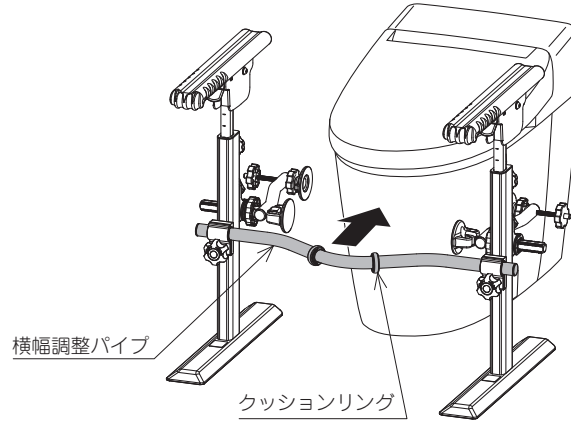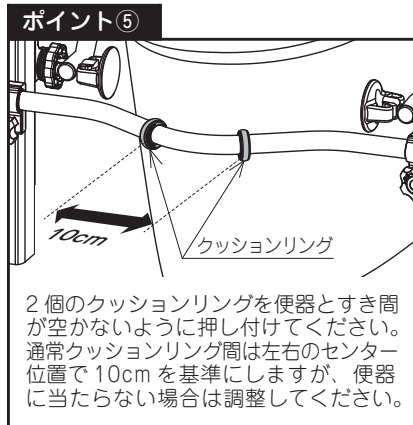

6-4. トイレ固定用アングルⅡの調整

6-4-1 トイレ固定用アングルⅡのアジャスター A が便器（壁面）形状に沿って当たる位置まで移動させます。→「ポイント⑧⑨」参照

6-4-2 アジャスターBを便器（壁面）に当たる位置まで移動させ、そのパイプ部分が固定されるように調整ツマミを両側から挟み込み、締め付けます。

図 6-4-1




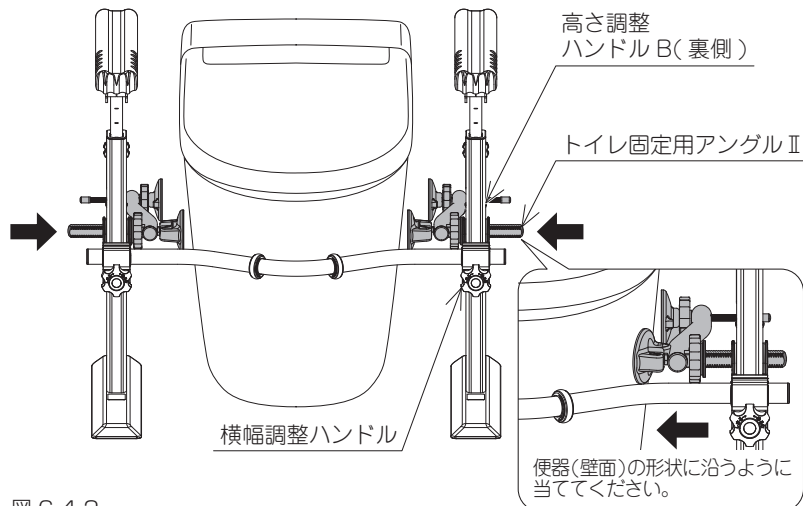



図 6-4-2

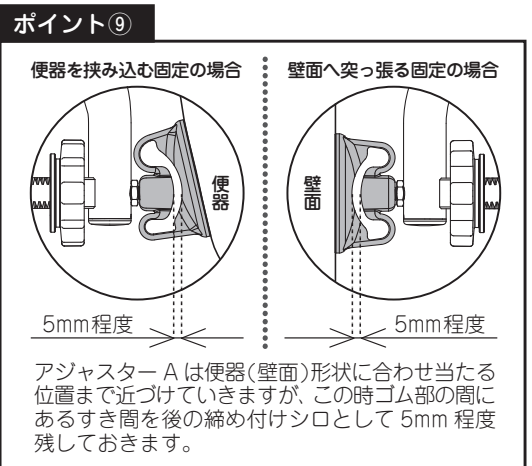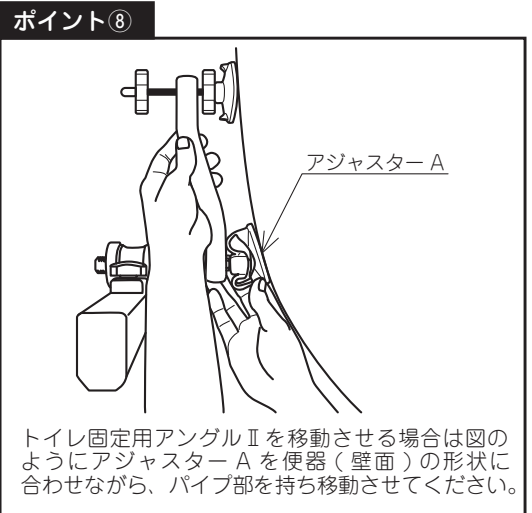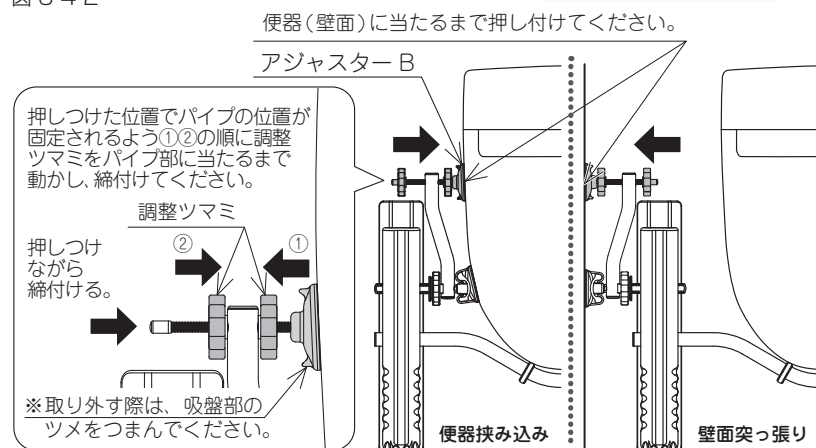

6-4-3 トイレ固定用ハンドルを左右均等に締付け固定します。→「ポイント⑩」参照

※この時横幅調整ハンドルと高さ調整ハンドルBがしっかりと締められていることを確認してから、トイレ固定用ハンドルを締め付けてください。

図 6-4-3

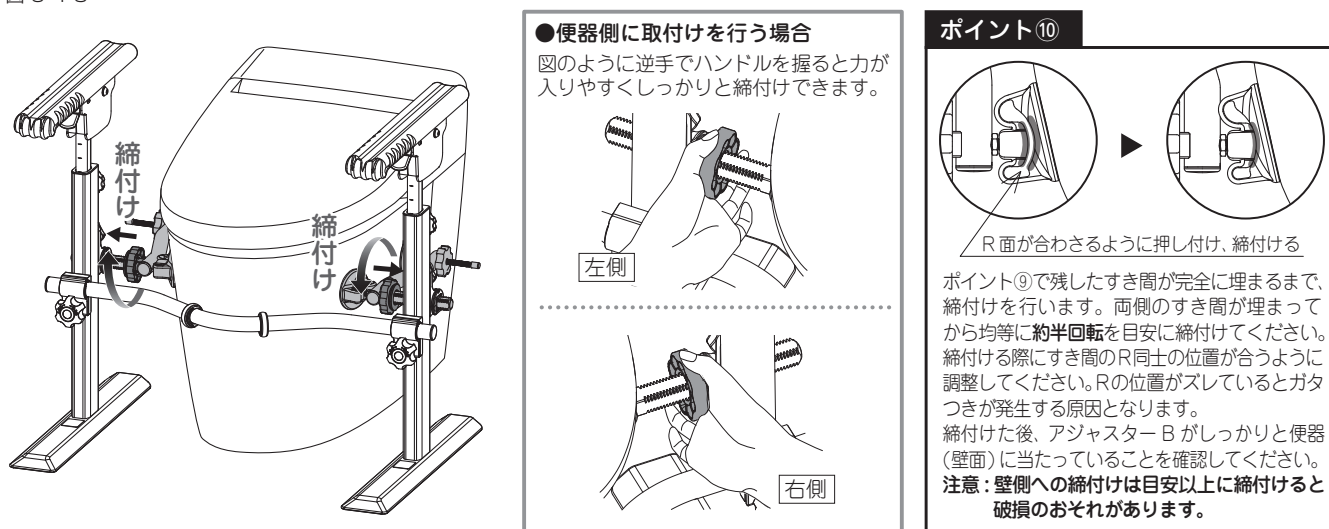


6-5. クッションリングと便器の間にできたすき間の調整

6-4-3 でトイレ固定用ハンドルを締め付けると、便器形状や取付け方により便器とクッションリングの間にすき間が発生する場合があります。すき間が発生した場合はクッションリングを図のように回転させ、すき間がなくなるように調整してください。



6-6. 固定キャップの取付け

固定キャップをトイレ固定用ハンドルの下図の位置に取付けます。
(固定キャップの裏にある凸部を本体側の凹部に合わせ嵌め込みます。)

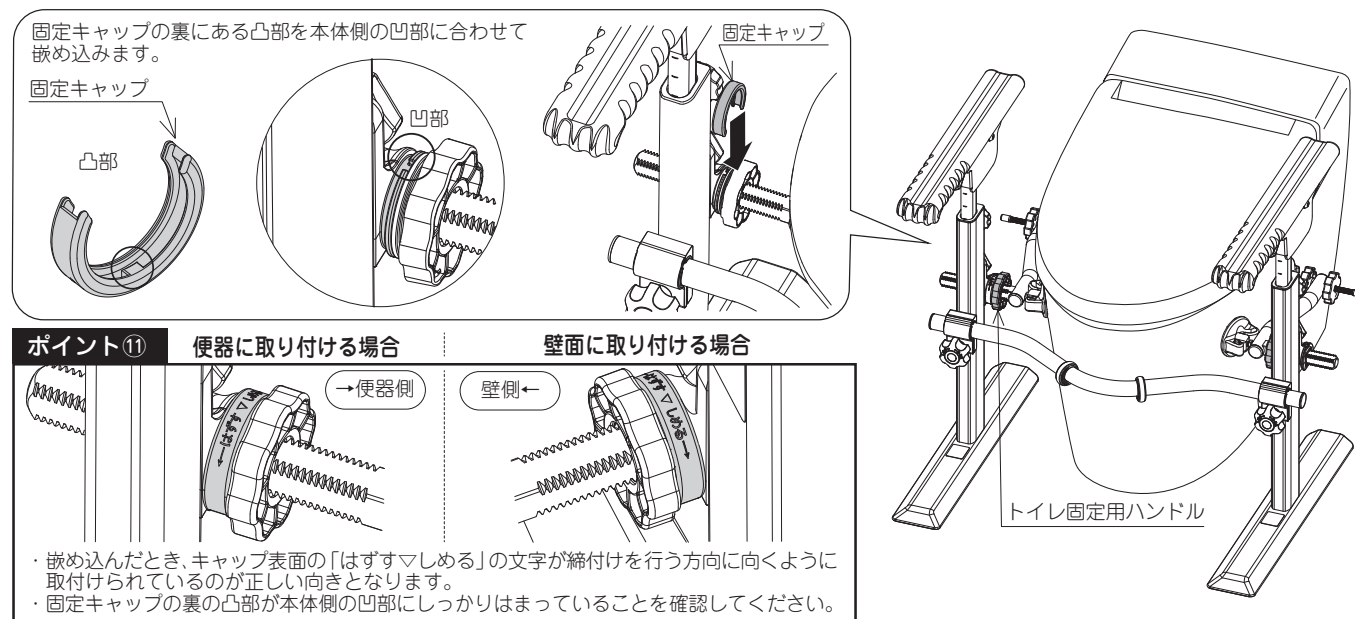

6-7. ガタつき・調整箇所のゆるみがないか確認

最後に全体のガタつきや、ハンドルなどの全調整箇所のゆるみがないかを確認し（「7. ご使用前の確認」参照）、設置の完了です。

⚠ 注意



必ず守る

●再調整を行った場合は、必ずもう一度設置手順に沿って締付けを行う。


取付完了後に横幅の再調整や便器の挟み込み部分の高さ調整などを行う場合は、トイレ固定用アングルⅡをゆるめ、もう一度設置手順に沿った締付けを行ってください。

7. ご使用前の確認

！ 設置完了後、また定期点検時（推奨点検期間：1 カ月ごと）に、ガタつき・調整箇所のゆるみ・部品の破損がないか確認してください。

7-1. ガタつきの確認方法

図のようにアームレスト中央を持ち、前後左右に軽く揺らし、ガタつきがないかチェックしてください。

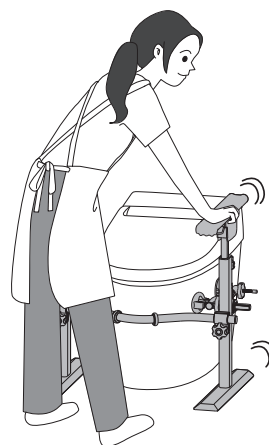

7-2. 調整箇所のゆるみ確認と対処方法

■ 確認チェックは下記番号順に進めてください。

（手順通りに進めないと固定が不十分になるおそれがあります。）

①

高さ調整ハンドル A は
しっかりと締め付けられていますか？
→締め付けがゆるい場合はしっかりと
締め付けてください。

チェック✓

②の確認へ

②

横幅調整ハンドルは
しっかりと締め付けられていますか？
→締め付けがゆるい場合はしっかりと
締め付けてください。

チェック✓

③の確認へ

③

高さ調整ハンドル B は
しっかりと締め付けられていますか？
→締め付けがゆるい場合はしっかりと
締め付けてください。

チェック✓

④の確認へ

④

調整ツマミ、トイレ固定用ハンドルは
しっかりと締め付けられていますか？
（アジャスター A・B がしっかりと
便器（壁面）にあたっていますか？
P6 「ポイント⑩」参照）
→締め付けがゆるい場合はしっかりと
締め付けてください。


チェック✓

⑤の確認へ

⑤

クッションリングと便器の間にすき間がありませんか？
→クッションリングを回転させ、すき間を埋めてください。
すき間が埋まらないほど離れている場合は再度設置を行う必要が
あります。P5 「6-3. クッションリングと横幅調整ハンドルの調整」
から手順に沿って再設置をしてください。

チェック✓

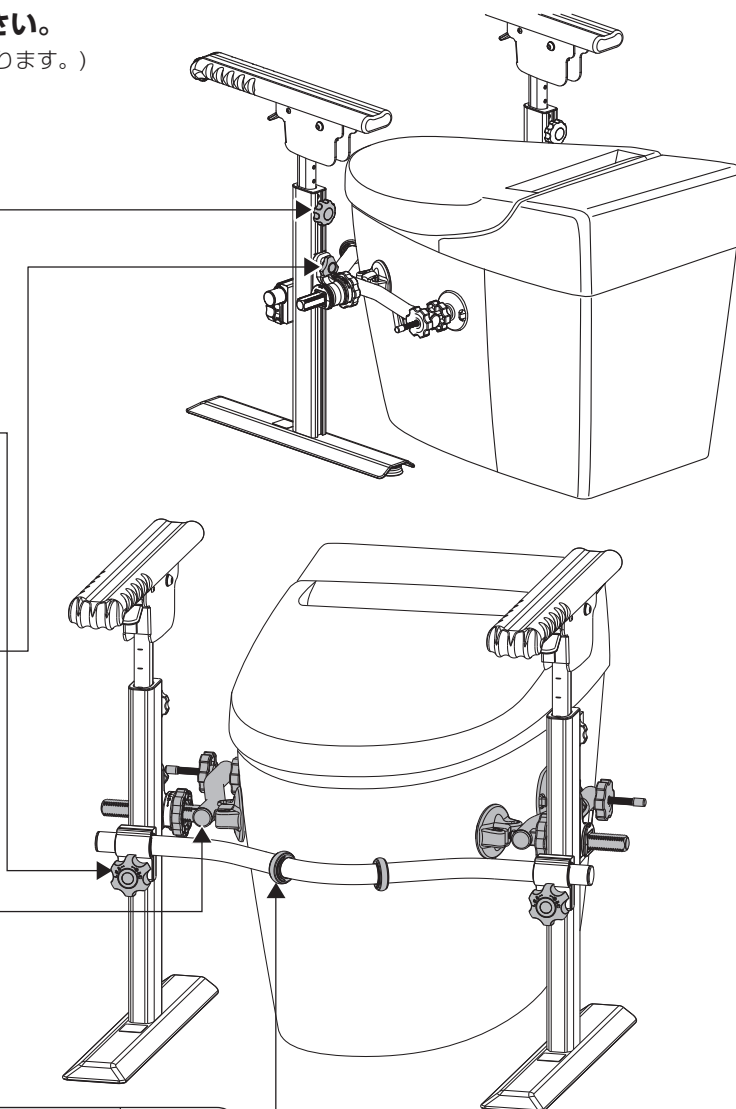

上記の確認をしても異常がある場合は、お買い上げの販売店またはレンタル事業者、ケアマネジャーにご相談ください。

8. お手入れ方法

8-1. 日常のお手入れ

- 水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。

⚠ 注意	
⊘ 禁止	● 酸性・塩素系洗剤は使用しない。 錆、変色、変質、塗装の剥がれ、または劣化による破損の原因になります。
	● シンナー・ベンジン・クレゾールなどは使用しない。 変色・変質または劣化により破損するおそれがあります。
	● たわしや磨き粉などで磨かない。 傷がつくおそれがあります。
❗ 必ず守る	● 直射日光は避けて、陰干しする。

8-2. 点検

- 定期的に点検を行い、ガタつき・ねじやハンドルなどのゆるみ・部品の破損・その他異常がないことを確認してください。

⚠ 注意	
❗ 必ず守る	● 定期的にガタつき・ねじやハンドルなどのゆるみ・部品の破損・その他異常がないことを確認する。 異常があった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

8-3. 消毒方法

- 消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
- アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。消毒後は、仕上げに水拭きをしてください。
- この製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。(オゾンガスは使用すると品質が低下する場合があります。)
- 塩素系の消毒液を使用する場合は、使用する消毒液の使用方法及び使用上の注意に従い、希釈して使用し、仕上げに水拭きをしてください。
(参考：次亜塩素酸ナトリウム 6%水溶液なら
120 倍～ 300 倍程度に希釈)

⚠ 注意	
⊘ 禁止	● ホルムアルデヒドガスは使用しない。 変質、破損するおそれがあります。
❗ 必ず守る	● アルコール系の消毒液や逆性石鹼、塩素系の消毒液が付着した場合は水拭きをし、製品表面に消毒液が残らないようにする。 錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。

8-4. 保管方法

- 製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管してください。

⚠ 注意	
❗ 必ず守る	● 製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管する。 高温多湿の場所で保管すると、変形、結合部の外れの原因になります。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

● 矢崎化工株式会社

介護支援ページ
kaigo-web
<https://www.kaigo-web.info/>

■ 本 社
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

■ 北 海 道 支 店 福祉介護課
〒072-0007 北海道美幌市東 6 条北 8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■ 仙 台 支 店 福祉介護課
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■ 関 東 支 店 福祉介護課
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)4562 FAX 0276(38)3522

■ 東 京 支 店 福祉介護課
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007

■ 神 奈 川 支 店 福祉介護課
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■ 名 古 屋 支 店 福祉介護課
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■ 大 阪 支 店 福祉介護課
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

■ 広 島 支 店 福祉介護課
〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■ 九 州 支 店 福祉介護課
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

16022504

DW-213-04