

取扱説明書



| |
|---|
| 対象のたちあっぷ品番 |
| CGA-3、CKA-01、CKA-02 FB-02 CKA-02T1、CKA-02T2 CKA-02T3 |


保管用
よくお読みください

たちあっぷサポートベルト CKA-HBS

たちあっぷのフレームのすき間に頭部が入り込むことを防止するベルトです。

※ご使用者様へ：この説明書はよくお読みになり、必ず保管してください。
※販売店様へ：この説明書は必ずお客様にご説明の上、お渡しください。


1. たちあっぷサポートベルト 仕様

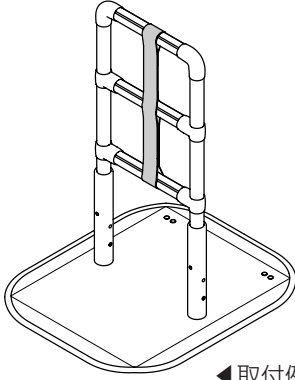

◀取付例

| | |
|------------|---|
| 品名 | たちあっぷサポートベルト |
| 品番 | CKA-HBS |
| サイズ | 長さ 約105cm × 幅 約5cm (ベルトサイズ) |
| 対象のたちあっぷ品番 | CGA-3、CKA-01、CKA-02 FB-02 CKA-02T1、CKA-02T2 CKA-02T3 |
| 材質 | ベルト：ナイロン 面ファスナー：ナイロン ループ：ポリアセタール |

● 内容物

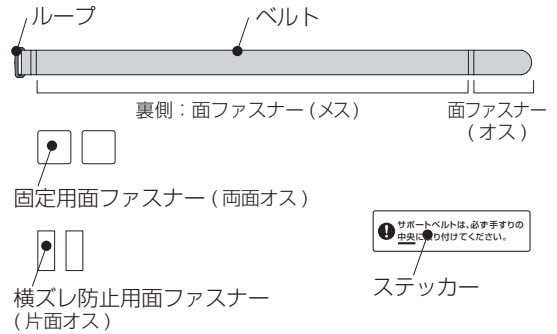

2. 使用上のご注意

※いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

● 安全に関する図表示

| | | | |
|--|--|--|---|
| | 記号は、してはいけない「 禁止 」の内容です。 (左図の場合は接触禁止) | | 記号は、必ずしていただく「 強制 」の内容です。 (左図の場合は必ず守る) |
|--|--|--|---|

⚠ 注意

| | | |
|--|---|---|
| | ●「たちあっぷ」フレームに取り付ける以外の用途で使用しない。 | ●水やお湯に濡れる場所では使用しない。 変質や破損をするおそれがあります。 |
| | ●サポートベルトを持って立ち上がりの動作をしない。 たちあっぷは必ず手すりを持って使用してください。 | ●屋外や直射日光の当たる場所では使用しない。 本製品は室内専用製品です。屋外で使用しますと変質や変色をするおそれがあります。 |
| | ●火のそばでは使用しない。 軟化または変形や破損をするおそれがあります。 | ●使用前にサポートベルトの取付状態を確認する。 ご使用中にベルトが手すりの中央からズレたり、ゆるんだ場合は正しく取り付け直して使用してください。 |
| | ●ご使用の際は介護者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認する。 利用者の心身の状態や症状を確認してください。 | ●製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。 常に正しく取り付けられていて、面ファスナー同士が固定されていることを確認して使用してください。ベルト・面ファスナー・ループの外れや破損など正しく取り付かない場合や機能を損なう状態の場合は、直ちにご使用を中止し、たちあっぷをお買い上げの販売店にご連絡ください。 |

3. お手入れ方法

- ・柔らかい布で乾拭き、または水拭きしてください。その後乾燥させてください。
- ・汚れが目立つ場合は、中性洗剤等を柔らかい布やスポンジに含ませて拭き取り、その後水拭きして乾燥させてください。
- ・面ファスナーにゴミ等が付着していると粘着力の低下につながりますので取り除いてください。
- ・洗濯機を使用する場合は洗濯用ネットを使用し、面ファスナー同士を貼り合わせた状態で行ってください。

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| ⚠ 注意 | |
| | ●乾燥機で乾燥させない 生地の変質、劣化のおそれがあります。 |

矢崎化工株式会社

■本社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
福祉介護機器部 TEL 054(281)8867 FAX 054(284)0863

介護支援ページ
kaigo-web
<http://www.kaigo-web.info/>

■北海道支店 福祉介護機器課
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■仙台支店 福祉介護機器課
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■関東支店 福祉介護機器課
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522

■東京支店 福祉介護機器課
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04(2944)7111 FAX 04(2944)7007

■神奈川支店 福祉介護機器課
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■静岡支店 福祉介護機器課
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988

■名古屋支店 福祉介護機器課
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■大阪支店 福祉介護機器課
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

■広島支店 福祉介護機器課
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■高松支店 福祉介護機器課
〒761-8058 香川県高松市勅使町227
TEL 087(866)6411 FAX 087(867)1916


■九州支店 福祉介護機器課
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

12031203
DW-158-00


4. たちあっぷサポートベルト 取付方法

※取り付け、取り外しは必ず納入業者の方が行ってください。


- ①手すりフレームにステッカーを貼ります。
ステッカーの上端と蓄光ラインの下端、ステッカーの右端とジョイントの左端を合わせて貼り付けてください。

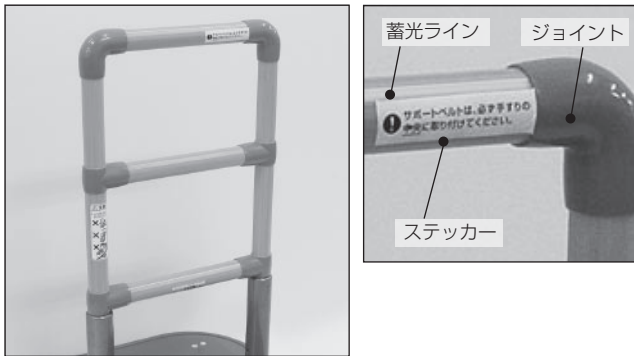


- ②サポートベルトの面ファスナーを外して広げます。
面ファスナーが内側になるように横3本のパイプの中央に縦方向にベルトを巻き付け、ループの外側から内側にベルトを通し、折り返します。

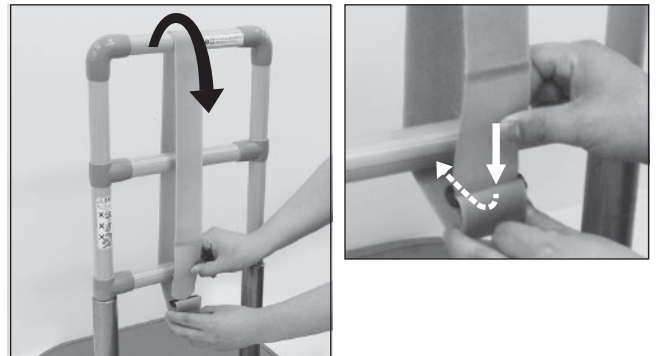


- ③ベルトの先端を上へ引っ張り、手前の面ファスナーに貼り付け、手で強く押さえるように取り付けます(写真1)。ループの位置が下にくるよう調整し、ベルトの内側中央で面ファスナー(メス)同士が向かい合うようにしてください(写真2、3)。

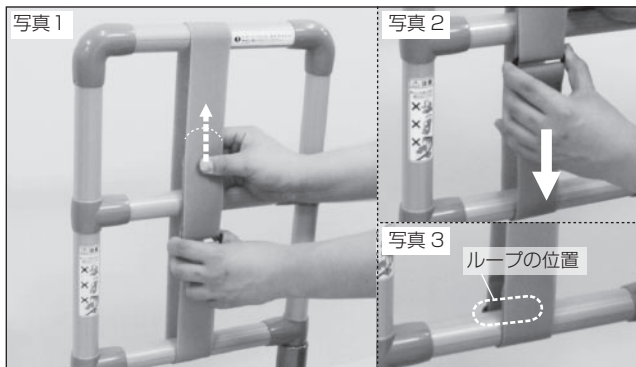

- ④サポートベルトを持ち上げて、上から2本目の横パイプ中央に横ズレ防止用面ファスナー(片面オス)を貼り付けます(写真1)。表側、裏側両方貼り付けてください(写真2)。ベルトの面ファスナー(メス)と横ズレ防止用面ファスナー(片面オス)が止まるよう手でしっかりと押さえつけてください。

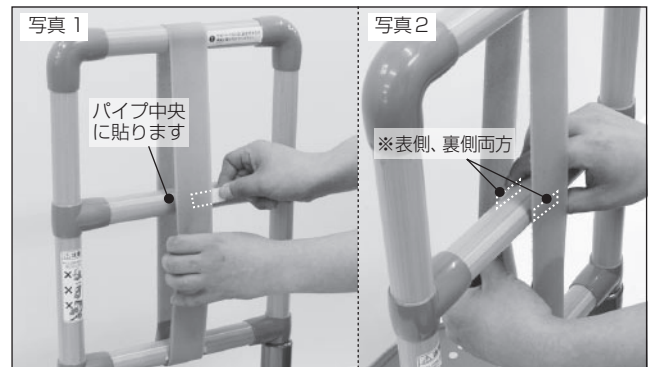

- ⑤中央の位置に固定用面ファスナー(両面オス)をベルト内側の面ファスナー(メス)に取り付けます。両側の面ファスナーが止まるよう、外側から手で強く押さえつけるように取り付けます。必ず上下2箇所共行ってください。

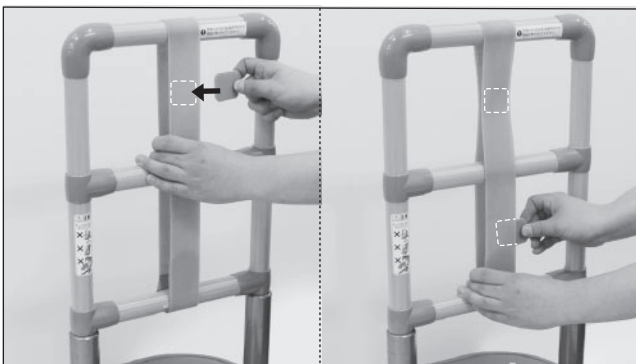

- ⑥サポートベルトが手すりフレームの中央に取り付いているか、面ファスナーが確実に取り付けられているかを確認してサポートベルトの取り付けは完了です。



⚠ 注意



必ず守る

- 面ファスナーは手で強く押さえ、確実に取り付ける。

確実に取り付けしていないとケガにつながるおそれがあります。



- サポートベルトは必ず中央に取り付ける。

中央の位置に取り付けられているとステッカーの左端とサポートベルトの右端が合いますので目印にしてください。中央に取り付けていないとケガにつながるおそれがあります。

