


取扱説明書



伸縮つながるくんカバー CKE-DK

「伸縮つながるくん」の伸縮パイプに貼り付けることにより、素手で直接つかんでも冷たさを感じにくくなっています。

CKE-DK

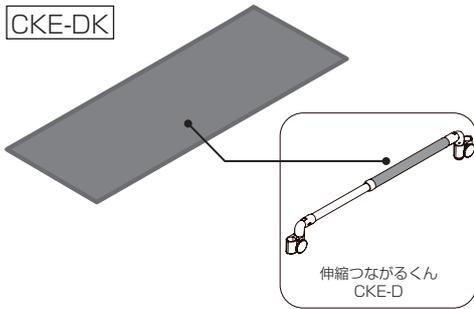

お買い上げありがとうございます

販売店様：この取扱説明書は必ずお客様にご説明の上、お渡しください。
ご利用者様：使用前にこの取扱説明書を必ずお読みになり大切に保管してください。

1. 構成部品

部品図	名称	材質	サイズ	数量
	伸縮つながるくんカバー	発泡ポリエチレン	330 × 122 × 1.8mm	1

！安全に関する表示 ※いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。	禁止	してはいけない内容です。
注意	誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。	必ず守る	必ず守っていただく内容です。

2. 使用上のご注意


⚠ 注意	
禁止	● 「伸縮つながるくん」の伸縮パイプに貼り付けて使用する以外では使わない。
	● 水やお湯に濡れる場所では使用しない。 変質や破損するおそれがあります。
	● 火のそばでは使用しない。 変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。
	● 屋外や直射日光の当たる場所では使用しない。 変質や破損するおそれがあります。
	● お手入れの際に、塩素系洗剤や消毒系薬品などを使用しない。 部品が変色や劣化をするおそれがあります。
必ず守る	● 一般家庭の室内で使用する。

3. カバーの取付方法


取付前のご確認

- 取り付けは納入業者が行ってください。
- 貼付部を拭いてから貼り付けてください。
- 貼付部が汚れていると貼り付かない可能性があります。


伸縮つながるくんカバーの貼付部

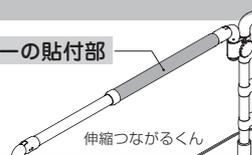


1. カバー裏面についている両面テープのフィルムを半分剥がし、半分に折ってください。

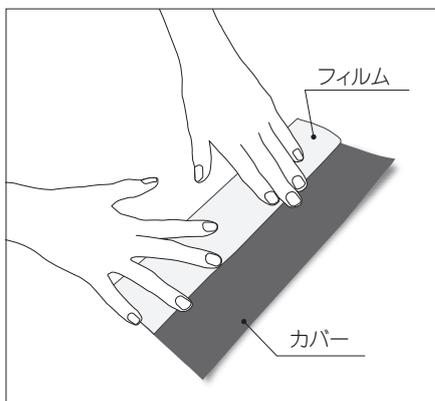


2. パイプとカバーの中心を合わせ、注意喚起ステッカーの下面にまっすぐ貼り付けてください。

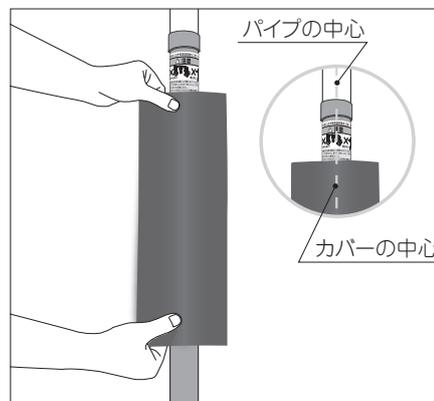

3. 空気が入らないように、カバーの中心から外側に向かって押さえながら貼りこんでください。

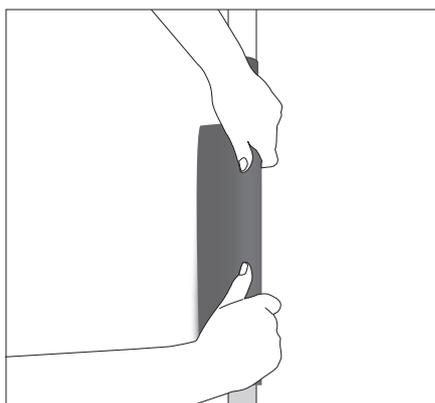

4. 逆側もフィルムを引っ張りながら空気が入らないように貼りこんでください。

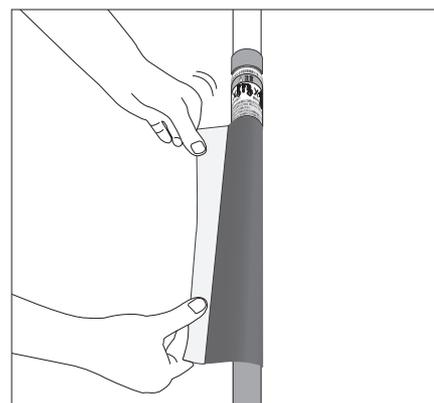

⚠ 注意

- 使用期間によっては剥がした時に糊がパイプに残る場合があります。その際は粘着剤はがしなどをご使用ください。
- カバーは接着力の強い両面テープを使用しているため、メンテナンスの際に伸縮パイプの塗装が剥がれるおそれがありますが、引き続き新しいカバーを取り付けて使用する場合は塗装の必要はありません。
※補修塗装面に貼ると接着がより強力となり、剥がした際に糊が残りやすくなります。
- 長期間貼り付けておくと、カバーを剥がした際に、カバーを使用した部分と使用していない部分で色の差が発生する場合があります。
- カバーは一度剥がすと再び使用できません。
- 使用中に擦り傷等が発生することがありますが、性能には問題ありません。
- 使用中にカバーの剥がれや、異常が確認された場合は納入業者にご相談ください。
- 汚れた際は水拭きしてください。

※製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

矢崎化工株式会社

介護支援ページ
Kaigo-web
<http://www.kaigo-web.info/>

■ 本 社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

■ 北海道支店 福祉介護機器課
〒072-0007 北海道美幌市東6条北 8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■ 仙台支店 福祉介護機器課
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■ 関東支店 福祉介護機器課
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522

■ 東京支店 福祉介護機器課
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007

■ 神奈川支店 福祉介護機器課
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■ 静岡支店 福祉介護機器課
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988

■ 名古屋支店 福祉介護機器課
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■ 大阪支店 福祉介護機器課
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

■ 広島支店 福祉介護機器課
〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■ 九州支店 福祉介護機器課
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

16112304

DW-230-03