



移乗介助



排泄介助



入浴介助



脱衣介助



介助負担軽減で“快護介適”



訓練補助



小児入浴



環境改善



人材育成



介助負担軽減




オーダー対応

ヤザキは、「人にやさしい福祉用具」をコンセプトとし、
用具に人を合わせるのではなく、人に用具を合わせた、お一人お一人が安全で安心できる
人にやさしいオーダー福祉用具をお届けしています。

福祉・医療施設においては、ご利用者様と介護職員の皆様はもちろん、
施設的环境にも合わせた福祉用具が求められます。

当社は、多くの事例で培った経験を基に、これからもご利用者様の安全と自立、
そして、介護職員の介助負担軽減をご提案してまいります。

施設内の様々なお悩みに対応します。

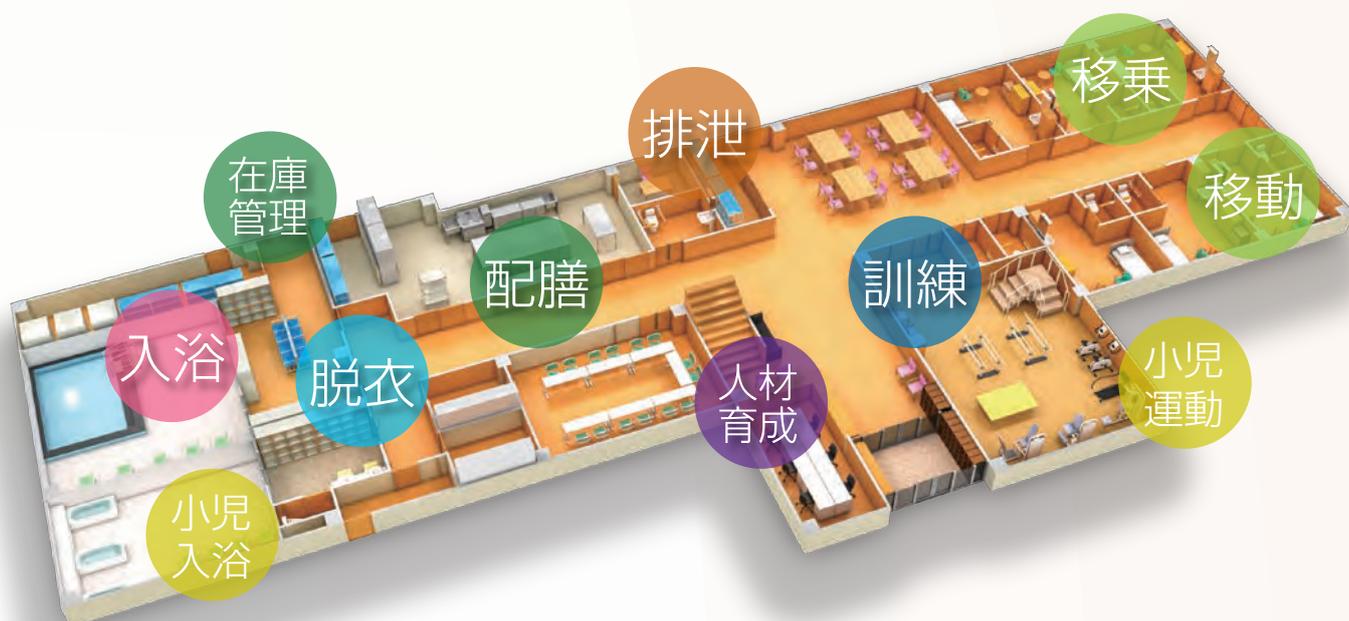

<h2 style="color: #76b82a;">移乗・移動</h2> <p>たちあつぷ ひざたち C / たちあつぷ ひざたち C 回転式 / たちあつぷ II / たちあつぷ II でらくす / たちあつぷ II ひざたち</p>	<h1 style="background-color: #76b82a; color: white; padding: 5px;">4</h1>	<h2 style="color: #34495e;">訓練</h2> <p>階段昇降訓練機 (手すり付ステップ台) / 歩行動作訓練機 (平行棒) / リハビリ訓練台 / たちあつぷ</p>	<h1 style="background-color: #34495e; color: white; padding: 5px;">24</h1>
<h2 style="color: #f1c40f;">排泄</h2> <p>シャワーキャリー フロントレストタイプ / 可動式手すり 前受けタイプ / 前受けテーブル / 可動式手すり / トイレ用たちあつぷ II / 背もたれ</p>	<h1 style="background-color: #f1c40f; color: white; padding: 5px;">10</h1>	<h2 style="color: #f1c40f;">障がい・小児</h2> <p>ゆ〜楽さん 小児用 / スイングフレーム / トイレ移乗台 / トイレ移乗ステージ / シャワーキャリー フロントレストタイプ</p>	<h1 style="background-color: #f1c40f; color: white; padding: 5px;">25</h1>
<h2 style="color: #e91e63;">入浴</h2> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">施設クローズアップ...13 ページ</p> <p>たちあつぷ II 浴室用 / シャワーいす / 入浴台 / 浴そう内たちあつぷ / 浴そう内すのこ / 浴そう内いす / 浴そう用手すり / シャワーキャリー / 可動式手すり / 浴室手すり / 浴室オーダー手すり / 手すり付ステップ台</p>	<h1 style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;">12</h1>	<h2 style="color: #76b82a;">施設内環境</h2> <p>移動棚 / おむつ交換台車 / 汚物処理台車 / 平台車 (ミニポリトラ) / キャリーワゴン / リネン台車 / 配膳ワゴン / リネン棚 / 長靴ラック / ゴミ分別台車 / 各種管理台車・什器</p>	<h1 style="background-color: #76b82a; color: white; padding: 5px;">29</h1>
<h2 style="color: #00bcd4;">脱衣</h2> <p>たちあつぷ II 浴室用 / 立ち上がり補助手すり / 湯上がりベンチ / たちあつぷ ひざたち C / 脱衣台 / ストレッチャー / 低床介助キャリー</p>	<h1 style="background-color: #00bcd4; color: white; padding: 5px;">21</h1>	<h2 style="color: #9c27b0;">人材育成</h2> <p>ユア・サポーター 個別研修会 / 福祉用具出張展示会</p>	<h1 style="background-color: #9c27b0; color: white; padding: 5px;">35</h1>

人材確保等支援助成金 (介護福祉機器助成コース) について

2020(令和2)年 4月現在

介護事業主が介護福祉機器を導入し、労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成されます。
2つの助成があります。 ※詳しくは各都道府県労働局にお問い合わせください。

機器導入助成

導入費用の 25% (上限 150 万円)


介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の 25% (上限 150 万円) が支給されます。

目標達成助成

導入費用の 20% (上限 150 万円)

介護福祉機器の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成として介護福祉機器の導入費用の 20% (生産性要件を満たした場合は 35%) (上限 150 万円) が支給されます。

■助成金支給までの流れ

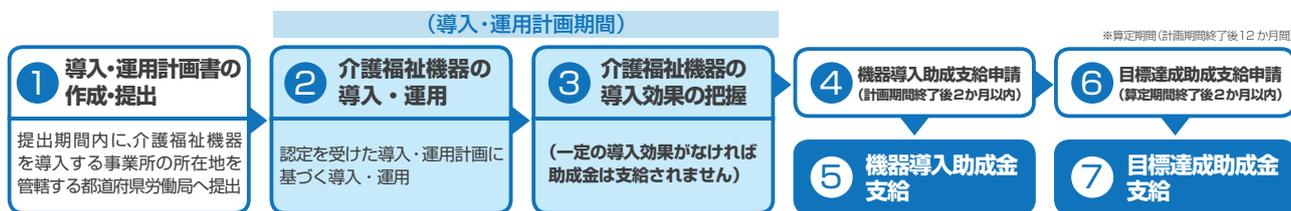

■助成金の対象となる介護福祉機器

介護労働者が使用することにより直接的に身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善が見込まれるなど、所定の要件を満たすもので 1品 10万円以上であることが必要です。

1 移動・昇降用リフト

※立位補助機、非装着型移乗介助機器を含む。人の移動または移乗に使用するものに限る。

2 装着型移乗介助機器

3 体位変換支援機器

※従来のエアマットに加え、体位変換機能を持つベッドを含む。

4 特殊浴槽

※移動・昇降用リフトと一体化しているもの、移動・昇降用リフトが取り付け可能なものまたは、側面が開閉可能なもの等。

人材確保等支援助成金

対象製品

弊社製品の対象製品には左記マークがついています。

移乗・移動

■腰痛対策


「介護職員の腰痛対策」でお悩みではありませんか？



介護や看護に従事する人にとって腰痛は大きな悩みのひとつです。これは人手不足の一因にもなり、施設の経営上においても重大なリスクだと言えるでしょう。腰痛対策をはじめ、身体的負担をなるべく軽減して、ストレスがより少ない、長く働くことができる職場づくりが大切です。

腰痛発生例

1 前方からの抱え上げで腰痛発生

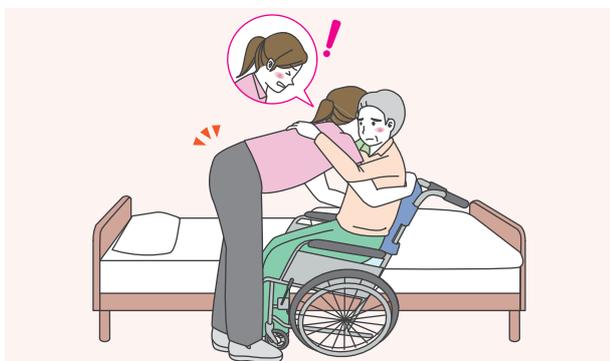

2 体重が重い方の移乗で腰痛発生



解決ポイント

- 1 **介護姿勢の改善**
前かがみや腰ひねりをしない 長時間、同じ姿勢をとらない
- 2 **福祉用具の導入・活用**
福祉用具の導入により、**持ち上げ動作を軽減**する
- 3 **十分な介護スペースの確保**
狭いスペースでは無理な姿勢をとってしまいやすい

ポイント

**単独ではなく
組み合わせた対策を考える**

抱え上げない介助

福祉用具の活用や利用者の残存機能を生かし、できるだけ抱え上げない介助をお勧めします。手すりやリフト、スライディングボードなどを活用して、移乗をサポートします。



人力のみで抱え上げることを避ける

移乗・移動

■たちあっぷ®ひざたちち®C

たちあっぷ®ひざたちち®C シリーズ

人材確保等支援助成金 対象製品

車いすからトイレやベッドへの移乗時に、方向転換が安全にできて介助者の負担も減らしたい…。

車いすから便器などへの移乗の際に、利用者に安心して移乗をさせてあげたい。また介助者の抱え上げの負担を削減し、できれば1人で介助を行いたい…。



解決!!

「たちあっぷ®ひざたちち®C」の設置で解決しました。

テーブルや手すりで体を支え、さらにクッション付の膝当てにより、利用者が前に倒れたり、膝折れする心配もなく、安心して移乗させることができます。また、抱え上げ介助が減り介助者の負担も軽減されます。



CKL-02

車いすから便器やベッドへの移乗時は、利用者にとっては立ち上がる際にふらつくなどの不安があり、また介助者にとっても負担が大きい場面です。「たちあっぷ ひざたちち C 回転式」は大きなテーブルと膝当てで利用者の体を支え、ベースに乗ったまま回転できるため、脚・膝が無理な体勢になることなく方向転換できます。



CKL-02



CKL-02TB



規格品

たちあっぷ ひざたちち C

CKL-01

幅 63.5cm×奥行 63.5cm×高さ 60・65・70cm

134,000 円 (非課税)



規格品

たちあっぷ ひざたちち C 回転式

CKL-02

幅 60cm×奥行 62cm×高さ 60・65・70cm

267,000 円 (非課税)



セット品

たちあっぷ ひざたちち C 回転式

CKL-02TA 手すりAセット

幅 60cm×奥行 62cm×高さ 60・65・70 (手すり+15) cm

300,000 円 (非課税)



セット品

たちあっぷ ひざたちち C 回転式

CKL-02TB 手すりBセット

幅 60cm×奥行 62cm×高さ 60・65・70cm

300,000 円 (非課税)



たちあっぷ ひざたちち C 手すり



ハイタイプ

CKL-TA

36,300 円 (税抜33,000 円)



ロータイプ

CKL-TB

36,300 円 (税抜33,000 円)

移乗・移動


■たちあっぷ®ひざたちっC 回転式

介助動作例 車いす→便器 たちあっぷ®ひざたちっC 回転式

人材確保等支援助成金 対象製品

「たちあっぷ ひざたちっ C 回転式」を利用した、車いすから便器への移乗介助手順の一例です。
※実際の動作は利用者や利用状況に合わせてご検討ください。

移乗手順動画▶

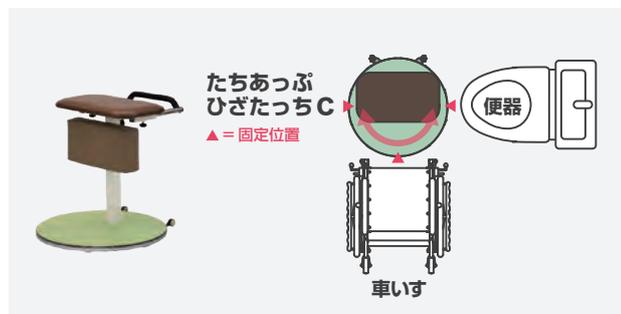

便器と車いすの正面に固定位置がくるように設置します。
浅座りをして、膝が膝当てに触れる位置がベストです。
高さは利用者の身体状況に合わせて調整してください。



1 移乗の開始です。利用者に端座位をとらせ、ベースに両足を乗せてもらいます。



2 利用者に手すり、またはテーブルを持たせ、前傾姿勢をとってもらい、介助者が支えながら車いすから立ち上がってもらいます。



3 介助者はテーブル背面にある解除レバーを引いて回転ロックを解除します。



4 介助者は利用者がしっかりベースに乗っていることを確認し、利用者を支えながら、そのまま本体を便器方向に回転させます。



5 便器の位置で回転が自動でロックされるまでゆっくりと回してください。



6 回転のロックが掛かったことを確認して、後ろの介助者が支えながら便座にゆっくりと腰をおろしてもらいます。



7 移乗の完了です。

移乗・移動

■たちあっぷ®ひざたちち®C 回転式

介助動作例 ポータブルトイレ→ベッド たちあっぷ®ひざたちち®C 回転式

人材確保等支援助成金 対象製品

「たちあっぷひざたちちC回転式」を利用した、ポータブルトイレからベッドへの移乗介助手順の一例です。
※実際の動作は利用者や利用状況に合わせてご検討ください。

移乗手順動画▶



ベッドと車いすの正面に固定位置がくるように設置します。
浅座りをして、膝が膝当てに触れる位置がベストです。
高さは利用者の身体状況に合わせて調整してください。



移乗の開始です。利用者に端座位をとらせ、ベースに両足を乗せてもらいます。



利用者に手すり、またはテーブルを持たせ、前傾姿勢をとってもらいます。



介助者が支えながらポータブルトイレから立ち上がってもらい、テーブル背面にある解除レバーを引いて回転ロックを解除します。



介助者は利用者がしっかりベースに乗っていることを確認し、利用者を支えながら、そのまま本体をベッド方向に回転させます。



ベッドの位置で回転が自動でロックされるまでゆっくりと回してください。



回転のロックが掛かったことを確認して、介助者が支えながらベッドにゆっくりと腰をおろしてもらいます。



移乗の完了です。

移乗・移動

■たちあっぷ® II

たちあっぷ® II

人材確保等支援助成金 対象製品

車いすからベッドへの移乗時に、
利用者の不安を少なくしたい。
また前方介助による介助者の
腰痛対策も考えたい…。

立ち上げられる利用者もいるが、前かがみになると前方に倒れてしまう不安も…。前方から抱きかかえて介助をしているが腰に負担が大きく、腰痛になる職員も多く、対策が急務である。



解決!!

膝当て付きの「たちあっぷ® II」
の設置で解決しました。

利用者にとっては、大きな手すりと膝当てで前方への転倒リスクも無く、安心して移乗することができます。介助者は腰への負担の大きい前方介助ではなく、後ろから腰を支えるだけの負担の少ない介助に改善できます。

■ベッドサイドなどでの立ち上がり・移乗が不安な方に安定した立ち上がりをサポートします。

ベースサイズ
66×66
cm



規格品

たちあっぷ II でらっくす

CKI-21

幅 66cm × 奥行 66cm × 高さ 73・78・83・88cm

105,050 円 (税抜 95,500 円)

- 前方の手すりですり立ち上がりやすい前傾姿勢を促します。
- 立ち上がることでリハビリや残存機能の維持につながります。
- L型形状の手すりですり後方介助がしやすくなります。

ベースサイズ
66×66
cm



規格品

たちあっぷ II ひざたちち

CKI-22

幅 66cm × 奥行 66cm × 高さ 73・78・83・88cm

134,200 円 (税抜 122,000 円)

- 膝当てで膝を支えて、前方への転倒の不安を減らします。
- 幅広い手すりですり体をしっかり支えることができます。
- L型形状の手すりですり後方介助がしやすくなります。

●たちあっぷ II を設置することにより、介助者は後方から支える介助で済み、腰の負担が少なくなります。



前方介助は負担が大きく、ケガのリスクも高くなります。



■居室やベッドサイドでの立ち上がりや、歩き出しをサポートします。

ベースサイズ
66×66
cm



規格品

たちあっぷ II

CKA-22

幅 66cm × 奥行 66cm × 高さ 70・75・80・85cm

84,480 円 (税抜 76,800 円)

- スタンダードな手すりですり様々な場所をご利用いただけます。
- たちあっぷ (CKA-01-1/02-1/11/12) のフレームと共用です。

ベースサイズ
66×66
cm



規格品

たちあっぷ II

CKA-23

幅 66cm × 奥行 66cm × 高さ 70・75・80・85cm

98,890 円 (税抜 89,900 円)

- ベッドと平行な手すりですり立ち上がり、垂直な手すりですり歩き出しをサポートします。
- たちあっぷ (CKA-13) のフレームと共用です。

ベースサイズ
66×66
cm



規格品

たちあっぷ II

CKA-24

幅 66cm × 奥行 66cm × 高さ 70・75・80・85cm

86,350 円 (税抜 78,500 円)

- 幅 46cm の手すりですり体を支えやすくなっています。
- コンパクトなベースですり様々な場所をご利用いただけます。


移乗・移動

■たちあっぷ®Ⅱ ひざたち®

介助動作例 たちあっぷ®Ⅱ ひざたち® スライディングボード併用 人材確保等支援助成金 対象製品



「たちあっぷⅡひざたち」を利用した、ベッドから車いすへの移乗介助手順の一例です。ベッドと車いすの位置関係は、右図のように三角形ができる位置がベストです。移乗する側の高さを少し低くするとスムーズにできます。スライディングボードを併用するとさらに移乗しやすくなります。※実際の動作は利用者や利用状況に合わせてご確認ください。

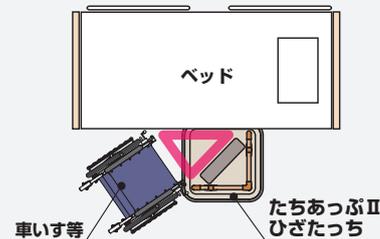

1 移乗の開始です。介助者は利用者の体を支え、手すりを掴んでもらいます。



2 介助者は利用者のお尻を支えながらスライディングボードを差し込みます。この時、利用者の上半身を左前方に軽く倒しながら行くと、差し込みやすくなります。



3 利用者の体を起こし、スライディングボードに坐骨をのせながら、体を右前方に傾け、車いすのアームレストを掴んでもらいます。



4 介助者は利用者へ声を掛けながら骨盤を両手でしっかり支え、車いすまでスライドさせます。



5 利用者の腰が車いすに乗ったら、利用者へ体を左前方に傾けてもらい、腰を押し、しっかり車いすの奥まで乗り移ってもらいます。前に倒れる心配もなく、膝当てがあるため膝ずれもなく安心です。



6 しっかり移乗できたことを確認して、利用者の手を手すりから離してください。そのまま体を支えながら、スライディングボードは上に引き抜くように外します。前方から抱え上げない介助方法で移乗完了です。

排泄

■前受けを利用した排便促進 / ■シャワーキャリー フロントレストタイプ / ■可動式手すり / ■前受けテーブル



「排泄時の自立・介助」でお悩みではありませんか？



便座にうまく座れない方、座位が安定しない方、腹筋の衰えて排泄に時間がかかってしまう方など排泄介助を必要とする方は多くいます。1人介助で行う場合に移乗や脱衣の際に不安定になりやすいことなど、長時間の見守りでお困りではありませんか？

トイレで排泄する行為は大切です。排泄介助をサポートする福祉用具を活用して、快適なトイレ環境の整備を行ってください。

前受けを利用した排便促進

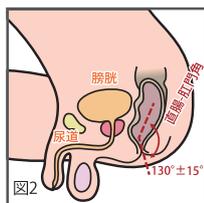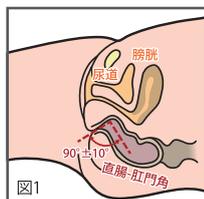

前受けテーブルを利用し、前屈姿勢をとることによって重心が下肢にかかり、腹圧がかけやすく、いきみやすくなります。また、臀部の筋肉や皮膚が引っ張られ、肛門の周囲が突出し、便が出やすくなります。

さらに前屈姿勢により直腸と肛門の角度が変わることによって便が出やすくなります。通常、寝ている時や立っている時のように身体を伸ばしている姿勢では直腸と肛門の角度が鋭角(図1)になり、直腸に便がたまっていても容易に出ない仕組みになっています。逆にトイレにしゃがんだ時のように身体を折り曲げる姿勢ではこの角度が鈍角(図2)になり便が出やすくなります。

ヤザキの前受けシリーズ



規格品

シャワーキャリー フロントレストタイプ

CAK-600
幅49cm×奥行91cm×高さ91~97cm
235,400円(税抜214,000円)



規格品

可動式手すり 前受けタイプ

CFA-8
手すり長さ65cm
※
40,150円(税抜36,500円)



前受けテーブル

幅58cm×奥行56cm×高さ62cm

オーダー例
参考価格 35,200円~
(税抜32,000円~)

■ポータブルトイレ設置例



●参考サイズ
幅69cm×奥行56cm×高さ57cm

オーダー例
参考価格 41,800円~
(税抜38,000円~)

オーダー事例

※参考価格に取付施工費・送料は含まれておりません。
具体的な価格は販売店にお問い合わせください。



排泄時に体が安定しない、排泄に時間がかかってしまい、ずっと見守りをしなければならないなどの悩みを解決するために前受けテーブルを製作しました。

適切な前傾姿勢が取れるので体を安定させ、腹圧をかけることで排泄の促進につながります。

便座が高すぎるという利用者のために、はねあげ式の足置き台を付けることもできます。足が床につくことでより体が安定します。

●参考サイズ
幅55cm×奥行57cm×高さ63cm

オーダー例
参考価格 47,300円~
(税抜43,000円~)

排泄

■可動式手すり / ■トイレ用たちあっぷ® II / ■背もたれ

お悩みポイント：座位が安定しない。

可動式手すり



規格品

可動式手すりはね上げデラックスタイプ

CFA-1B

手すり長さ 80cm

54,450 円 ※ (税抜 49,500 円)

手すりを使用するときだけ下げて、座位保持や立ち上がりにご利用いただけます。介助の邪魔になる場合・手すりが不要の場合は、はね上げて収納することができます。



規格品

可動式手すりはね上げタイプ

CFA-1A

手すり長さ 80cm 長さカットして使用可能

42,900 円 ※ (税抜 39,000 円)

トイレ用たちあっぷ® II



寸胴型
便器用



規格品

トイレ用たちあっぷ II

CKJ-02

幅 53.5~68.5cm × 奥行 47cm × 高さ 58~68cm

84,480 円 (税抜 76,800 円)

工事不要でセットでき、立ち上がり・座位の保持をサポートするトイレ用手すりです。介助スペースのあるトイレなどは壁の手すりが遠くなり、力が入りにくく立ち上がりが困難なケースもあります。便器のそばに手すりがあることによって、プッシュアップでの立ち上がりも可能となります。幅・高さ調整が可能で利用者、使用環境に合わせられます。

標準型
便器用



規格品

トイレ用たちあっぷ II

CKJ-01

幅 53.5~68.5cm × 奥行 47cm × 高さ 58~68cm

74,800 円 (税抜 68,000 円)

お悩みポイント：体がのけぞってしまう。

背もたれ

手すりがあっても座位の保持が難しく、後ろにのけぞってしまう利用者にお使いいただけます。背もたれの大きさ、壁からの出幅等もオーダーでご要望に合わせて製作できます。



●参考サイズ

幅 50cm × 奥行 40cm × 高さ 80cm

オーダー例
参考価格 55,000 円~
(税抜 50,000 円~)



●参考サイズ

幅 49cm × 奥行 47cm × 高さ 82cm

オーダー例
参考価格 62,370 円~
(税抜 56,700 円~)

入浴

■たちあっぷ®II 浴室用

たちあっぷ®II 浴室用

入浴時における手すりがない場所での介助負担を減らしたい…。

浴室での立ち上がりや浴そうへの移乗の際に、利用者がつかまる手すり等もなく、介助にとっても苦勞をしています。浴室の床も滑りやすく転倒などの危険もあり入浴が不安です…。



解決!!

「たちあっぷ®II 浴室用」の設置で解決しました。

浴室での立ち上がりや移乗をサポートする手すりです。利用者がつかまる場所がないところに**工事不要**で置くだけで手すりが構築できます。利用者の不安解消に、また**自立への意欲向上**につながりますし、介助者の**抱え上げ介助の負担も軽減**できます。



規格品

規格品

たちあっぷ®II 浴室用

CKA-Y23

148,280 円 (税抜 134,800 円)

幅 66cm × 奥行 66cm × 高さ 70・75・80・85cm

CKA-Y24

120,780 円 (税抜 109,800 円)

立ち上がり
歩行補助

●立ち上がり



●入浴補助・立ち上がり補助



●つたい歩き(歩行補助)




移乗


1 手すりをつかみます



2 前方に体重を移動して立ち上がります

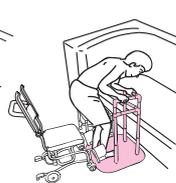

3 移動先にゆっくり腰をおろします

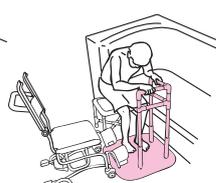

設置事例

個浴、その他



特殊浴そう



※機械浴そう・シャワーキャリーは、使用イメージのため他社製品を使用しています。

利用者様が安心して、介助の負担も軽くなる。

たちあっぷⅡ[®]浴室用



愛知県北名古屋市
老人保健施設

洋洋園

老人保険施設 洋洋園

「利用者の皆様へ寄り添った優しく暖かい施設」をモットーに、職員はそれぞれプロとして日々研鑽し、より良質なサービスをご提供するように努めています。

■ より安心を求めて改善検討のスタート

日々の介助の中で多くの介護スタッフが入浴介助に負担を感じているという現状がありました。そんな中「手すりももっと持ちやすい位置にあると助かります。」という意見が多く寄せられたことから改善の検討が始まりました。

浴そうへの移乗時に、手すりは設置してあるものの持ちにくい位置にあるため、介護スタッフから「利用者様にどこを持ってもらえばいいの？」など、疑問の声が上がりました。

既設の手すり位置では安定感が得られず、通常1人介助の方でもやむを得ず抱え上げる介助が必要となり、2人体制で全介助を行うケースがあるということや、手すりを持たずに介護スタッフに介助を依存してしまい協力動作が得られにくい利用者様が見えるなど介助量が増えてきていました。



『持ちやすい位置に手すりが無い→介助してもらわなければならない→申し訳ない→変に力が入ってしまう』という悪循環が生まれ、『自分で動作をしない→介助者に依存する』という実態もありました。

介護スタッフが少ない介助で行い、利用者様の残存能力を最大限に活かすためにも、適切な高さで位置に手すりを設置することがとても重要であることが分かりましたが、工事費用のこともあり、すぐに解決することができませんでした。

■ 「たちあっぷⅡ 浴室用」と出会う

数年前よりトイレにおいて矢崎化工製の「たちあっぷ」を使用していた動作改善を行った経緯があり、矢崎化工様に浴室でも設置できる手すりについて相談したところ、ステンレス製で水まわりでも使える置くだけの『たちあっぷⅡ 浴室用』を紹介していただき、さっそく1カ月間程デモ機をお借りすることになりました。当然、設置工事の必要もなく「置くだけ」で手すりが構築できたことが何よりも有効で、利用者様にとって一番持ちやすい位置にすぐに手すりを準備できました。



▲置くだけで手すりが構築できる「たちあっぷⅡ 浴室用」

■ デモ機で試すことが大事

介護スタッフも利用者様もすぐにはデモ機に使い慣れませんでした。リハビリスタッフに介助方法を説明してもらってからは全員で積極的に使用するよう努め、L字型タイプとI字型タイプの両方を使用させていただきました。最初はI字型が良いと思ったのですが何度も試した結果、L字型の方が持つ場所が多いところ、また、たちあっぷⅡと浴そうとの間にスタッフが介助に入りやすい隙間ができることなどを評価させていただいた結果、L字型タイプ(CKA-Y23)の導入を決めました。

長い時間デモ機をお借りすることができたことで介助方法もいろいろ試すことができました。利用者様も使い慣れてきて試用の後半はたちあっぷⅡがあるのが当たり前のような感覚になっていったことも導入の決め手となりました。



▲デモ機でいろいろ試して決めた「L字型タイプ」

■ 利用者様も安心でき、介護スタッフの負担も軽減

利用者様からは「持つところが増えて安心。動きやすくなったよ。」「今まで介助してもらおうのが申し訳なかったけど、自分でできるようになったよ。」という声が聞かれました。



実際、安全面の向上が図られたことや、何より利用者様の安心感が得られたことを職員皆とても喜んでます。動作が安定して利用者様の協力動作も増え、介護スタッフの負担もとても軽くなりました。

◀洋洋園の介護スタッフ安田さん(左)とリハビリスタッフ浅井さん



●老人保健施設 洋洋園
事務長
社会福祉士
古矢 圭一 氏



●老人保健施設 洋洋園
介護主任
介護福祉士
安田 隆之 氏



●老人保健施設 洋洋園
リハビリテーション部主任
理学療法士
浅井 勝敏 氏

入浴

■座位入浴 / ■シャワーいす / ■入浴台

座位入浴

またぎ動作が不安定ではありませんか？




おすすめの入浴法
座位入浴



浴そうをまたぐ際は、立位でまたぐことが一般的です。しかし、立位でまたぐ場合は片足立ちになるため不安定になりやすく、また介助する際も労力が必要です。そこでシャワーいすや入浴台を利用し、座った状態で入浴する座位入浴をおすすめします。支える面が広がるため、より安定した浴そうの出入りが可能となります。

座位入浴はより安全に入浴する方法の1つ

座位入浴のポイント

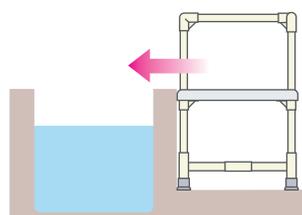

- 座面の高さを浴そう縁の高さに合わせる。
- フラットな座面で移乗しやすくする。

ヤザキのシャワーいす / 入浴台は座位入浴に最適！

やさしさポイント！

サイズオーダー可能



利用者や施設の状況に合わせてミリ単位でのオーダーを承ります。幅・奥行・高さの調整、手すりの有無など用途に合わせて最適なシャワーいすをご利用いただけます。

フラット座面でらくらく移乗



座面がフラットなので移乗が楽にできます。介助者の負担が軽減され、利用者の残存機能を生かすことができます。

ターンテーブル仕様も選択可能



方向転換が容易になります。介助者の方は足を持ち上げて浴そう内に向けていくだけなので、介助が楽になります。

アジャスター仕様も選択可能



アジャスター付を選べば、ガタつきの防止と浴そうの高さにぴったりと合わせることができるので、安定感があります。



シャワーいす F型

CAA-0201 アジャスターなし
幅 44cm × 奥行 44cm × 高さ 40cm
17,270 円 (税抜 15,700 円)

オーダー事例



浴そうの縁が厚く、浴そうのまたぎが大変なので、ターンテーブル付の入浴台で浴そうに入りやすくなりました。

●参考サイズ
幅 49cm × 奥行 40cm × 高さ 72cm
(座面高さ 47cm)

オーダー例
参考価格 **65,340 円**~
(税抜 59,400 円~)



浴そうの両サイドに固定金具付の入浴台を設置しました。左右どちらからも入浴でき、利用者ごとに浴そうへのアプローチ方向が違う場合でも移動の手間が省けます。


●参考サイズ (1台)
幅 58cm × 奥行 40cm × 高さ 50cm

オーダー例
参考価格 **50,270 円**~
(税抜 45,700 円~) ※1台

入浴


■浴そう内たちあっぷ®

浴そう内たちあっぷ®

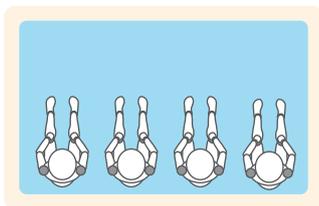

入り口

浴そう内たちあっぷ導入

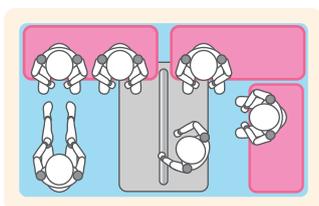

入り口

お悩み

- 入り口に利用者がとどまってしまう。
- 入浴時の姿勢が安定しない

解決！

- お風呂を広く使うことができ、入浴時の姿勢も安定します。

※浴そう内いすを併用するとさらに安心です。

浴そう内での立ち上がり、歩行補助・姿勢の保持にご利用いただける置くだけの手すりです。

毎日利用する浴室なので大掛かりな工事が行えない。また防水層を傷つけてしまう工事はできない。というお悩みにお応えする工事不要の手すりです、浴そう内・洗い場の手すりとしてご利用いただけます。

ご利用者自身で姿勢保持・歩行動作が行えるので、介助者の負担軽減にお役立てください。

サイズ
オーダー
可能



使用している浴そうの形状・サイズに合わせて製作も可能です。

●参考サイズ
幅 100cm × 奥行 90cm × 高さ 55cm

オーダー例
参考価格 **341,000円**~
(税抜 310,000円~)

手すり長さ 90cm



浴そう内たちあっぷ

CKC-01

幅 120cm × 奥行 90cm × 高さ 70・75・80cm

319,000円 (税抜 290,000円)

手すり長さ 120cm



浴そう内たちあっぷ

CKC-02

幅 150cm × 奥行 90cm × 高さ 70・75・80cm

374,000円 (税抜 340,000円)

手すり長さ 150cm



浴そう内たちあっぷ

CKC-03

幅 180cm × 奥行 90cm × 高さ 70・75・80cm

451,000円 (税抜 410,000円)

設置事例



CKC-01

大型浴そう内での動線確保にご利用いただけます



CKC-01



CKC-03

様々な浴そうに対応します



before



after

CKC-02

洗い場の動線確保に使用

入浴

■浴そう内すのこ / ■浴そう内いす

浴そう内すのこ / 浴そう内いす

浴そうが深すぎませんか？




お悩み

- 浴そうが深くて足がとどかない
- 浴そうが深くてこわい
- 入浴時の姿勢が安定しない

浴そう内部が深すぎると足をとどかせようとして前かがみになりがちです。前かがみになると重心のバランスを崩し、転倒のリスクや、さらにはおぼれてしまうおそれも考えられます。また脚がうまく上げられない方にとっては浴そうの出入りはとても困難なものです。

▶ 浴そう内すのこ / 浴そう内いすの導入

導入のポイント

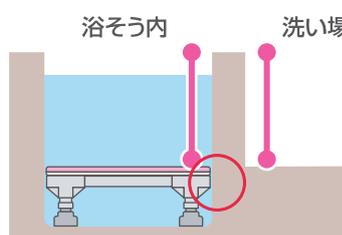

- 洗い場と浴そう内の高さを合わせる。
※浸かれる範囲を確認。浅すぎるのも問題。45cmで胸より下の位置。
- 縁との間に隙間ができないようにする。

ヤザキの浴そう内すのこは安全な入浴をサポートします

やさしさポイント！

サイズオーダー可能



利用者や施設の状況に合わせてミリ単位でのオーダーを承ります。浴そうに合わせてピッタリに製作できるので、隙間も少なく安全に入浴できるようになります。

サビに強いフレーム



フレームはプラスチック被覆ステンレスパイプを使用し、サビに強く安心です。



自重で沈みます



自重で沈むため、吸盤がつかないタイル貼りの浴そうや滑り止めのついた浴そうでも使用可能です。

アジャスター調整機能



高さ調整が可能です。水勾配への対応ができます。※製作高さによって調整範囲は異なります。

浴そう内すのこ / 浴そう内いす

幅 56cm × 奥行 45cm × 高さ 10cm

オーダー例
参考価格 **50,490** 円～
(税抜 45,900 円～)

オーダー事例



変形の浴そうにもぴったりフィット。3分割にしてお手入れもしやすくしています。

●参考サイズ
幅 60cm × 奥行 90cm × 高さ 12cm

オーダー例
参考価格 **121,000** 円～
(税抜 110,000 円～)



特殊浴そう（機械浴そう）にも合わせて製作可能です。大型ですので任意のサイズで分割します。


●参考サイズ
幅 58cm × 奥行 124cm × 高さ 10cm

オーダー例
参考価格 **154,000** 円～
(税抜 140,000 円～)

入浴


■浴そう内いす / ■浴そう内すのこ

浴そう内いす / 浴そう内すのこ

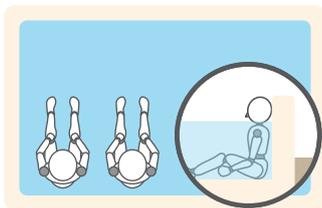

入り口

浴そう内いす / 浴そう内すのこ導入

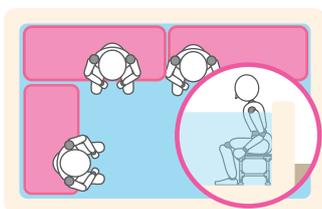

入り口

お悩み

- 浴そうが深くて足がとどかない
- 浴そうが深くてこわい
- 入浴時の姿勢が安定しない

解決!

- 足がとどくようになって安心
- 入浴時の姿勢が安定
- 立ち上がりもしやすくなった

「浴そうが深すぎてこわい」、「浮力があって姿勢が安定しない」、「沈み込む不安がある」等の利用者の不安を浴そう内いす・浴そう内すのこで解消します。また、浴そう入口付近に利用者がとどまってしまう、せっかくの大型浴そうだが、一度に入浴できる人数が少なくなってしまうという問題も改善します。



●参考サイズ
幅(165・143)cm × 奥行30cm × 高さ20cm

使用している浴そうの形状・サイズに合わせて製作可能です。

オーダー例
参考価格 **275,000**円～
(税抜250,000円～)

オーダー事例


お悩みポイント：浴そうが深く、こわくて入浴できない。手すりを工事で設置できない。



●参考サイズ
幅150cm × 奥行30cm × 高さ30cm
(座面高さ15cm)

浴そう内いすに手すりをつけたことにより座位が安定します。

オーダー例
参考価格 **148,500**円～
(税抜135,000円～)

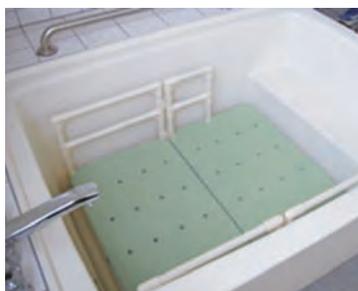

●参考サイズ
幅100cm × 奥行130cm × 高さ45cm
(座面高さ15cm)

浴そう全体の底上げのため、浴そう内すのこを製作しました。座位が安定しない利用者のために浴そう内すのこから手すりを立ち上げました。移動の補助にもご利用いただけます。

オーダー例
参考価格 **231,000**円～
(税抜210,000円～)

お悩みポイント：浴そうが深く、入りにくい



●参考サイズ
幅120cm × 奥行100cm × 高さ(11・35)cm

浴そう全体の底上げを行い、また入り口付近はベンチ式にして半身浴ができるように2段式の浴そう内すのこを設置しました。

オーダー例
参考価格 **327,030**円～
(税抜297,300円～)

お悩みポイント：転倒、つまづくおそれがある。



●参考サイズ
幅50cm × 奥行40cm × 高さ37cm

個浴では、またぎ入浴ではなくシャワーいすを使った座位入浴を行うことで転倒やつまずきの予防につながりました。ターンテーブル付のシャワーいすを設置することで褥瘡(じょくそう)の防止にもなりました。

オーダー例
参考価格 **52,800**円～
(税抜48,000円～)

入浴

■入浴台 / ■浴そう用手すり / ■浴そう内いす / ■オーダーシャワーキャリー

オーダー事例

お悩みポイント：工事で手すりが付けられない。 浴そう縁が広すぎてまたぎが大変。



入浴台

入浴台に手すりを付けることによって適切な位置に手すりを構築できました。
浴そうをまたぐように、長手両サイドから座位入浴ができるように製作しました。

●参考サイズ
幅 110cm × 奥行 45cm × 高さ 75cm
(座面高さ 50cm)

オーダー例
参考価格 **64,350** 円～
(税抜 58,500 円～)

お悩みポイント：工事で手すりが付けられない。 立ち上がりの介助が大変。



浴そう用手すり

座位が安定しない方や立ち上がりの補助が必要な方に安心して入浴いただける浴そう用手すりになります。
浴そう縁のまたぎから座位入浴、立ち上がりまでを一体でサポートします。
工事不要で取り外しも可能です。

●参考サイズ
幅 80cm × 奥行 15cm × 高さ 25cm

オーダー例
参考価格 **78,540** 円～
(税抜 71,400 円～)

お悩みポイント：浴そうのまたぎが大変。 手すりが付けられず、入浴中不安定。



グリップ付浴そう内いす / シャワーキャリー L 型

L 形状のシャワーキャリーで移動から浴そうへのまたぎまで動作が一連でできるようにしました。
浴そう内には腰をかけて入浴できるように浴そう内いすを設置。両サイドにグリップを付けて入浴中の座位が安定するようにしました。

グリップ付浴そう内いす
●参考サイズ
幅 45cm × 奥行 35cm × 高さ 25cm (座面高さ 15cm)

オーダー例
参考価格 **49,720** 円～
(税抜 45,200 円～)

シャワーキャリー L 型 ステンレスパイプ仕様
●参考サイズ
幅 44cm × 奥行 44cm × 高さ 67cm (座面高さ 45cm)

オーダー例
参考価格 **72,160** 円～
(税抜 65,600 円～)

入浴

■シャワーいす / ■浴そう内すのこいす / ■可動式手すり / ■浴室オーダー手すり / ■手すり付ステップ台 / ■シャワーキャリー

オーダー事例



またぎをサポートするシャワーいす、安心して入浴できるようにする浴そう内すのこ、立ち上がりをサポートする可動式手すり、座位の保持や立ち上がりの為の浴室手すりを組み合わせることで安全で安心な入浴を行うことができます。

機能ポイント

ターンテーブル



CAE-33
直径 33cm ※単体
19,800 円
(税抜 18,000 円)

方向転換が容易になります。利用者の方の足を持ち上げて浴そう内に向けていだけなので、介助が楽になります。

アジャスター付



調整幅
4.8cm

ガタつき防止と浴そうの高さにぴったりと合わせることができるので安定感があります。



シャワーいす L型 ターンテーブルタイプ

CAT-0101 アジャスター付
幅 44cm × 奥行 44cm × 高さ 67cm (座面高さ 40cm)
42,570 円 (税抜 38,700 円)

浴そう内すのこ

幅 112cm × 奥行 45cm × 高さ 10cm
オーダー例
参考価格 **100,980** 円～
(税抜 91,800 円～)

可動式手すり

CFA-5A
幅 90cm × 奥行 30cm
36,850 円 (税抜 33,500 円)


浴室オーダー手すり

CEX-4LA
幅 93.8cm × 高さ 98.8cm × 出幅 8.4cm
31,570 円 (税抜 28,700 円)



階段を使って入浴される方や座位入浴の方、シャワーキャリーをご利用の方など、福祉用具を組み合わせることで様々な方の入浴スタイルに対応します。

手すり付ステップ台ユニットタイプ

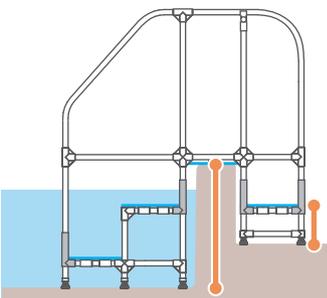

浴そうが深すぎる場合、またいで入るよりも階段状にすることで、立位のまま安全に浴そう内に入ることが可能になります。

蹴上げができる範囲で段差の高さを設定する。

※高さを低く設定しすぎると段数が増えて、奥行が伸びてしまい、スペースが少なくなる可能性がありますので注意する。



手すり付ステップ台 ユニットタイプ

幅 70cm × 奥行 107cm × 高さ 128cm
オーダー例
参考価格 **279,730** 円～
(税抜 254,300 円～)

浴そう内いす/すのこ

幅 115cm × 奥行 30cm × 高さ 40 (座面高さ 20)cm
オーダー例
参考価格 **92,180** 円～
(税抜 83,800 円～)



規格品

シャワーキャリー

CAK-310S
幅 48cm × 奥行 84cm × 高さ 81～89cm
161,370 円 (税抜 146,700 円)

入浴

■シャワーキャリー

シャワーキャリー



規格品

スタンダードタイプ

シャワーキャリー

CAK-110

幅 48cm × 奥行 84cm × 高さ 81~89cm
座面高さ 38~46cm(高さ調整 2cm 間隔)

104,720 円 (税抜 95,200 円)

浴そう内で自力で立ち上がれない、浴そうにつかることができない方や、自分で歩いて脱衣所や浴室に行けない方にご利用いただけます。また、介助者の方は歩行介助・入浴介助の負担軽減が図れます。

デモ機
あります

※試はしてください

全機種デモ機をご用意しております。

取り回しや利用者のフィッティングの確認にぜひご利用ください。デモ機のお申し込みは裏表紙記載のエリア担当支店までご連絡いただくか、弊社ホームページ「kaigo-web」からお申し込みください。※申し訳ございませんが入浴時の実使用はご遠慮いただいております。



規格品

ラージキャスター・サイサポートタイプ



サイサポート

シャワーキャリー

CAK-310S

幅 48cm × 奥行 84cm × 高さ 81~89cm

161,370 円 (税抜 146,700 円)

キャスターの径が大きいため、段差の乗り越えが楽に行えます。サイサポートをつけることで、ひざが広がらず、足が落ちないように補助します。

※座面は 2cm ごと 5 段階の高さ調整が可能です。
座面高さ (38・40・42・44・46cm)

フロントアームレスト



規格品

EF-5510

7,370 円
(税抜 6,700 円)

体を安定させるフロントアームレストを取り付けることができます。(別売品)



規格品

トイレタイプ



シャワーキャリー トイレタイプ 4輪自由車

CAK-460

幅 48cm × 奥行 84cm × 高さ 89~95cm

142,670 円 (税抜 129,700 円)

人間は水を見たり、水の音を聞くと生理現象で排泄したくなります。もよおした際に我慢ができずに失禁してしまう方もいます。時間の余裕があればトイレでキャリーに乗ったまま排泄していただき、余裕がなければポットを差し込んでいただき、ポータブルトイレのようにご使用いただくことも可能です。

※トイレタイプの座面は 2cm ごと 4 段階の高さ調整が可能です。
(46・48・50・52cm)

ヤザキのシャワーキャリーは入浴介助に最適。

やさしさポイント！

コンパクトボディ



軽くて丈夫。幅 48cm、長さ 84cm 以下で小回りがききます。アームレスト(肘掛け)をはねあげることができます。

座面高さ調整



2cm ごと 5 段階の高さ調整が可能です。座面高さ 38・40・42・44・46cm (CAK-110/110s/310/310S)

段差もらくらく



後輪が大きく、段差を楽々乗り越えます。ティッピングペダルを踏み込むと、より楽に乗り越えられます。

ワンタッチ後輪ロック



フットブレーキを前後に踏み込むことで、簡単に後輪のロックができます。



CAK-310

脱衣

■たちあっぷ®Ⅱ 浴室用 / ■立ち上がり補助手すり / ■湯上がりベンチ

「脱衣時の不安定感」でお悩みではありませんか？



入浴や排泄時に必ず必要となる脱衣介助。2人組で1人が体を支えて1人が脱衣を行ったり、または1人だけで行わなければならないシーンもあるのではないのでしょうか。1人で行うと負担も多く、バランスをくずしやすくなります。福祉用具を活用して安全で負担が少ない脱衣介助を行ってください。

たちあっぷ®Ⅱ 浴室用



手すりがない脱衣室に設置して、車いすからシャワーキャリーへの移乗、立ち上がりの補助や立位保持ができます。前傾姿勢が取りやすくなり、また、置くだけの設置のため、利用者に合わせて設置場所を移動することができます。

たちあっぷⅡ 浴室用

CKA-Y24

幅 66cm × 奥行 66cm × 高さ 70・75・80・85cm

120,780 円 (税抜 109,800 円)



規格品

立ち上がり補助手すり



プッシュアップで立ち上がることができ、そのまま体を支えておくことができます。テーブルと手すりが両方ついているので利用者の使いやすい方法で立ち上がりが可能です。軽量で持ち運びが簡単にでき、洗い場での使用も可能です。

●参考サイズ
幅 50cm × 奥行 46cm × 高さ 80cm
(座面高さ 40cm)

オーダー例
参考価格

42,900 円～
(税抜 39,000 円～)

湯上がりベンチ



濡れたままでも座れるベンチのため、脱衣室での脱衣、着衣や入浴後の休憩にご利用いただけます。ご希望のサイズで製作して、手すりや背もたれを付けて座位を安定させたり立ち上がりの補助ができるようにすることも可能です。

●参考サイズ (4台セット)
幅 210cm × 奥行 45cm × 高さ 80cm
(座面高さ 45cm)

オーダー例
参考価格

4台セット
308,000 円～
(税抜 280,000 円～)

脱衣

■たちあっぷ®ひざたちち®C

介助動作例 たちあっぷ®ひざたちち®C

人材確保等支援助成金 対象製品



規格品


「たちあっぷ ひざたちち C」を利用した、脱衣介助手順の一例です。便器と「たちあっぷ ひざたちち C」の位置関係は右図のように便器の正面にテーブルがくるように設置します。便座に座って、膝が膝当てに触れる位置がベストです。高さは利用者の身体状況に合わせて調整してください。※実際の動作は利用者や利用状況に合わせてご確認ください。

たちあっぷ ひざたちち C

CKL-01

幅 63.5cm × 奥行 63.5cm × 高さ 60・65・70cm

134,000 円（非課税）

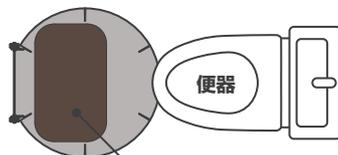

たちあっぷ ひざたちち C



1
利用者にテーブルを手をついてもらい、自身の体を支えてもらいます。支えている間に下着をおろします。



2
利用者の腰を支えて、ゆっくりと便座に腰をかけてもらいます。



3
排泄中は大きなテーブルで体を支えられ、しっかり前傾姿勢がとれるので、排泄しやすい安定した座位を保つことができます。



4
排泄が終わりましたら、利用者に合図をして立ち上がってもらいます。その際、腹部と腰を支えて立ち上がりをサポートします。



5
利用者にテーブルで体を支えてもらっている間に、お尻を拭き、下着を上げます。



6
着衣が終わりましたら体を起こし、排泄時の立位介助の完了です。大きなテーブルと膝当てによって姿勢が安定し、座位や着脱衣などを安全に行うことができます。

脱衣

■湯上がりベンチ / ■脱衣台 / ■ストレッチャー / ■低床介助キャリー

オーダー事例

湯上がりベンチ



形状も自由に製作できます。ご希望に応じて分割して製作することで様々な形でご利用いただけます。

●参考サイズ
幅 170cm × 奥行 40cm × 高さ 67cm
(座面高さ 40cm)

オーダー例
参考価格 **107,470** 円～
(税抜 97,700 円～)

湯上がりベンチ / シャワーキャリー



シャワーキャリーの高さに合わせてベンチを製作することで脱衣から移乗、移動をスムーズに行うことができます。

●参考サイズ(湯上がりベンチのみ)
幅 (150・100)cm × 奥行 44cm × 高さ 67cm
(座面高さ 40cm)

オーダー例
参考価格 **155,870** 円～
(税抜 141,700 円～)

脱衣台



移乗して脱衣ができるように脱衣台(写真左)を製作しました。立ち上がりには前受けテーブル(P.10 参照)を使用しています。

●参考サイズ(脱衣台のみ)
幅 60cm × 奥行 40cm × 高さ 38cm

オーダー例
参考価格 **33,000** 円～
(税抜 30,000 円～)

脱衣台



脱衣しやすい・介助しやすい高さで脱衣台を製作しました。取り外し可能な転落防止柵を取付けました。

●参考サイズ
幅 160cm × 奥行 67cm × 高さ 58cm

オーダー例
参考価格 **143,000** 円～
(税抜 130,000 円～)

ストレッチャー



ストレッチャーも製作可能です。脱衣場の限られたスペースでも取り回しがよいサイズで、また柵も着脱できるように製作しました。

●参考サイズ
幅 170cm × 奥行 60cm × 高さ 100cm (座面高さ 70cm)

オーダー例
参考価格 **200,200** 円～
(税抜 182,000 円～)

低床介助キャリー



低床介助キャリーに座ることで、フットケア等で膝をついたり、屈んだりする介助動作の負担を軽減します。

●参考サイズ
幅 30cm × 奥行 30cm × 高さ 21cm

オーダー例
参考価格 **56,100** 円～
(税抜 51,000 円～)

訓練

■階段昇降訓練機(手すり付ステップ台) / ■平行棒 / ■リハビリ訓練台 / ■たちあっぷ®

「適切な訓練機器の導入」でお悩みではありませんか？



既製品の訓練機器は高価で手が出せなかったり、リハビリ室のスペースが限られていて訓練機器が導入できない等、お困りではありませんか？

弊社では各種訓練機器を使用用途・設置場所・予算に合わせてオーダーにて承ります。

階段昇降訓練機(手すり付ステップ台)



幅・奥行・段差の高さ等、ご希望に応じて製作します。高い段差と低い段差を分けて設定することで利用者の身体状況に合わせて使い分けることができます。色を分けて区別できるような工夫もできます。設置する場所により形状もご提案させていただきます。

⚠ 写真の「手すり付ステップ台」は、連結部品の仕様が実物と少し異なります。詳しくはお問合せください。

●参考サイズ
幅 90cm × 奥行 (180・210)cm × 高さ 135cm

オーダー例
参考価格 **376,200** 円～
(税抜 342,000 円～)

歩行動作訓練機(平行棒)



長さオーダー可能です。手すりは片側だけでもご利用いただけます。

●参考サイズ
長さ 270cm × 高さ 75cm

オーダー例
参考価格 **210,100** 円～
(税抜 191,000 円～)

リハビリ訓練台



スペースに応じてサイズオーダーが可能です。組み合わせて使えば様々な訓練シーンでご活用いただけます。

●参考サイズ(1台)
幅 250cm × 奥行 120cm × 高さ 40cm

1台
オーダー例
参考価格 **94,270** 円～
(税抜 85,700 円～)

たちあっぷ®を使用した訓練

規格品

起立訓練



立位バランス訓練




⚠ 「たちあっぷ」は、起き上がり・立ち上がりの補助を目的として開発された、置くだけで使用できる製品です。固定をしていないため、訓練で使用する場合は不意に動く可能性があります。使用時は必ず専門家の指導・補助をしていただき、安全に十分配慮してご使用ください。

障がい・小児

■スイングフレーム

楽しく遊びながらハビリテーション

「スイングフレーム」は、パシフィックサプライ株式会社製の感覚統合器具「スイング」を吊り下げて、振り運動・回転運動ができるハビリテーション器具です。楽しく遊びながら揺れて、動いて、感覚を養うことができます。

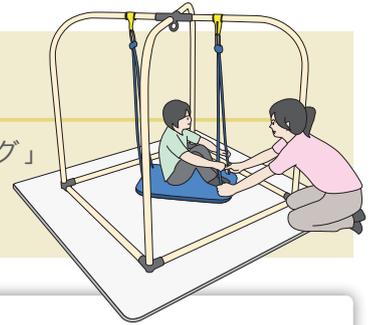

スイングフレーム



ご使用イメージ(スイング・マットは別売り) マットを敷いてご使用ください。

コンパクト

本体は幅130×奥行130×高さ140cmのコンパクトサイズです。

工事不要

使用したい場所に置くだけでご使用いただけます。

簡単組立

特殊工具を使わず、六角レンチで組立可能です。



スイングフレーム

CMA-01

幅 130 × 奥行 130 × 高さ 140 cm

132,000 円 (税抜 120,000 円)

※スイングとマットは別売りになります。

スイング取付バリエーション

2つの取付け方が可能です。※使用するスイングによってはできない取付け方もあります。

1点
吊り下げ

動作: 回転運動
全方向^①に向かう振り運動

円盤ブランコ

※水平 360° 全方向



2点
吊り下げ

動作: 対角方向に向かう振り運動

スペースローリン



2点
吊り下げ

動作: 対角方向に向かう振り運動

オーシャンスイング



取付可能スイング

別売品

下記パシフィックサプライ株式会社製の「スイング」が取付可能です。それ以外のは使用しないでください。

1点
吊り下げ



■ サンライトスイング

1点
吊り下げ



■ 円盤ブランコ

2点
吊り下げ



■ スペースローリン

2点
吊り下げ



■ オーシャンスイング

青もたれはオプション品です



スイングフレームは遊具ではありません。ご使用にあたっては必ずハビリテーション関連スタッフまたは保護者などが付き添ってご使用ください。

障がい・小児

■ゆ〜楽さん 小児用

「お子さんの入浴介助」でお悩みではありませんか？




障がい児の洗体の際、利用者の体が安定しなかったり、気管切開部に水がかかってしまうなど、苦勞されているというお話を耳にします。また、介助者の方は無理な姿勢による洗体で腰に負担がかかっていませんか？「ゆ〜楽さん 小児用」は、利用者にも介助者にとっても快適な入浴ができるようにサポートします。

ゆ〜楽さん 小児用




「ゆ〜楽さん 小児用」は、エアーの力で浴そうを膨らませて体を支えることができます。たとえば気管切開をしたお子さんの首(切開部)に水がかかりにくくなるので安心です。架台はオーダー可能です。介助しやすい高さに製作することで体の負担が少ない入浴介助をすることが可能です。

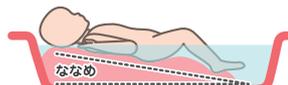

バルーンはななめに膨らむので切開部分に水がかかりにくく、安心です。

浴そうは3層構造

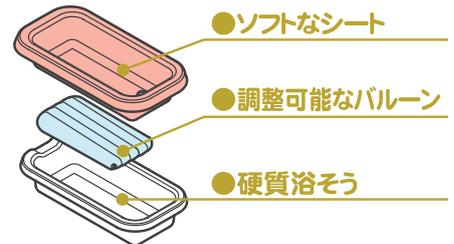

浸かりたい深さや体格、症状に合わせてバルーンに入れるエアーの量を調整してください。

製品ラインナップ



規格品

ゆ〜楽さん 小児用 電動式

幅 122 × 奥行 61 × 高さ 86 cm
427,130 円 (税抜 388,300 円)



規格品

ゆ〜楽さん 小児用 足踏式

幅 122 × 奥行 61 × 高さ 86 cm
338,250 円 (税抜 307,500 円)



規格品

浴そう | CAL-40A
121,660 円 [税 110,600 円]



架台 | CAL-40D

68,750 円 [税 62,500 円]
※高さ・脚部オーダー可能です。
オーダーの場合、別途お見積り致します。



規格品

シート | CAL-40B
97,900 円 [税 89,000 円]



規格品

電動エアーポンプユニット
CAL-40E
105,380 円 [税 95,800 円]



規格品



バルーン | CAL-40C
33,440 円 [税 30,400 円]



規格品

エアーポンプ
CAL-40F
16,500 円 [税 15,000 円]

製品仕様

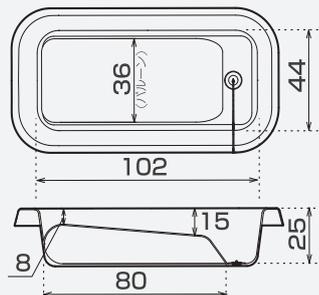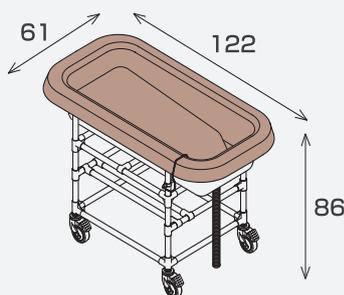

単位: cm

●材質

シート	クロロプレンゴム	
バルーン	塩化ビニル	
浴そう	FRP(繊維強化プラスチック)	
架台	フレーム	イレクター (プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチック)
	キャスター	プラスチック
電動エアーポンプ	プラスチック・アルミ	
エアーポンプ	プラスチック	

障がい・小児

■ゆ～楽さん 小児用

設置事例

施設

移動や排水に便利な小児用サイズの浴そうが欲しい…。

子供の成長と共にベビーバスではサイズに余裕がなくなり、ちょうど良い大きさのお風呂が欲しい…。また、今までのベビーバスでは移動や排水時に困難さを感じています…。



解決!!

小児用浴そう「ゆ～楽さん」の設置で解決しました。

キャスター付きの架台で移動がとてもスムーズになり、また、浴そうに付いているホースからお湯をバケツに排水できるようになり、とても楽になりました。サイズも子供がゆったり入れるベストサイズでした。

機能ポイント

- ①浴そうに取り付いている排水ホースを伸ばしてバケツや洗面台に排水できます。
- ②ベッドサイドに近付けて入浴ができますので、人工呼吸器等の医療機器を移動せずに対応できるようになります。
- ③介助のしやすさが向上し、介助者にとっても腰への負担が軽減されます。
- ④何よりご利用者様の姿勢が安定できて、リラックスして入浴いただけるようになります。



在宅

気管切開部にお湯が掛からないように姿勢を保持できる浴そうが欲しい…。

訪問介護でプラスチックコンテナを使い、マットを敷いて姿勢を保っていますが、体格も大きくなり身体に合ったサイズで無理のない姿勢で安心して入浴できる浴そうを探しています…。




解決!!

小児用浴そう「ゆ～楽さん」の設置で解決しました。

浴そう内部のバルーンにエアを入れて調整することで気管切開部にお湯が掛からない姿勢が取りやすくなり、安全で安心な入浴ができるようになりました。

機能ポイント

- ①バルーンのエア調整により、気管切開部にお湯が掛からない姿勢を取りやすくなります。
- ②設置場所に合わせるように、架台の高さをオーダーでき、お湯を入れる蛇口に近づけることができます。

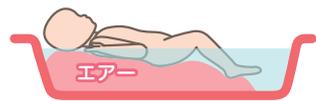

障がい・小児


■トイレ移乗台 / ■トイレ移乗ステージ / ■シャワーキャリー フロントレストタイプ

お悩みポイント：車いすからの移乗が大変。便座にうまく座れない。

トイレ移乗台



便器の座面は着座スペースが少なく、立位から座ったり、車いす等からの移乗は困難になります。便器の左右に便座の形状に合わせた台を設置して、便座に乗り移ることで着座しやすくなります。取り外し可能な手すりを取り付けることもできます。

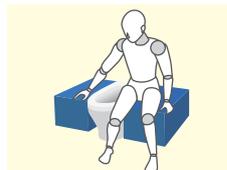

●参考サイズ
幅 100cm × 奥行 70cm × 高さ 65cm
(座面高さ 40cm)


オーダー例
参考価格 **181,940** 円～
(税抜165,400 円～)

トイレ移乗ステージ



下半身麻痺の方など、移乗が大変で座位が安定しない方には大きなステージを製作します。車いすからステージに移乗する際に、タイヤ除けの切欠きをつけてあるので車いすをより近づけて移乗ができるようにしています。

●移乗動作例

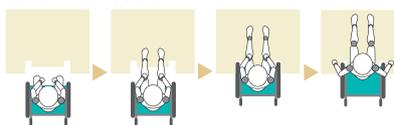

●参考サイズ
幅 242cm × 奥行 157cm × 高さ 42cm

オーダー例
参考価格 **213,400** 円～
(税抜194,000 円～)

お悩みポイント：便座にうまく座れない。座位が安定しない。腹筋の衰えで排泄に時間がかかってしまう。

シャワーキャリー フロントレストタイプ



●便器にそのままセット可能



シャワーキャリー フロントレストタイプ

CAK-029

※ポットは含まれておりません。

幅 59cm × 奥行 89cm × 高さ 92cm
(座面高さ 51cm)

136,510 円 (税抜 124,100 円)



●ポットをつけることも可能
※ポットは別売りです。



施設内環境

■ 5S / ■ 備品管理台車 / ■ おむつ管理台車 / ■ ゴミ分別台車 / ■ 物干し台



「施設内の環境整備」でお悩みではありませんか？

在庫管理ができていない。物が乱雑に置かれていて危ない。人力で物を運んでいて作業効率が上がらない。などの声をよくお聞きします。そんなお悩みは施設に合った棚や台車を導入することで改善することができます。弊社ではお悩みに合わせて最適な什器を提案し、施設の環境整備のお手伝いをさせていただいております。

「5S」で介護現場をより快適に



「5S」は、主に製造業やサービス業などの職場環境を整える事で作業効率を上げようとする考え方ですが何も製造業に限った手法ではありません。

介護現場や事務部門においても有効な手法と言えます。皆さんの介護現場はいかがでしょう？

掃除が行き届き、整理整頓され、必要な物がすぐに取り出せるような環境になっていますか？

うっかりこぼした水分を放置した廊下では、利用者が足を滑らせて転倒するおそれがあります。認知症の方がゴミを拾って口に入れて誤飲してしまったり、使用した用具を片付けるのを忘れ、十分な作業スペースを確保できない状況で無理な姿勢をしたために腰痛を発症させてしまったりなど、普段から常に「5S」を徹底していれば起こらないリスクがたくさん潜んでいます。

5Sの基本はモノを「直置き」しないこと

「直置き」をするとこんな可能性が…

- 脚をひっかけ、転倒してケガをする。
- 蹴り飛ばしてしまい、モノが破損する。
- 掃除がしにくい。
- 床にゴミやホコリがたまり、虫がわく。

▶ 台車や管理棚を導入する



●参考サイズ(1台)
幅 80cm × 奥行 50cm × 高さ 60cm

オーダー例
参考価格 **51,150** 円※1台 円〜
(税抜 46,500 円〜)

整理・整頓での什器活用例

おむつ管理台車



●参考サイズ(1台)
幅 120cm × 奥行 60cm × 高さ 150cm

オーダー例
参考価格 **98,780** 円※1台 円〜
(税抜 89,800 円〜)

清掃・清潔での什器活用例

ゴミ分別台車



●参考サイズ(1台)
幅 35cm × 奥行 35cm × 高さ 65cm

オーダー例
参考価格 **25,740** 円※1台 円〜
(税抜 23,400 円〜)

躰での什器活用例

物干し台



●参考サイズ
幅 75cm × 奥行 40cm × 高さ 80cm

オーダー例
参考価格 **13,750** 円※1台 円〜
(税抜 12,500 円〜)

施設内環境

■移動棚

移動棚

狭い管理倉庫のスペースを有効利用できる「管理棚」が欲しい…。

狭い管理倉庫内にて様々な備品や消耗品を既製品のスチール固定棚に雑然と保管しており、在庫状態も担当者にしかわからない状態です…。




解決!!

レール上を動く「移動棚」で保管量が約20%アップしました。


レール上を移動する移動棚を活用して、限られたスペースの有効活用ができ、保管量が約20%向上しました。合わせて、ロケーション図や棚番号を用意して作業の見える化・マニュアル化や、在庫管理の仕組みも構築し、人が変わっても管理が行えるようになりました。



before

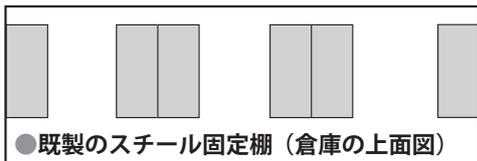

after

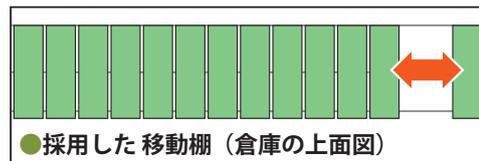

●参考サイズ（1台）
幅 115 cm × 奥行 46 cm × 高さ 153 cm


オーダー例 1台 **140,800**円
参考価格 (税抜 128,000円)

導入事例

レール式移動棚を設置して収納効率は約20%増えました。作業の見える化・マニュアル化で誰でも同じことができる仕組みができました。



●ロケーション図・棚番号

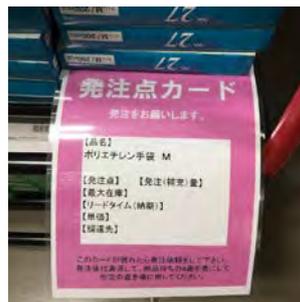

●発注点・発注量・最大在庫を決めて、発注点カード、納品待ちカードを利用した在庫管理の仕組みをつくりました。

施設内環境

■おむつ交換台車

おむつ交換台車

機能的で衛生管理ができる「おむつ交換台車」が欲しい…。

おむつ交換台車が古くなったため新調しようと考えています。今より機能的なもので、衛生管理を的確に行える台車が欲しいのですが既製品になかなか合ったものが見つかりませんでした…。



左から
AAA-02B、AAA-01A、AAA-02A



清潔台車

おむつ交換台車

AAA-01A かごタイプ
幅 43cm × 奥行 37cm × 高さ 108cm
58,960 円 (税抜 53,600 円)

おむつ交換台車

AAA-01B 棚板タイプ
幅 43cm × 奥行 37cm × 高さ 108cm
74,800 円 (税抜 68,000 円)



ごみ台車

おむつ交換台車

AAA-02A ダストボックスタイプ
幅 43cm × 奥行 37cm × 高さ 108cm
58,080 円 (税抜 52,800 円)

おむつ交換台車

AAA-02B カート型タイプ
幅 43cm × 奥行 33cm × 高さ 108cm
69,080 円 (税抜 62,800 円)

解決!!

コンパクトな多機能カートを連結する「おむつ交換台車」はいかがでしょう。

清潔台車(かごタイプ・棚板タイプ)と、ゴミ台車(ダストボックスタイプ・カート型タイプ)の4種の機能台車を組み合わせて連結できます。

台車のカラーも選べるため、色分け管理もできます。

■感染予防と衛生管理に最適

自由な組み合わせで連結・分離ができ、「清潔物」と「不潔物」を完全分離できる!

フロアごとの入居者数や、作業用途に合わせた台車で自由に組み合わせができます。また色の選択も可能です。

連結



分離



■プロテクタージョイント

ダストボックスが簡単に取出し・設置できる!

ワンタッチで簡単に外せて出し入れできます。



■持ち上げ動作を軽減

重いごみ袋を持ち上げずに横から引き出せる! 腰痛の原因になる持ち上げ動作を軽減します。



施設内環境

■汚物処理台車 / ■平台車 (ミニポリトラ[®])

汚物処理台車

重量のある汚物(おむつ)の処理の負担を少なくしたい…。

ダストボックスに溜まった汚物(おむつ)を持ち上げて取り出し、スチール製の平台車に載せ替え、運搬していますが、重くて腰に負担が掛かっています…。



解決!!

イレクター製のゴミカートで解決しました。

用途に合わせた仕様(サイズ・機能)で製作できるイレクター製ゴミカートに変更して作業が改善できました。重い汚物(おむつ)を持ち上げることなくゴミステーションまでそのまま運搬できるので、腰への負担がなくなり作業が格段に楽になり喜んでます。

before



重い汚物(おむつ)を取り出し、台車に載せ替えて、ゴミステーションまで運んでいました。

after



ゴミカートにポリ袋をセットして、溜まった汚物(おむつ)は持ち上げることなくそのまま口をしぼることができます。そして別の台車に載せ替えることなく屋外のゴミステーションまで運搬して処理することができます。

●参考サイズ
幅 38 cm × 奥行 56 cm × 高さ 92 cm

オーダー例
参考価格 **35,200** 円
(税抜 32,000 円)

平台車 (ミニポリトラ[®])



荷物を直接、床置きしてしまうと、動かせずに邪魔になってしまふことがあります。

平台車に置くことで楽に動かせ、備品や在庫の管理もしやすくなります。



規格品

ミニポリトラ

GN-400

幅 68cm × 奥行 40cm × 高さ 11.5cm

7,590 円 (税抜 6,900 円)

施設内環境

■ キャリーワゴン / ■ おむつ交換台車 / ■ リネン台車 / ■ 配膳ワゴン

キャリーワゴン



キャリーワゴン

MC-1 N-450W

幅 77cm × 奥行 48cm × 高さ 82cm

26,290 円 (税抜 23,900 円)

キャリーワゴン

MC-2 N-450LW(ロングタイプ)

幅 95cm × 奥行 45cm × 高さ 85cm

32,560 円 (税抜 29,600 円)

規格品



キャリーワゴン 3段タイプ

MC-3

幅 74cm × 奥行 48cm × 高さ 85cm

35,750 円 (税抜 32,500 円)

規格品

オーダー事例

※参考価格に取付施工費・送料は含まれておりません。
具体的な価格は販売店にお問い合わせください。

おむつ交換台車



運びたい物や量、種類に応じて
サイズ・形状のご提案をいたし
ます。

●参考サイズ(本体のみ)
幅 158cm × 奥行 64cm × 高さ 100cm

オーダー例
参考価格 126,500 円～
(税抜 115,000 円～)

おむつ交換台車



すでにお持ちのごみ箱やパケツ
に合わせて製作することも可能
です。

●参考サイズ(本体のみ)
幅 133cm × 奥行 52cm × 高さ 112cm

オーダー例
参考価格 138,490 円～
(税抜 125,900 円～)

おむつ交換台車



既製品にはない、使用用途に
合ったオリジナルのおむつ交換
台車が製作できます。



●参考サイズ(本体のみ)
幅 85cm × 奥行 50cm × 高さ 96cm

オーダー例
参考価格 角型容器 105,600 円～
2個込み (税抜 96,000 円～)

おむつ交換台車 コンパクトタイプ



写真のオプション品
(ダストボックス 45L・収納カゴ・
箱止め用バンド 2ヶ)は一例
です。
用途に合わせて製作できます。

●参考サイズ(本体のみ)
幅 30cm × 奥行 51cm × 高さ 82cm

台車本体のみ
オーダー例
参考価格 26,290 円～
(税抜 23,900 円～)

リネン台車



使用する場所・用途に応じて
オーダーで製作します。
木目調での製作も可能です。



●参考サイズ(1台)
幅 77cm × 奥行 48cm × 高さ 81cm

オーダー例
参考価格 63,470 円^{※1台}～
(税抜 57,700 円～)

配膳ワゴン



天板取外し式の配膳ワゴンです。配膳数や
運ぶものなど、使い方に合わせて製作対応
できます。清掃も楽
にできます。



●参考サイズ
幅 75cm × 奥行 45cm × 高さ 130cm

オーダー例
参考価格 124,740 円～
(税抜 113,400 円～)

施設内環境

■リネン棚 / ■リネン台車 / ■車いす管理台車 / ■ポータブルトイレ管理台車 / ■松葉杖管理台車 / ■洗浄室整理棚 / ■清掃用具管理台車 / ■ゴミ分別台車

オーダー事例

リネン棚



リネン物(シーツ等)の管理や紙おむつ等を保管するための棚も製作いたします。載せるもの、置くスペースに合わせてご提案します。

●参考サイズ
幅 200cm × 奥行 40cm × 高さ 180cm

オーダー例
参考価格 **124,300** 円～
(税抜 113,000円～)

リネン台車



リネン台車です。シーツの取り換え時などに使用します。使用しない際は折りたたみ、コンパクトに収納しておけます。

●参考サイズ
幅 91cm × 奥行 50cm × 高さ 110cm

オーダー例
参考価格 **73,920** 円～
(税抜 67,200円～)

車いす管理台車



車いすを管理するための棚(台車)です。使用しない際にスペースをとる福祉用具を省スペースで管理できます。

●参考サイズ
幅 120cm × 奥行 72cm × 高さ 170cm

オーダー例
参考価格 **66,000** 円～
(税抜 60,000円～)

ポータブルトイレ管理台車



●参考サイズ
幅 130cm × 奥行 62cm × 高さ 161cm

オーダー例
参考価格 **119,900** 円～
(税抜 109,000円～)

松葉杖管理台車



●参考サイズ
幅 110cm × 奥行 62cm × 高さ 140cm

オーダー例
参考価格 **46,200** 円～
(税抜 42,000円～)

洗浄室整理棚



洗浄室の壁面のデッドスペースに設置した抗菌パイプで製作した整理棚です。間口や奥行・棚ピッチなど、欲しいサイズで設計できます。



●参考サイズ
幅 221cm × 奥行 50cm × 高さ 248cm

オーダー例
参考価格 **93,720** 円
(税抜 85,200円)

清掃用具管理台車



●参考サイズ
幅 90cm × 奥行 42cm × 高さ 180cm

オーダー例
参考価格 **65,450** 円～
(税抜 59,500円～)

ゴミ分別台車



●参考サイズ
幅 91cm × 奥行 59cm × 高さ 160cm

オーダー例
参考価格 **57,860** 円～
(税抜 52,600円～)

人材育成

■ユア・サポーター

介護職員の皆様のスキルアップのお手伝い。

より良い介護を行うためには、介護職員のスキルアップも重要です。
しかし、日々の業務でお忙しい中、セミナーに参加したり展示会に出向く事が難しい方も多いのではないのでしょうか。
そんな方に向け、ヤザキでは直接、施設様にお伺いして研修会や福祉用具の展示会を行っています。

ユア・サポーター 個別研修会

「ユア・サポーター」それはヤザキからのご提案です。
日々の業務や活動でのお悩み・疑問に対し、少しでもお役に立てればと思い「個別研修会」という形でサポートさせていただきます。お客様のご要望に応じたカリキュラムで研修会を実施させていただきます。



ご要望に応じた個別のカリキュラムを作成します。

カリキュラム例

- オーダー福祉用具について
- 職場定着支援助成金について
- 家屋調査時の福祉用具選定について
- 福祉用具を活用した入浴方法 …など

ユア・サポーター 福祉用具 出張展示会

“見て・触れて・試す”

最新の福祉用具の現物をお持ちして伺い、その場で福祉用具を見て・触れて・試していただくことができます。
ご訪問の費用はかかりません。お気軽にご連絡ください。



ご訪問の費用は掛かりません。
お気軽にご連絡ください。



随時更新中

介護支援ページ Kaigo-web

<http://www.kaigo-web.info/>

ヒントになる事例を多数掲載中!
ぜひご覧ください!

kaigo-web


検索



▲kaigo-webトップページ

SERVICE NETWORK

サービスネットワークのご案内
お問い合わせは、下記サービス網案内図に基づいて最寄りの支店にご連絡ください。

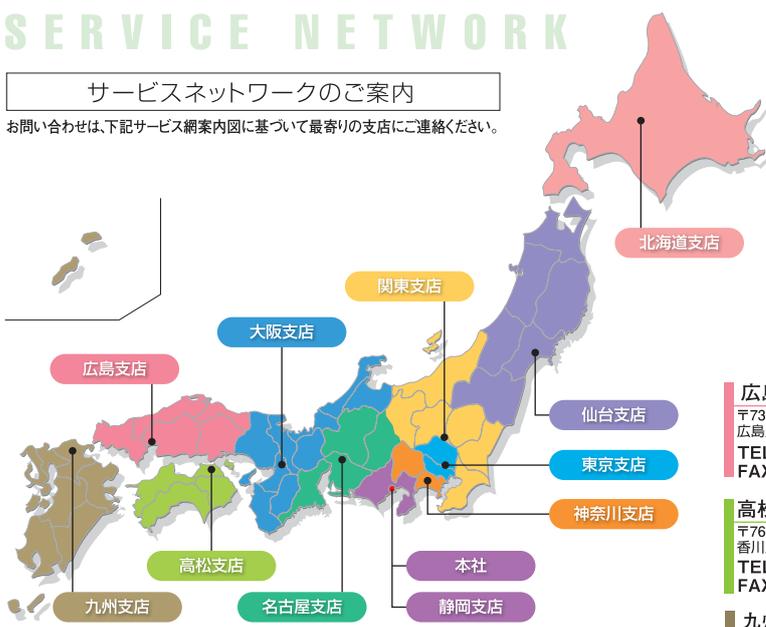

矢崎化工株式会社

本社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
TEL:054-281-8867 FAX:054-284-0863

神奈川支店 福祉介護機器課 〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4 TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316	北海道支店 福祉介護機器課 〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1 TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459
広島支店 福祉介護機器課 〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17 TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890	仙台支店 福祉介護機器課 〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280 TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099
静岡支店 福祉介護機器課 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1 TEL 054-286-1101 FAX 054-286-3988	東京支店 福祉介護機器課 〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3 TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007
高松支店 福祉介護機器課 〒761-8058 香川県高松市勅使町227 TEL 087-866-6411 FAX 087-867-1916	名古屋支店 福祉介護機器課 〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2 TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219
九州支店 福祉介護機器課 〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1 TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026	大阪支店 福祉介護機器課 〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1 TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

矢崎化工株式会社は、国際規格であるISOを認証取得しています。
詳しくは弊社ホームページ(<http://www.yazaki.co.jp/>)をご覧ください。

お取り扱い

- 当冊子記載の価格は参考価格です。総額表示の消費税額(10%)は四捨五入して計算しており、取付施工費・送料は含まれておりません。お客さまがご購入予算を検討する際の目安としていただき、具体的な価格はご購入店にお尋ねください。
- 遠隔地および離島等、地域によって価格が異なる場合がございます。
- 納期については、ご購入店にお尋ねください。
- 当冊子掲載製品の仕様価格等は、予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。
- 当冊子掲載の製品は、日本国内仕様です。
- 当冊子掲載の浴そう・トイレ便器、収納品等は使用イメージのため他社製品を使用しています。
- 当冊子記載内容は、2020年4月現在のものです。