

# たちあっぷ ひざたちちC 手すり

「ひざたちちC」に取付けて、よりスムーズな動作・介助が可能に!!

## 特長

より安定した「立ち上がりの補助」  
「姿勢保持」「移乗補助」が可能





- 手すりを手で握んだり、手を掛けることで、身体を支えやすくなり、よりスムーズな動作・介助ができます。

高さハイ・ローの2タイプ

- 最適な位置で手すりをお使いいただけるように、手すりの高さは、ハイまたはローの2タイプからお選びいただけます。

手すり出幅無段階調整可能


- ハイタイプ(CKL-TA)はテーブルから1cm～11cm、ロータイプ(CKL-TB)は0cm～11cmの範囲内で無段階に出幅調整ができます。

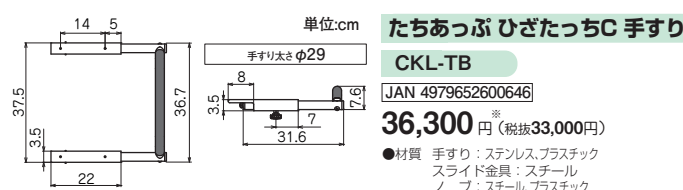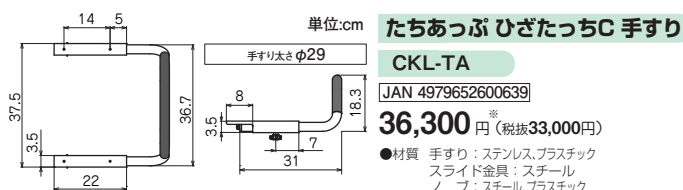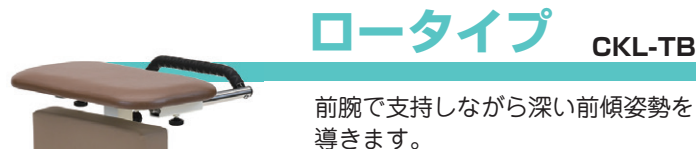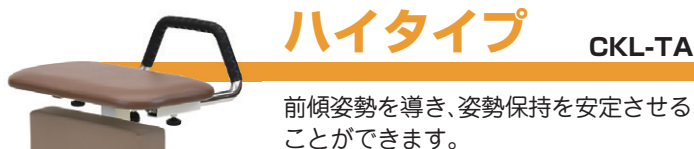


>> ※本製品はたちあっぷ ひざたちちC本体とセットでご購入の場合、非課税対象となります。詳しくは裏面をご確認ください。<<

## 手すり出幅調整

手すりの2ヵ所のノブを回しゆるめ、手すり部を両手でつかんでスライドしてください。  
位置が決まったら、ノブを強く締めて固定してください。

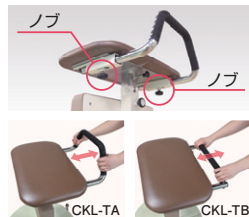

※詳しくは取扱説明書をご確認の上、安全に注意してご使用ください。

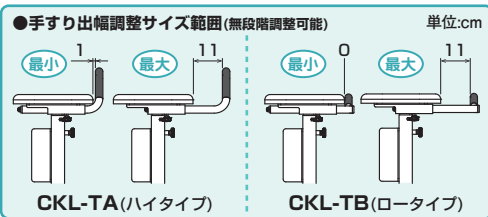

## 移動方法

手すりと車輪を使用することで移動しやすくなります。  
手すりをしっかり掴んで本体を45°程度傾けて移動させてください。




## セット品

「たちあがひ ひざたちC」本体と同時にご購入の際はセット品でご注文ください。非課税対象となります。

### 手すりAセット（ハイタイプ）




**たちあがひ ひざたちC  
手すりAセット**  
CKL-01TA JAN 4979652601131  
167,000 円（非課税）

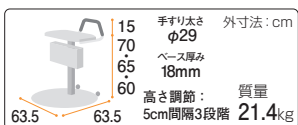

### 回転式




**たちあがひ ひざたちC 回転式  
手すりAセット**  
CKL-02TA JAN 4979652601155  
300,000 円（非課税）

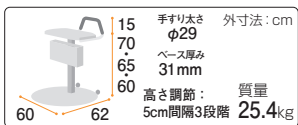

### 手すりBセット（ロータイプ）




**たちあがひ ひざたちC  
手すりBセット**  
CKL-01TB JAN 4979652601148  
167,000 円（非課税）

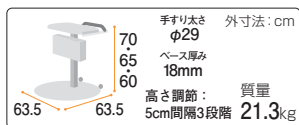

### 回転式



**たちあがひ ひざたちC 回転式  
手すりBセット**  
CKL-02TB JAN 4979652601162  
300,000 円（非課税）

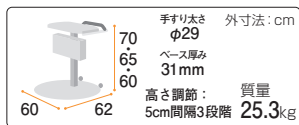

## 課税対象？非課税対象？

たちあがひ ひざたちC 本体は厚生労働省通知「消費税法の一部を改正する法律（平成3年法律第73号）の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」の規定において移動用リフトに分類されるため、非課税対象となります。

たちあがひ ひざたちC 手すりを単品でご購入いただく場合は**課税対象**です。  
ただし、たちあがひ ひざたちC 本体と**セット**でご購入いただいた場合は**セットで非課税**となります。  
たちあがひ ひざたちC 本体とたちあがひ ひざたちC 手すりを**同時に**ご購入の場合、たちあがひ ひざたちC 本体と**同数の**たちあがひ ひざたちC 手すり**が非課税対象**となります。（セット品番でご注文ください。）

### 単品購入



**課税対象**

### 単品購入



**非課税対象**

### セット品購入



**非課税対象**

### 同時購入 ※本体と手すり同数の場合



**非課税対象**



**非課税対象**

●製品の仕様は改良の為、予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。 ●記載価格の総額表示は、消費税 10% の価格です。 ●撮影に使用しているベッドは他社製品です。

## 矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護機器部  
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

### 北海道支店

〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1  
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

### 東京支店

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3  
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

### 名古屋支店

〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2  
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

### 高松支店

〒761-8058 香川県高松市勸使町227  
TEL 087-866-6411 FAX 087-867-1916

### 仙台支店

〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280  
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

### 神奈川支店

〒257-0024 神奈川県横浜市名古木3-4  
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

### 大阪支店

〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1  
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

### 九州支店

〒820-0702 福岡県飯塚市平塚4-1-1  
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

介護支援ページ  
**kaigo-web**

<http://www.kaigo-web.info/>



お問合わせ先