

●おくだけシリーズ®

たちあっぷ ひざたっち® 回転式 たててすり

縦手すりで立ち上がりをサポートして
ご利用者様を乗せたまま方向転換が可能

◎こんな方へ…

立位は取れるが、姿勢の保持や
足の踏み変え、方向転換が不安な方へ



解決

縦手すりを掴んだ姿勢
のままで回転し、安全で
安心な移乗ができます。

◎こんな場所で…

車いすからの移乗が困難な、
トイレなどの狭い場所で



解決

直径60cmのベースが
回転して、コンパクトに
向きを変えられます。

▼オプション部品「膝当て」付きの本製品使用例




膝当てで膝を支えることでご利用者様の膝折れの心配
がなく、安心して立ち上がることができ、安定した「立ち
上がり」の補助・姿勢保持・移乗補助」をすることが可能。



移乗介助の例(車いすからトイレへ)

⚠ 必ず介護者が付き添った状態で使用してください。

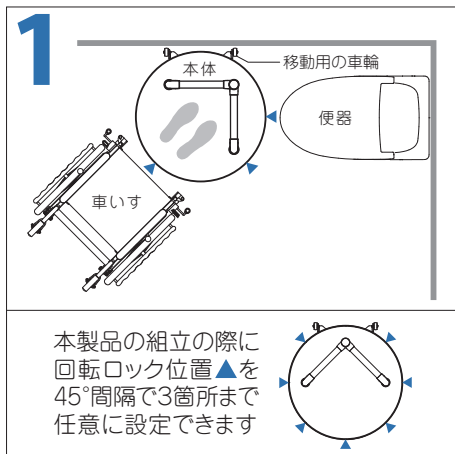

本体の車輪がご利用者様・介護者の移乗の妨げにならないように、また壁側になるように置きます。



ご利用者様の足をベースの上に置き、縦手すりを握ってもらいます。かかとがベースからはみ出していないことを確認してください。




介護者は、ご利用者様の下半身を支えます。ご利用者様に手すりので体を支えてもらいながら車いすに浅座りしてもらいます。



ご利用者様が手すりので体を支えていることを確認して立ち上がらせれます。介護者は縦手すりの上部にあるノブを上げて回転ロックを解除します。ご利用者様の下半身を支えながら、まわりの障害物等に気をつけて回転させます。



設定したロック位置(便器までの中間位置)で自動で回転ロックします。ご利用者様に縦手すりので体を支えてもらいながら下着をおろします。

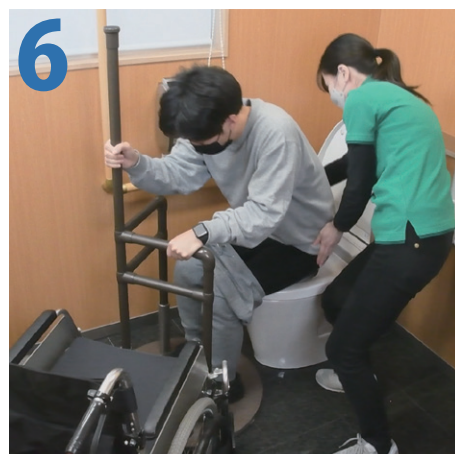


ロックを解除し、さらに回転させ、移動先に着いたら回転ロックが掛かったことを確認し、ご利用者様の下半身を支えながらゆっくりと便座に腰を掛けてもらいます。

たちあふひざたちC 回転式 たてすり

CKL-03 JAN 4979652608239

252,780円(税抜229,800円)

- 材 質 手すり: プラスチック被覆スチールパイプ
手すりジョイント: プラスチック
ワイヤー: ステンレス
ベーススタンド: ステンレス・アルミ
マット: 発泡プラスチック
- カラー ダークブラウン

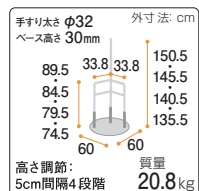

抗ウイルス
消臭機能付
衝撃吸収マット

移動用
キャスター付

オプション部品 膝当て

たちあふひざたちC 回転式 たてすり 膝当て

CKL-HA JAN 4979652608260

51,480円(税抜46,800円)

- 材 質 フレーム: ステンレス
膝当て部: プラスチック
ツマミ: プラスチック・スチール
- カラー ダークブラウン



ツマミ
(本体取付用)



膝を当てて立ち上がりやすく
膝当ての向きは、正面(右写真)と左右に
45°向けた3方向に設定できます。



- 膝当て部サイズ:
横35×縦21.2cm
- 質 量: 3.5kg



●製品の仕様・価格等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。●記載価格の総額表示は、消費税10%の価格です。●便器等は使用イメージのため他社製品を使用しています。

矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護部門
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小産2-24-1

■北海道支店
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■東京支店
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

■大阪支店
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

■仙台支店
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■神奈川支店
〒257-0024 神奈川県横浜市名古木3-4
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■広島支店
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

介護支援ページ
kaigo-web
<https://www.kaigo-web.info/>



お問い合わせ先