

●おくだけシリーズ[®]

伸縮つながるくん[®]



あがりかまち等の段差や居宅内の歩行動線を構築!
伸縮機能があり、長さが調整できます!

特長

使用場所に合わせて伸縮可能

- 長さ64cmから95cmまで無段階で調整可能です。

上下・左右、角度調整可能

- 上下45°まで、また左右も可動範囲内で調整ができるので移動したい方向に手すりの設置が可能です。

2段かまちでも使用可能


- あがりかまち用たちあっぱ(・ミニ)に取付けてもう一段あるかまちでも段差昇降をサポートできます。



希望小売価格 34,760円(税抜31,600円)

●材質

手すり:
(φ32)プラスチック
被覆スチールパイプ
(φ40)アルミパイプ
連結金具:
アルミ合金

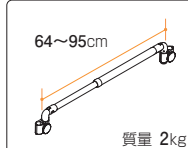

品名	伸縮つながるくん
品番	CKE-D
JANコード	4979652525529
TAISコード	00055-000157

●伸縮つながるくん別売品

伸縮つながるくんカバー CKE-DK


アルミパイプ部の冷たさを軽減する専用のカバーです



7,821円(税抜7,110円)
JANコード | 4979652526984

段差昇降からの
歩行もサポート!

■ベッドサイド設置-組合わせ例

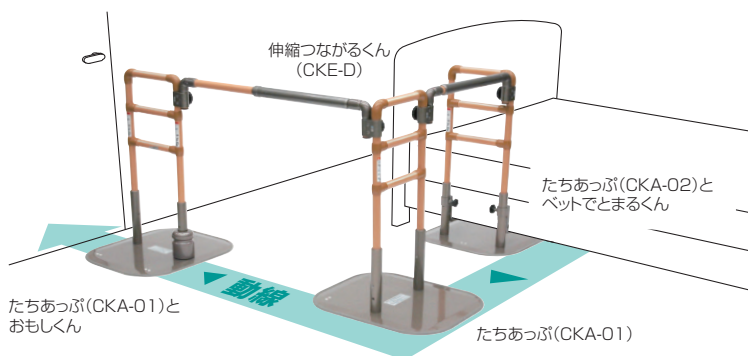

■あがりかまち設置例




■機能ポイント

POINT 1 伸縮機能



「締め付けキャップ」をゆるめて伸縮すれば64cm～95cmまで無段階に調整ができます。調整後はしっかりと「締め付けキャップ」を締めて固定してください。

POINT 2 上下角度調整機能

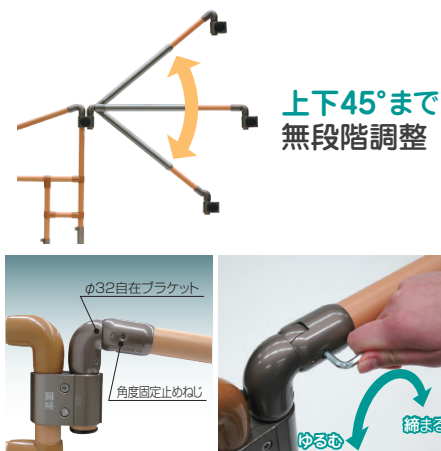

「φ32自在ブラケット」についている、「角度固定止めねじ」をゆるめれば水平から上下45°まで調整できます。調整後はしっかりと「角度固定止めねじ」を締めて固定してください。


POINT 3 左右角度調整機能




「連結金具」の「ツマミ」をゆるめて調整すれば、可動範囲内において無段階で調整できます。調整後はしっかりと「ツマミ」を締めて固定してください。

■組み合わせポイント -たちあがぶ本体は最大3台まで連結可能-

最大3台の「たちあがぶ」、「あがりかまち用たちあがぶ(ミニ)」が連結可能です。「あがりかまち用たちあがぶ(ミニ)」とCKA-04を2台連結すると、かまちから最大約3.6mの導線をサポートします。(画像はCKA-01との接続例:かまちから約2.7m)

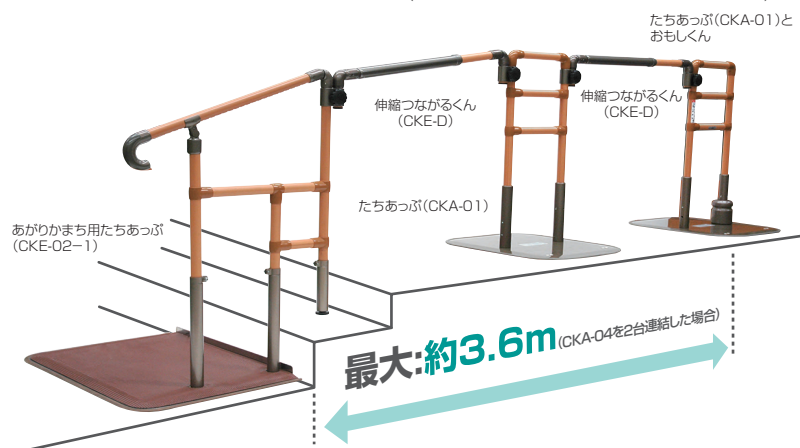

伸縮つながるくんを使えば、10cm以下の段差であれば「たちあがぶ」同士を連結させることができます。

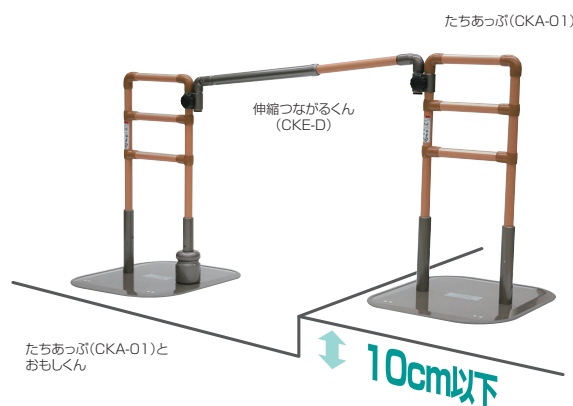

「伸縮つながるくん」を使用する場合は別途オプション品の「ベッドでとまるくん」、「おもしろくん」を取付けてご利用ください。
※取付方法は取扱説明書をご確認ください。



●製品の仕様は改良の為、予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。 ●記載価格の総額表示は、消費税10%の価格です。

矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護機器部
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

■北海道支店
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■東京支店
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

■大阪支店
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

■仙台支店
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■神奈川支店
〒257-0024 神奈川県横浜市名古木3-4
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■広島支店
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

■関東支店
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276-38-1511 FAX 0276-38-3522

■名古屋支店
〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

■九州支店
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

介護支援ページ
kaigo-web
<https://www.kaigo-web.info/>



お問い合わせ先