



福祉用具 総合カタログ

2025-2026

VOL.
23

介護される人の安心、介護する人のゆとり。



矢崎化工株式会社

介護される人の安心、
介護する人のゆとり。

ヤザキの 安心品質

1980年代初頭、矢崎化工株式会社ではイレクターを活用した
病院・施設内における設備改善の提案活動をしていました。
この頃、セラピスト（作業療法士・理学療法士）の皆様が、
イレクターをホームセンターで購入して患者さんに合わせた
リハビリ訓練用具・自助具を製作していたことを知りました。
当社も患者さんの在宅生活のお手伝いができるのではないかと考え、
イレクターを使った、人にやさしい福祉用具の開発をはじめました。
私たちは、これからもご利用者様やセラピストの皆様と共に生活を豊かにする
「人にやさしい福祉用具」を求め続けます。



ヤザキの安心品質

コンセプト

1



safety
セーフティー

「人にやさしい福祉用具」を求めつづけます…。

介護される人、する人が「より快適な暮らし」を実現することや、
意欲的に「自立」へ向かえるようにしていくためには、
よい福祉用具が生活の一部になることが大切なことです。
ひとりでも多くの皆様に喜んでいただき、
少しでも社会に貢献するために、安全で安心してお使いいただける、
「人にやさしい福祉用具」を求めつづけています。



ヤザキの安心品質

コンセプト

2




quality
クオリティー

人にやさしい福祉用具開発と万全の品質管理で
確かな安心をお届けいたします。

より「人にやさしい福祉用具」を目指して、使う人の気持ちを考えて設計し、一つ一つの部品や材料まで気を配り皆様の信頼と安心に応えていける製品をお届けします。



最新の設計ツールを駆使し、
使いやすさを追求した暮らしに合った
最適な福祉用具を開発します。

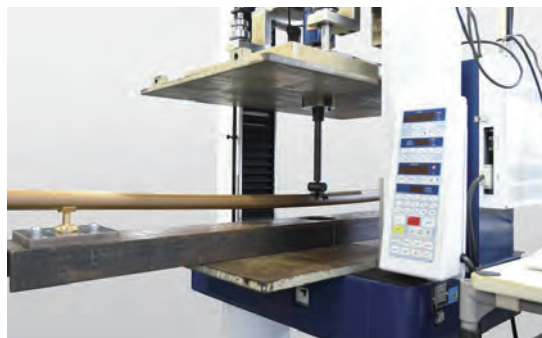

厳しい品質管理体制のもと、
安心して快適にご使用いただける
高品質な製品をお届けします。

ヤザキの安心品質

コンセプト

3



service

サービスネットワーク

全国の営業拠点で
安心のサービスをいつも身近に。

お客様のニーズにスピーディーに対応できる体制を全国の営業拠点を軸に展開しています。介護される人、介護する人がより快適な暮らしを実現することや自立へ向かうための活動を微力ながらも、積極的にお手伝いしていきたいと考えます。

見て、触れて、試す。

お客様のご希望に応じたカリキュラムで、「福祉用具研修会」も実施いたします。当社の福祉用具を実際に「見て、触れて、試す」ことができるよう、福祉用具を現場に複数持ち込み、お伺いする「福祉用具出張展示会」も行っています。





「手すりといえはこれ！」
 というほど
 知名度 No.1 ですね



使用シーンに合わせて
 種類がたくさんあって、
 「なるほどな」
 ってなります。

便利でおすすめ
 定番の手すり
 です！



床置き型手すりの代名詞

おだけシリーズ®
たちあっぷ®



安全・安心な自立、介助支援を求めて
 「たちあっぷ®」は進化し続けます。

工事をせずに手すりを構築することができる床置き型手すり「おだけシリーズたちあっぷ」。「おだけシリーズたちあっぷ」を活用することで、立ち上がりや移動、動作の補助を行うことができます。転倒などの事故を予防し、自力での動作が可能になったり、介助者の負担を減らすことが可能になります。

安定感バツグン！
 ベースがコンパクト！
 活用シーンが多くて
強い味方！




「あがりかまち用」
 とっても重宝してます！
組み合わせ
 ろう下までサポート
 できて助かる



初めてたちあっぷを
 見たとき感動しました。
**作った人
 すごい**



たててすり
待ってました！
 つばらなくていいので
 おすすめしやすいです

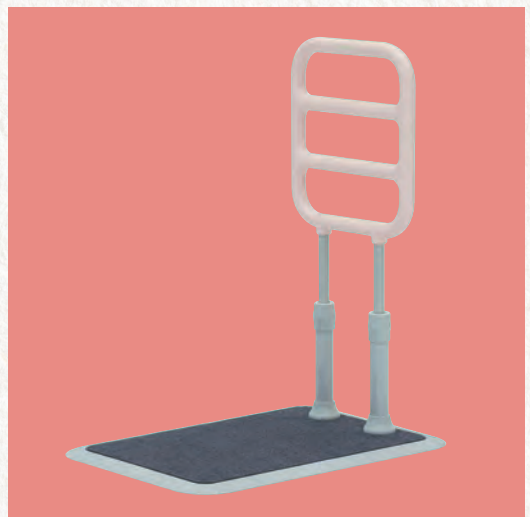

CONTENTS



1 章

立ち上がり・歩行補助商品

P.9-48

- 10 活用ポイント MAP
- 12 たちあっぷ サムリング
- 19 たちあっぷ サムリング ベッドでとまるくん
- 20 たちあっぷ サムリング かいじょくん
- 22 たちあっぷⅡ ハイタイプ
- 23 たちあっぷⅡ たててすり
- 24 たちあっぷⅡ
- 26 伸縮つながるくん
- 27 かいじょくん
- 27 ベットでとまるくん
- 27 おもしろくん
- 27 たちあっぷマット
- 28 あがりかまち用 たちあっぷ
- 30 あがりかまち用 たちあっぷミニ
- 32 たちあっぷ 540
- 34 たちあっぷⅡ (万能型)
- 35 つながるくん XP
- 36 たちあっぷシリーズ選定理由例
- 37 ヒヤリハットの事例
- 42 TAIS コード一覧
- 47 JAN コード一覧



2 章

入浴補助商品

P.49-70

- 50 活用ポイント MAP
- 52 オーダーメイドの福祉用具
- 54 オーダーシステム
(エレクター製シャワーキャリー・シャワーいす)
- 56 オーダーシステム 製作例
- 58 入浴補助用具の選び方
- 59 すのこ
- 60 フォアアクセスすのこ
- 62 エコボードすのこ
- 63 ライトボードすのこ
- 64 浴そう内いす / 浴そう内すのこ
- 66 シャワーいす
- 67 シャワーキャリー
- 68 シャワーキャリー トイレットタイプ
- 69 TAIS コード一覧
- 70 JAN コード一覧



3 章

トイレ介助商品

P.71-78

- 72 活用ポイント MAP
- 73 たちあっぷⅡ たててすり
- 74 トイレ用 たちあっぷⅡ
- 76 シャワーキャリー フロントレストタイプ
- 78 TAIS コード一覧
- 78 JAN コード一覧



4 章

病院・施設用福祉用具

P.79-98

- 80 活用ポイント MAP
- 82 たちあっぷひざたっち C 回転式 たててすり
- 83 たちあっぷひざたっち C 回転式
- 84 たちあっぷⅡ 浴室用
- 86 浴そう内 たちあっぷ
- 87 浴そう用手すり
- 88 シャワーいす
- 90 シャワーキャリー
- 92 シャワーキャリー トイレットタイプ
- 94 浴そう内いす / すのこ
- 95 湯上りベンチ
- 96 前受けテーブル
- 96 背もたれ
- 97 スイングフレーム
- 98 JAN コード一覧



5 章

病院・施設用設備商品

P.99-108

- 100 活用ポイント MAP
- 102 おむつ交換台車
- 104 キャリーワゴン / バスケットカート
- 105 病院・施設環境整備
マット運搬カート、ポリトラ、
ミニポリトラ、収納ラック、移動棚



6 章

施工品 手すり部材

P.109-199

- 110 オーダーシステム
(エレクター製ステップ台・手すり付ステップ台)
- 112 オーダーシステム 製作例
- 116 発泡スロープ
- 118 屋外手すり部材 NEXTAIL シリーズ
- 131 屋外手すり部材 スタンダードシリーズ φ 34
- 142 屋内手すり部材
パイプ・木製丸棒・取付ベースφ 35 / φ 32
- 146 屋内手すり部材 tenacious シリーズ φ 35
- 153 屋内手すり部材 スタンダードシリーズ φ 35
- 168 屋内手すり部材 スタンダードシリーズ φ 32
- 176 浴室手すり部材 インナー / アウター φ 32
- 187 可動式手すり
- 190 手すり部材 INDEX JAN コード一覧
- 199 手すり部材 品番索引

ヤザキの福祉用具総合サイト *Kaigo-web*



介護支援ページ *Kaigo-web*

<https://www.kaigo-web.info/>

矢崎化工株式会社では、福祉用具を開発・販売するとともに、製品案内をはじめ、在宅・施設での問題解決事例を目的別やシーン別に検索できるコンテンツなど福祉用具に関わる情報をまとめた介護支援総合サイト「kaigo-web」を公開しています。

ヤザキの取り組み ユア・サポーター活動


全国の介護現場へ、研修会にお伺いするユア・サポーター活動を行っています。介護にたずさわるすべてのの方々をサポートし、日々の業務や活動のお困りごとやお悩みにお応えする研修です。

全国の介護現場へ、研修会にお伺いします。

日々の業務、活動でお悩みの事はありませんか？福祉に関するさまざまな悩みにお応えする、ヤザキのユア・サポーター活動を行っています。



シーン別や目的から製品を検索することもできます。

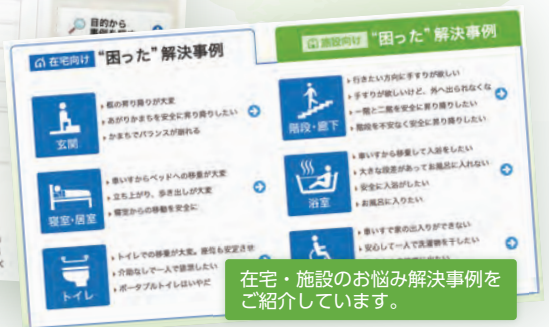

在宅・施設のお悩み解決事例をご紹介します。

Web発注システム

<https://www.yzk-shop.com/>

介護福祉事業者のお取引先様のみご利用いただけるオンラインショップサイトです。パソコン・タブレット・スマートフォンからいつでもどこでも発注することができます。ぜひご利用ください。



ヤザキのオンラインショップサイト Web発注システム

様々な方法でご注文できます。



● 詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。



1章


立ち上がり・歩行補助商品



「すぐ、つかまれる」
という安心を。

ベッドサイドやソファからの立ち上がり・廊下や段差の歩行などをサポートする製品をご紹介します。


活用ポイントMAP

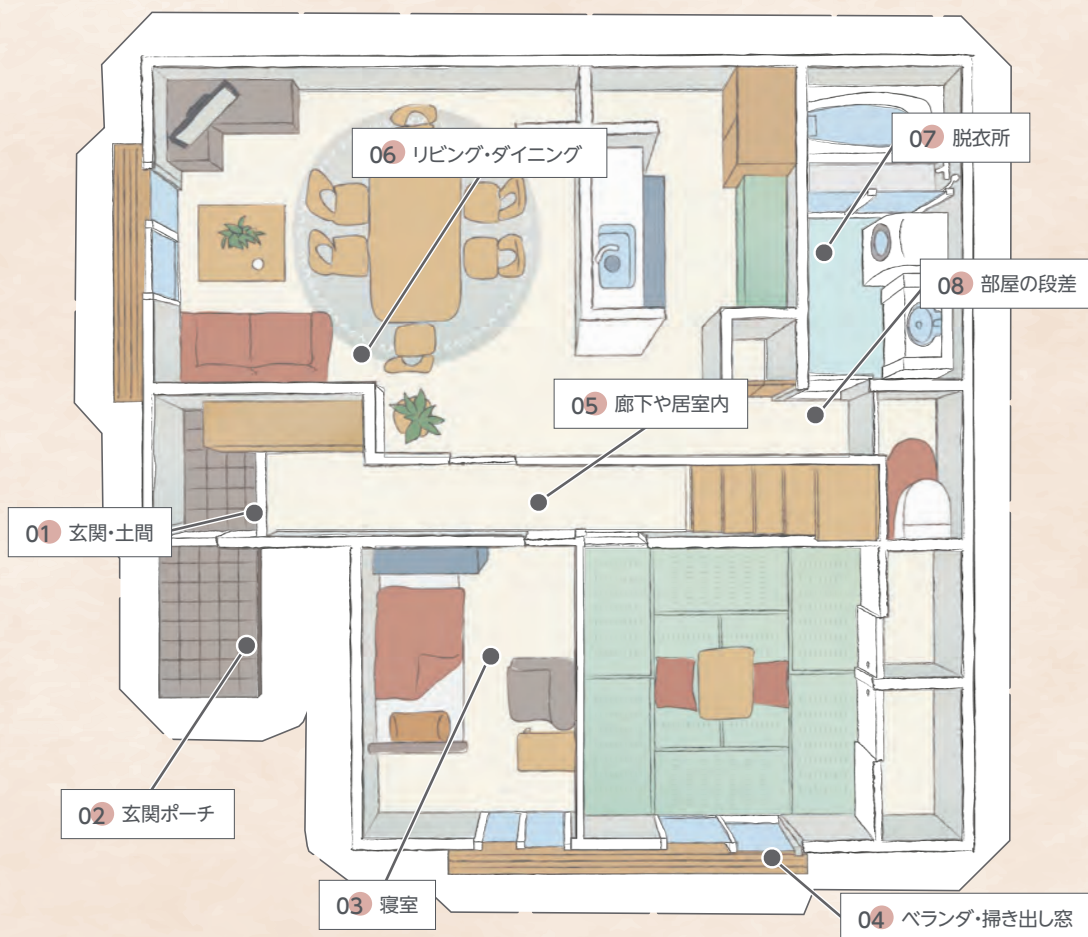


01 玄関・土間

玄関段差のサポート

あがりかまち用 たちあつぷ ▶P.28

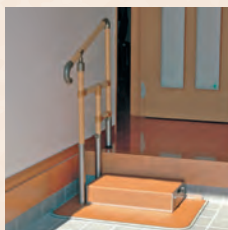

CKE-02 MB

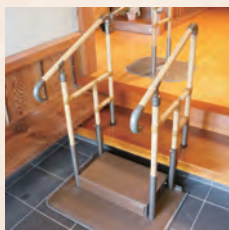

CKE-01 MB



CKE-D

オプションを組み合わせるとさらに便利
伸縮つながるくん ▶P.26

あがりかまち用 たちあつぷミニ ▶P.31



CKG-04 MB



CKG-03 MB



CKG-04 MB

02 玄関ポーチ

玄関の手すりもおくだけ

たちあつぷII+つながるくんXP ▶P.34、P.35



CKH-21 + CKH-D90

03 寝室

起き上がり、立ち上がり動作をサポート

たちあつぷ サムリング ▶P.19



CKM-02

サムリング かいじょくん ▶P.20




CKM-K

たちあつぷII ハイタイプ ▶P.22



CKA-31

たちあつぷII たててすり ▶P.23

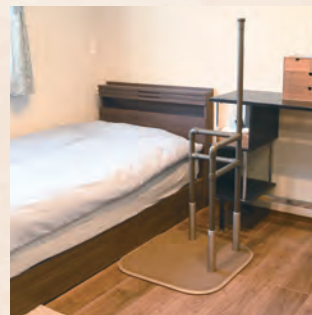

CKI-31

たちあつぷII ひざたっち ▶P.25



CKI-22

かいじょくん ▶P.27



CKA-K

04 ベランダ・掃き出し窓

屋外でも使える置き型手すりで気軽に設置

たちあつぷII ▶P.34

たちあつぷ540 ▶P.32



CKH-21



CKH-03 MGR



CKH-02 MGR

05 廊下や居室内

廊下などの歩行をサポート

たちあつぷII ▶P.24

伸縮つながるくん ▶P.26

サムリング ▶P.19



CKA-24



CKA-31



CKM-04

06 リビング・ダイニング

椅子からの立ち上がり

たちあつぷ
サムリング
▶P.19



CKM-02W

たちあつぷII
たててすり
▶P.23



CKI-31

07 脱衣所

ドアの開閉時や着替え時にも

たちあつぷII
ハイタイプ
▶P.22




CKA-31

08 部屋の段差

ちょっとした段差にも

あがりかまち用
たちあつぷミニ
▶P.30

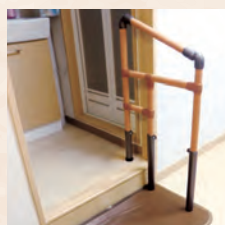

CKG-04 MB

- P.42 ~ TAIS コード一覧
- P.47 JAN コード一覧
- P.36 ~ シリーズ選定理由




たちあっぷ® サマリング®




長年ご愛顧いただいているたちあっぷがデザインを一新し、生まれ変わりました。
丸みを帯びた柔らかなフレームと5色から選べるマットで
ご利用者様に愛着をもっといただける手すりを目指しました。

家具のよう
置き型手すり

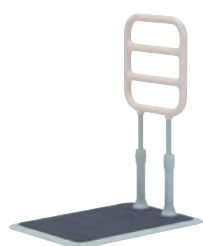

CKM-02

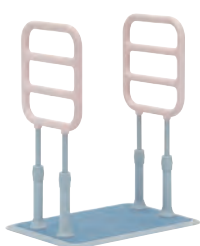

CKM-02W



CKM-04

IMAGE
MOVIE



サレリング®のある生活

利用場面に合わせてお選びいただけるよう3タイプをご用意いたしました。




1

standard type

< スタンダードタイプ >

CKM-02

スタンダードタイプです。
ベッドや、ソファなどからの立ち上がり補助ができます。
部屋や廊下に単体で置くことで、壁に取り付けた手すりまでの補助にも使用できます。

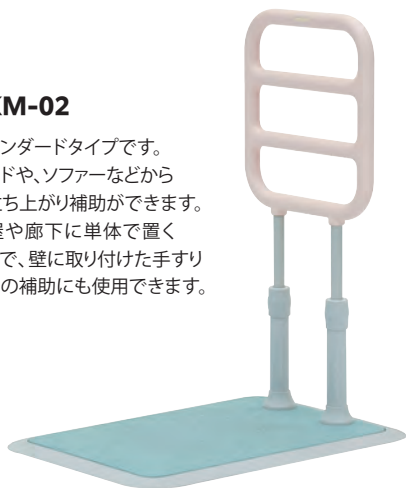

2



3



4

1: 毎日の暮らしにそっと溶け込むデザイン 2: ソファの前設置例
3: ベッドの横には「ベッドでとまるくん」をつけ安定性を向上 4: 洗面台の前設置例

double type

〈ダブルタイプ〉




1

1: ソファの前設置例 2: ベッドの横設置例

CKM-02W

両サイドの手すりにつかまりプッシュアップすることで、より安全に立ち上がることができます。低い段差なども手すりを持って、昇降することができます。

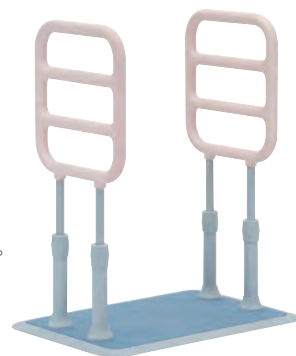

2



1



2

long type

〈ロングタイプ〉



3

1: 立ち上がる時の支えに 2: 歩き出しもしっかりサポート 3: キッチン設置例



CKM-04

ベッドの転落防止サイドレール兼、立ち上がり補助手すりや、ベッドと壁に取り付けた手すりまでの動線確保手すりとして使用できます。廊下単体でも歩行支援として活用できます。

たさあっぷ
サレリング
の
ポイント






おしゃれなデザイン


やさしい 丸いフォルム

やさしい印象を与える
親しみやすい丸みを
帯びた形の手すりです。

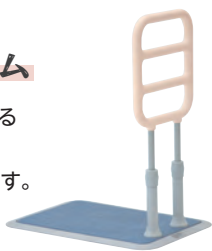

5色の選べる マットカラー

お好みに合わせて、マットの
色をお選びいただけます。

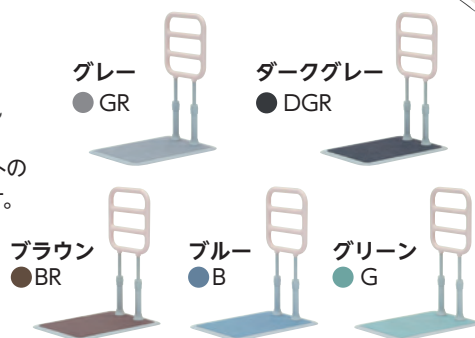

こだわりの手すり

優しい にぎり心地

ソフトでつなぎ目のない
シームレスなデザインです。




にぎりやすい ディンプル形状付き

すべりにくく、にぎりやすいディンプル形状
は、握力が弱い方でも手に馴染みます。




最大手すり高さ 90cm

高身長の方にも使いやす
なっています。

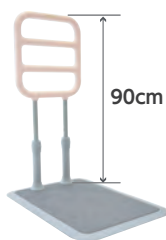

夜間でも視認可能 蓄光ポイント付き

手すりには蓄光ポイントが入っているため、
夜間でも手すりの位置がわかります。

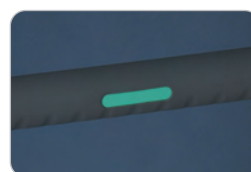

便利で安心のベース

どこにでも置ける コンパクトサイズ

ベースの長辺は72.5cm、短辺
は50.5cmです。様々なシーンで
お使いいただけるようベース
サイズをコンパクトにしました。



滑り止め付きの ベース裏

ベース裏面に滑り止めが
ついており、横ずれを防止
します。



すり足でもつまずきにくいなだらかスロープ

ベース端部がなだらかなスロープ形状になりました。生活動線上で使ってもベースの厚みが
支障とならず、すり足でもスムーズにベースに乗ることができ、安全にご使用いただけます。





設置らくらく

工具いらずの新スタンド

サムリングのスタンドは、工具を使わず組み立て、高さ調整が可能です。




持ち運びしやすい

ベース

持ち運びがしやすいよう、ベースに取っ手が付きました。



組立方法

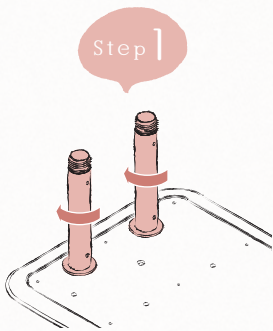

Step 1
スタンドを手で回して
ベースに取り付ける



Step 2
増し締め
ドライバーや棒を差し込み
増し締める




Step 3
スタンドカバー
セット状態

スタンドカバーをセットする



Step 4
設定する高さに
パイプ止めを取り付ける

高さ調整ができます

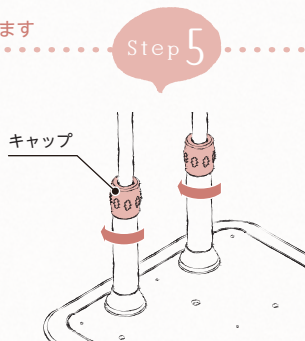

Step 5
フレームをスタンドに差し込み
キャップを締め付ける



Step 6
マットを取り付けて
組み立て完成


詳しくはサムリング組立手順画をご確認ください



シリーズ共通情報


品番	CKM-02・CKM-02W・CKM-04		
材質	手すりフレームセット (手すり)ウレタン樹脂 被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、 (その他)プラスチック ベースセット (ベース板 表面)スチール、 (その他)プラスチック マット (表面)ポリエステル樹脂、 (吸着部分)アクリル樹脂	共通仕様	手すり太さ：φ35 ベースサイズ：72.5×50.5cm ベース厚さ：1.3cm 高さ調整：80・85・90cm 3段階 マットカラー：グレー (GR) ●・ダークグレー (DGR) ●●・ ブラウン (BR) ●●●・ブルー (B) ●●●●・グリーン (G) ●●●●●

たちあっぷ サムリング

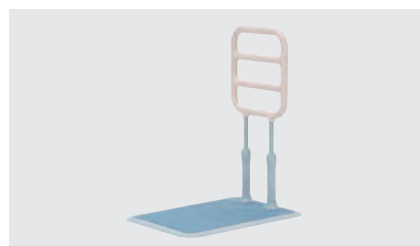

CKM-02

オープンプライス

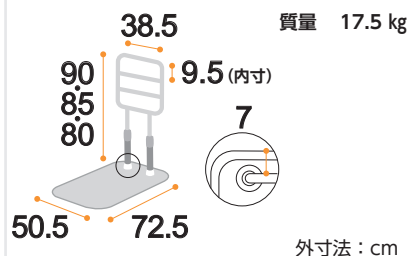


- 品番
- CKM-02 SET GR
 - CKM-02 SET DGR
 - CKM-02 SET BR
 - CKM-02 SET B
 - CKM-02 SET G



CKM-02W

オープンプライス

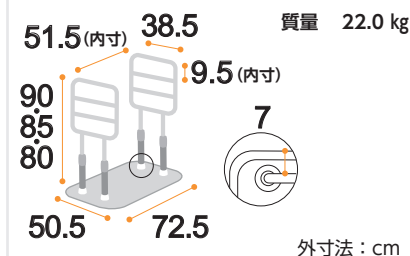


- 品番
- CKM-02W SET GR
 - CKM-02W SET DGR
 - CKM-02W SET BR
 - CKM-02W SET B
 - CKM-02W SET G



CKM-04

オープンプライス

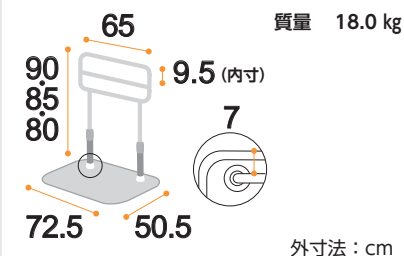

- 品番
- CKM-04 SET GR
 - CKM-04 SET DGR
 - CKM-04 SET BR
 - CKM-04 SET B
 - CKM-04 SET G

+ オプション品 サムリング ベッドでとまるくん

ベッドで使用する際の安定性を高めます。

Point 1

後付けOK! 取付けも簡単

後付けができるようになりました。可動部をツマミで締め付けて固定します。

- 取付けイメージ ●取付け方法



Point 2

ベッドにピッタリつく!

アームの角がベッドにぴったりつく構造になっています。



Point 3

左右パーツ兼用

部品は全て左右パーツ共通です。



サムリング ベッドでとまるくん

CKM-CK

オープンプライス

- 寸法
ベッド下部取付可能高さ：2.5cm～30cm
- 材質
本体：アルミ合金・ゴム
ツマミ：ステンレス、プラスチック
六角穴付きねじ：ステンレス

●このページの掲載品は、約2～4日でお届けいたします。 ●TAISコードは、P.42を参照してください。

⚠️注意 他社製品と組み合わせて使用しないでください。

居室内での立ち上がり・歩行補助

おだけシリーズ®

たちあっぷ® サムリング® かいじょくん

サムリングに取り付けてL型手すりを構築



Point 1


L型手すりの構築！

サムリングとかいじょくんを組み合わせることでL型手すりが構築できます。

立ち上がりが安定



歩き出しがスムーズに

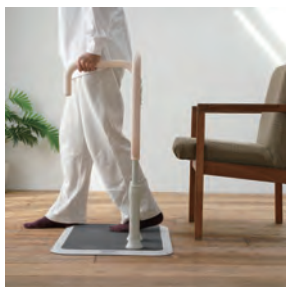

Point 2

設置バリエーション

ベースに乗って「かいじょくん」を使用する場合はベッドサイド以外の場所でも使用可能です。リビングや洗面所など、設置の幅が広がります。

Point 3

足元すっきり

かいじょくんの下に支柱がないため、使用時に動作の邪魔になりません。

取扱説明書
はこちら




かいじょくんで サムリング®の使い道が広がる！



サムリング かいじょくん CKM-K

- 仕様
質量：1.1kg
手すり太さ：φ35
- 材質
フレーム：ウレタン樹脂被覆
スチールパイプ
連結金具：アルミ合金
ネジ・ボルト：ステンレス

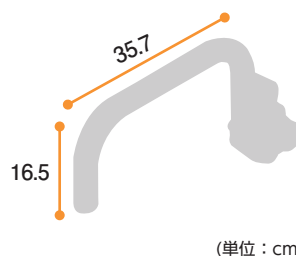

ベッドサイド設置例

サムリング CKM-02



サムリングCKM-02、かいじょくんCKM-K

サムリング CKM-02 ベッドでとまるくん



サムリングCKM-02、かいじょくんCKM-K、ベッドでとまるくんCKM-CK

サムリング CKM-04 ベッドでとまるくん



サムリングCKM-04、かいじょくんCKM-K、ベッドでとまるくんCKM-CK

サムリング CKM-02 かいじょくんを下段に取り付けた場合



サムリングCKM-02、かいじょくんCKM-K

ベッドサイド以外の設置例



1人掛けソファ



ソファ



洗面所



トイレ

さらに詳しい
情報はこちら！

TAIS コード ▶ P.43

JAN コード ▶ P.47

選定理由例一覧 ▶ P.36

製品 HP ▶



居室内での立ち上がり・歩行補助

商品紹介動画
はこちら

✓ 介護保険 貸与 おくだけシリーズ® **たちあっぷ® II** ハイタイプ

身長の高い方にも使いやすい「たちあっぷ」



Point 1

身長が高い方も使いやすい！

ベッドサイドでの前方へのつかまり立ちや立位保持・歩行補助など、身長の高いご利用者様にも使いやすいハイタイプの「たちあっぷ」です。

Point 2

最大手すり高さ 1メートル

手すりの高さは 85・90・95・100cm の 4 段階で調節ができます。



Point 3

手すりカラー「ダークブラウン」

どんなお部屋にも馴染みやすい、落ち着いたダークブラウンを採用しています。

シリーズ共通情報


品番	CKA-31
材質	手すり：プラスチック被覆スチールパイプ 手すりジョイント：プラスチック ベース・スタンド：ステンレス、ゴム（縁部） マット：ポリエステル（表面）、アクリル樹脂（裏面）
仕様	ベースサイズ：66 × 66cm 質量：19.0kg 手すり太さ：φ 32 ベース厚さ：1.6cm 高さ調整：5cm 間隔 4 段階

たちあっぷ II



CKA-31

98,340 円 (税抜 89,400 円)

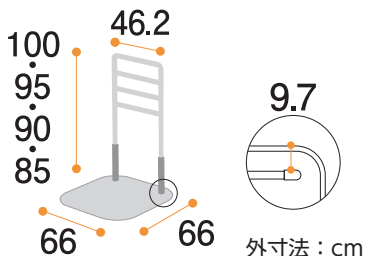

組み合わせアイデア



玄関の段差にたちあっぷ II ハイタイプ同士を伸縮つながるくんで連結して設置。
土間側の手すりを高めに設定でき、安全に段差を降りられるようになりました。

オプション「蓄光リング」



蓄光リング CKA-JB170 10 個
2,783 円 (税抜 2,530 円)

●仕様
本体：プラスチック、両面テープ付
入数：10 個
たてですりにも取り付けられます。

商品紹介動画
はこちら



✓ 介護保険 貸与 おくだけシリーズ® たちあっぷ® II たてですり

置くだけで設置できるタテ型手すり




Point 1

置くだけのタテ型手すり

使いたい場所に置くだけでタテ型の手すりが設置できます。

L型の手すりも備え、立位保持や移乗の際にご利用者様がつかみやすい手すり構造で安心です。

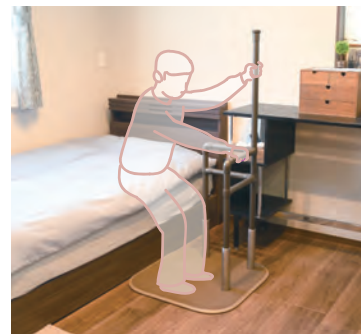

Point 2

手すり高さは調節可能

横手すりは73・78・83・88cmの4段階に調節できます。縦手すりは横手すりに連動し、最大149cmになります。

Point 3


手すりカラー「ダークブラウン」

どんなお部屋にも馴染みやすい、落ち着いたダークブラウンを採用しています。

シリーズ共通情報

品番	CKI-31
材質	手すり：プラスチック被覆スチールパイプ 手すりジョイント：プラスチック ベース・スタンド：ステンレス、ゴム（縁部） マット：ポリエステル（表面）、アクリル樹脂（裏面）
仕様	ベースサイズ：66 × 66cm 質量：20.9kg 手すり太さ：φ 32 ベース厚さ：1.6cm 高さ調整：5cm 間隔 4 段階

たちあっぷ II

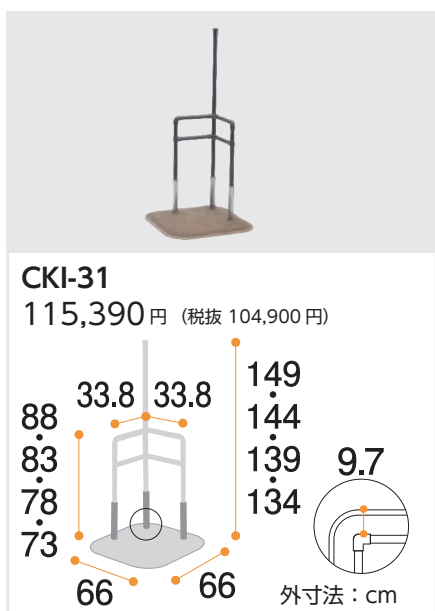

居室内での立ち上がり・歩行補助

✓ 介護保険 貸与 おくだけシリーズ® **たちあっぷ® II**

コンパクトなベースで、立ち上がりや歩行をサポート。



Point 1

コンパクトなサイズのベース

66cm×66cmのベースで廊下やトイレなどの狭い場所でも設置しやすいサイズです。

Point 2

利用シーンに合わせた手すり形状

手すりの形状

膝当て

幅が広い手すり
(幅 46cm)
CKA-24移乗に特化した
大型手すり
CKI-21
CKI-22膝当てで膝を支えて
膝折れを防止します。
CKI-22

Point 3

メンテナンス性の向上



スタンドの取り付けをベースの上から行うことができます。



縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換ができます。

シリーズ共通情報

品番	CKA-22～CKA-24・CKI-21～CKI-22
材質	手すり：プラスチック被覆スチールパイプ 手すりジョイント：プラスチック スタンド：ステンレス ベース：ステンレス、ゴム（縁部） マット：ポリエステル（表面）、アクリル樹脂（裏面）
共通仕様	手すり太さ：φ32 ベース厚さ：1.6cm 高さ調整：5cm 間隔 4段階

たちあっぷ II

CKA-24
92,400円 (税抜 84,000円)

質量 18.4 kg

85
80
75
70
66 66
46.2
9.7
外寸法：cm

CKA-22
90,420円 (税抜 82,200円)

質量 18.4 kg

85
80
75
70
66 66
33.8
9.7
外寸法：cm

※フレームは、CKA-01-1/02-1、およびCKA-11/12と共用できます。

CKA-23
105,820円 (税抜 96,200円)

質量 20.4 kg

85
80
75
70
66 66
33.8 33.8
9.7
外寸法：cm

※フレームは、CKA-13と共用できます。


たちあっぷⅡ でらっくす




CKI-21

112,420円 (税抜 102,200円)

膝当て無

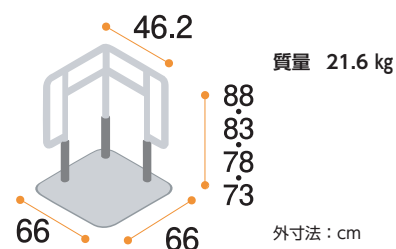


たちあっぷⅡ ひざたっち

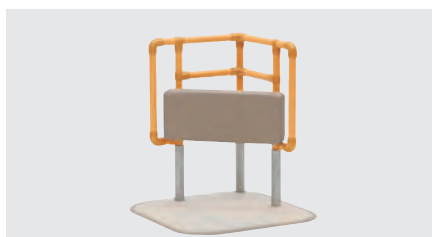

CKI-22

143,660円 (税抜 130,600円)

膝当て付

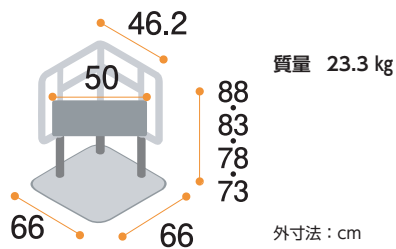

立ち上がり移乗に不安がある方におすすめ

CKI-21・CKI-22は手すりサイズが46.2×46.2cmと広く、つかめる場所が多いため体を支えやすくなっています。また、CKI-22(ひざたっち)は膝当て付きで、膝を支えて前方への転倒を防ぐことができます。



ひざたっちで自立支援型介助




大きな手すりですべてを支え、膝当てで膝を支えるので、立ち上がりが不安な方のご自身での立ち上がりをサポートできます。また、介助者の方は腰への負担が大きい前方介助ではなく、ご利用者様に手すりを使って立ち上がってもらうことで、腰を支えるだけの負担の少ない介助ができます。膝当てで前方への転倒リスクが下がるので後方から介助することが可能です。

前方介助は、負担が大きくケガのリスクも高くなります。




後方からの介助は、立ち上がりの重心移動を促す自立支援型介助です。

ご利用シーン例

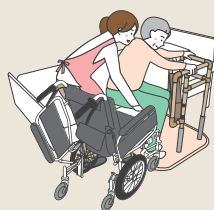

ベッド ◀▶ 車いす

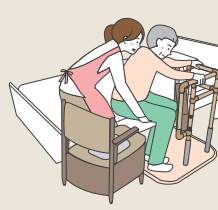


ベッド ◀▶ ポータブルトイレ



車いす ◀▶ 便器

たちあっぷ オプション品との組み合わせ

別売品の連結手すり「伸縮つながるくん」や「かいじょくん」などと組み合わせて使用することでサポート範囲が広がります。

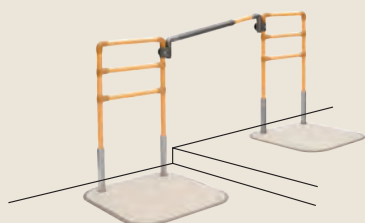

CKA-24
+伸縮つながるくん (CKE-D)



CKA-01
+ベッドでとまるくん (CKA-CK MB)



CKA-02-1+たちあっぷマット
(CKA-DB 5マイリ BE)
+かいじょくん (CKA-K)

居室内での立ち上がり・歩行補助

オプション品対象品番表

**注意** 他社製品と組み合わせて使用しないでください。

▶ 取扱説明書一覧はこちら

※取付条件の詳細は、各オプション品の取扱説明書をご確認ください。

シリーズ名	対象本体品番	オプション品					
		伸縮つながるくん	つながるくん	かいじょくん	ベットでとまるくん	おもしろくん	つながるくんXP
たちあつぷ	CKA-01~04 CKA-11~14	○	○	○	○	○	
	CKA-22~24	○	○	○	○	○	
	CKI-21~22				○	○	
たちあつぷⅡ	CKA-31	○	○	○	○		
	CKI-31	○					
	CKH-21						○
あがりかまち	CKE-01~04 MB CKG-01~CKG-04 MB	○					
	たちあつぷ 540						○

+ オプション品 おくだけシリーズ® 伸縮つながるくん®

玄関での段差昇降や屋内の歩行をサポートします。



伸縮つながるくん
CKE-D
 34,760円 (税抜 31,600円)

- 仕様
質量：2kg
手すり太さ：φ 32/ φ 40
- 材質
手すり：(φ 32) プラスチック被覆スチールパイプ
(φ 40) アルミパイプ
連結金具：アルミ合金



Point 1

長さ調整と上下・左右の角度調整が可能

無段階での伸縮と、上下 45°、左右は可動範囲内で角度調整することができます。


Point 2

アルミパイプ部の冷たさを軽減するカバー

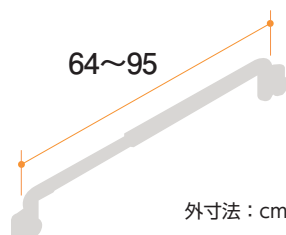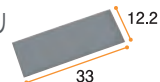別売品 伸縮つながるくんカバー CKE-DK 10 マイリ
7,821円 (税抜 7,110円) (10枚入り)

+ オプション品 おくだけシリーズ® かいじょくん

ベッドサイドでの座位保持や立ち上がり補助、移乗補助に。

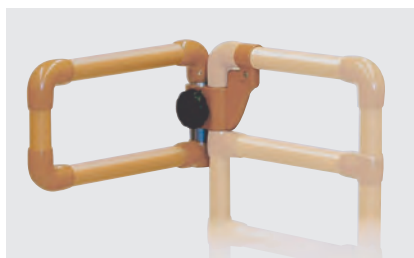

かいじょくん

CKA-K

16,500円 (税抜 15,000円)

Point 1

角度調整可能





● 仕様

質量：1.4 kg
手すり太さ：φ 32

● 材質

手すり：プラスチック被覆スチールパイプ
ジョイント：アルミ合金、プラスチック
取付金具：アルミ合金
ハンドル：プラスチック、真鍮
ボルト：ステンレス

「たちあっぷ」に対して、平行・直角・斜め45°の角度をつけて設置できます。

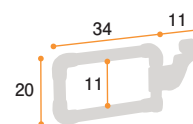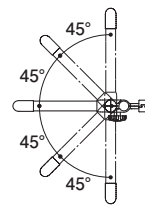


外寸法：cm

+ オプション品 おくだけシリーズ®

ベットでとまるくん

ベッドと床の間に差し込み、「たちあっぷ」の安定性を向上。

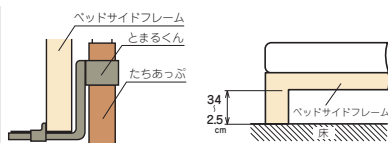

ベッド下部と床面の間寸法は、2.5～34cmに対応します。

ベットでとまるくん

CKA-CK MB

10,670円 (税抜 9,700円)

● 材質

本体：アルミ合金、ゴム
ツマミ：ステンレス、プラスチック

+ オプション品 おくだけシリーズ®

おもしろくん

つながるくん使用時の「たちあっぷ」の安定感を高めたいときに。



質量：5kg

外寸法：cm

おもしろくん

CKA-J MB

10,670円 (税抜 9,700円)

● 材質

本体：スチール
底板：ゴム

+ オプション品 おくだけシリーズ® たちあっぷ® マット

ベースの滑りやひんやり感を抑えたい時に。



たちあっぷ本体対応品番：CKA-01/CKA-01-1/CKA-03



たちあっぷマット

CKA-DA 5 51巾 BE

9,240円 (税抜 8,400円)

● 入数 5枚

● サイズ 47.5 × 57.5cm



たちあっぷ本体対応品番：CKA-02/CKA-02-1/CKA-04



たちあっぷマット

CKA-DB 5 51巾 BE

12,870円 (税抜 11,700円)

● 入数 5枚

● サイズ 47.5 × 87.5cm

シリーズ共通情報

● 材質

表面：ポリエステル
裏面吸着面：アクリル樹脂

段差の上り下り補助・歩行補助

介護保険 貸与 おくだけシリーズ® あがりかまち用 たちあっぷ®

玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかま치의昇降をサポート。



Point 1

対応あがりかまち高さ 4 ~ 36cm

CKE-03/CKE-04 MB は 4 ~ 18cm、CKE-01/CKE-01-1/CKE-02/CKE-02-1 MB は 18 ~ 36cm までのあがりかまち高さに対応しています。

Point 2

握りやすく、高さ調整可能な手すり

ディンプル（くぼみ）付で握りやすい、直径 3.2cm の手すりを採用しています。手すりの高さはあがりかまちの上から 80cm ~ 85cm まで、無段階の調整が可能です。



Point 3

安心のマット・ベース

土足で乗っても滑りにくいマットを標準装備しています。また、ベース前方左右 2ヶ所についているアジャスターで、使用時のがたつきを防止できます。



マット表面




アジャスター

シリーズ共通情報

品番	CKE-01 MB ~ CKE-04 MB		
材質	手すり：プラスチック被覆スチールパイプ、アルミ合金（ジョイント） スタンド：ステンレス ベース：ステンレス、ゴム（縁部） マット：プラスチック	共通仕様	手すり太さ：φ 32 ベース厚さ：1.5cm

対応するあがりかま치의高さ 18 ~ 36cm

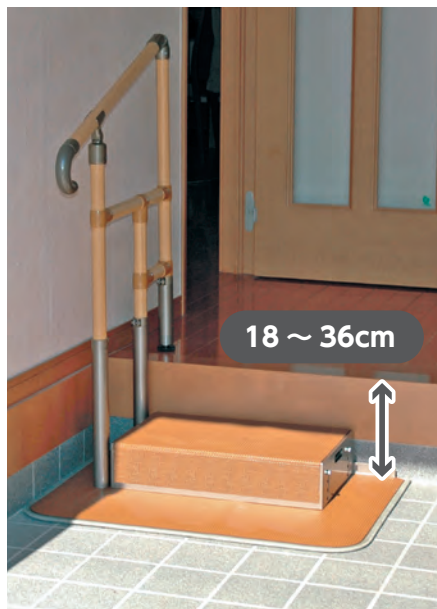

CKE-01 MB・CKE-01-1 MB

CKE-01 MB **ステップ付**
150,590 円（税抜 136,900 円）

CKE-01-1 MB **ステップ無**
127,710 円（税抜 116,100 円）

CKE-01 MB
両手すり
質量 39.7 kg

CKE-01-1 MB
両手すり
質量 32.8 kg

外寸法：cm

CKE-02 MB・CKE-02-1 MB

CKE-02 MB **ステップ付**
115,500 円（税抜 105,000 円）

CKE-02-1 MB **ステップ無**
92,620 円（税抜 84,200 円）

CKE-02 MB
片手すり
質量 33.8 kg

CKE-02-1 MB
片手すり
質量 26.9 kg

※手すり位置は左右どちらにも対応しています。

外寸法：cm

対応するあがりかまちの高さ 4～18cm



CKE-03 MB ステップ台無
 123,090円 (税抜 111,900円)

両手すり
質量 31.8 kg

外寸法：cm

CKE-04 MB ステップ台無
 90,310円 (税抜 82,100円)

片手すり
質量 26.4 kg

※手すり位置は左右どちらにも対応しています。

外寸法：cm

別売品 あがりかまち用 たちあっぷ ステップ台

CKE-B MB
 22,880円 (税抜 20,800円)

質量 6.9 kg

● 材質
 スチール

外寸法：cm

たちあっぷオプション品との組み合わせ







CKE-01-1 MB **伸縮つながるくん** **CKA-24**
 ▶ P.28 ▶ P.26 ▶ P.24

あがりかまち用たちあっぷ (CKE-01-1 MB) とたちあっぷⅡ (CKA-24) を伸縮つながるくんで連結することであがりかまちから次の段、廊下へと手すりを続けていけます。

参考写真▶
 ※あがりかまち用たちあっぷとたちあっぷ (CKA-01) との連結事例です。



段差の上り下り補助・歩行補助


✓ 介護保険 貸与 おくだけシリーズ® あがりかまち用 たちあっぷ® ミニ

集合住宅の小さな玄関にも対応できる、コンパクトなベースのあがりかまち用たちあっぷ。



Point 1

コンパクトなベース

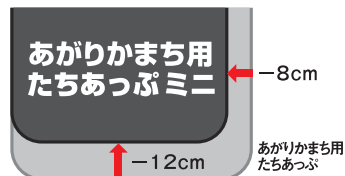

●サイズ比較

あがりかまち用たちあっぷ 幅 78 × 56cm


あがりかまち用たちあっぷミニ 幅 70 × 44cm

スペースに余裕ができ、設置シーンが広がります。

Point 2

握りやすく、高さ調整可能な手すり

ディンプル（くぼみ）付で握りやすい、直径3.2cmの手すりを採用しています。手すりの高さはあがりかまちの上から80cm～85cmまで、無段階の調整が可能です。

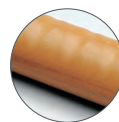


Point 3

安心のマット・ベース

土足で乗っても滑りにくいマットを標準装備しています。また、ベース前面に付いているアジャスターで、使用時のがたつきを防止できます。



マット表面

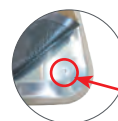

アジャスター


シリーズ共通情報

品番	CKG-01 MB ~ CKG-04 MB		
材質	手すり：プラスチック被覆スチールパイプ、アルミ合金（ジョイント） スタンド：ステンレス ベース：ステンレス、ゴム（縁部） マット：プラスチック	共通仕様	手すり太さ：φ 32 ベース厚さ：1.5cm 対応するあがりかまちの高さ：4 ~ 18cm

対応するあがりかまちの高さ 4 ~ 18cm



CKG-01 MB スライドベース付
156,860円（税抜 142,600円）

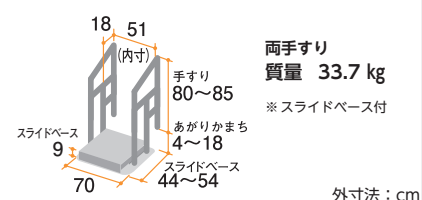


両手すり
質量 33.7 kg
※ スライドベース付

外寸法：cm



CKG-02 MB スライドベース付
124,080円（税抜 112,800円）

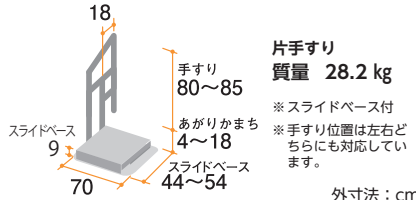


片手すり
質量 28.2 kg
※ スライドベース付
※ 手すり位置は左右どちらにも対応しています。

外寸法：cm

対応するあがりかまちの高さ 4～18cm




CKG-03 MB (スライドベース無)
118,470円 (税抜 107,700円)

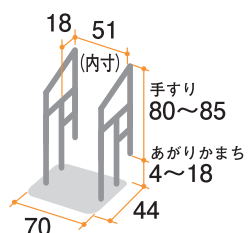

両手すり
質量 26.4 kg
※スライドベース無
外寸法：cm



CKG-04 MB (スライドベース無)
85,690円 (税抜 77,900円)

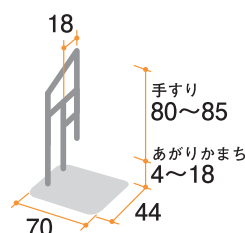


片手すり
質量 20.9 kg
※スライドベース無
※手すり位置は左右、中央に取付可能です。
外寸法：cm

別売品 あがりかまち用 たちあっぷミニ スライドベース



CKG-B
38,390円 (税抜 34,900円)

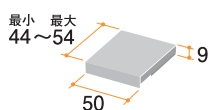


スライド機能
質量 7.3 kg
● 材質
ステンレス

※ 玄関スペースの範囲で
ベースをスライドさせて
伸ばすことができます。

外寸法：cm


スライド機能

玄関スペースの範囲でベースをスライドさせて伸ばすことができます。

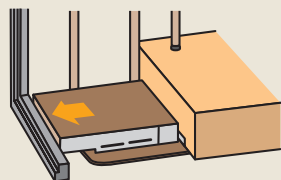

ベース中央に手すり取り付けが可能 (CKG-04 MB)

片手すりタイプ (CKG-04 MB) は手すりをベースの中央に取り付けることもできます。手すりの両側が通れるようになるため、上り下りの際に、体を支えやすい側で手すりを握めます。

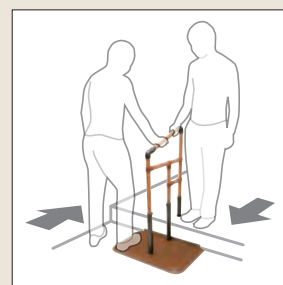

段差の上り下り補助・歩行補助


おくだけシリーズ® たちあっぷ® 540

屋内・屋外で使用でき、高さ 54cm までの段差に対応。



Point 1

握りやすい手すり

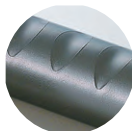

握りやすい直径 3.4cm のディンプル (くぼみ) 付手すりパイプです。

Point 2 (CKH-03 MGR・CKH-04 MGR)


水平手すりは昇降動作を安心サポート



手すりの上部に水平部分があり、手すりをしっかり握って脚を踏み下ろせるので、安心して降りることができます。

Point 3 (CKH-01 MGR・CKH-02 MGR)

高さ・角度調整可能な手すり

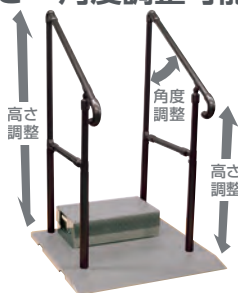

ご使用の状況にあわせて手すり高さ・角度の調整ができます。

シリーズ共通情報


品番	CKH-01 MGR ~ CKH-04 MGR		
材質	手すり：プラスチック被覆ステンレスパイプ、アルミ合金 (ジョイント) スタンド：ステンレス ベース：ステンレス マット：プラスチック	共通仕様	手すり太さ：φ 34 ベース厚さ：3cm

たちあっぷ 540



CKH-01 MGR

186,890 円 (税抜 169,900 円)

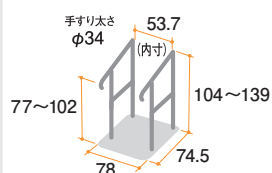
両手すり
質量 34.7 kg

外寸法：cm



CKH-02 MGR

130,020 円 (税抜 118,200 円)

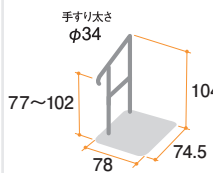片手すり
質量 28.6 kg


※手すり位置は左右どちらにも対応しています。

外寸法：cm


たちあっぷ 540



CKH-03 MGR
183,590円 (税抜 166,900円)

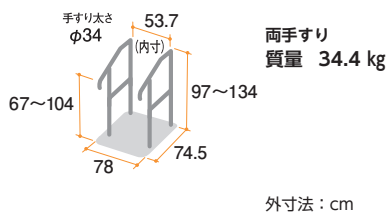


CKH-04 MGR
128,370円 (税抜 116,700円)

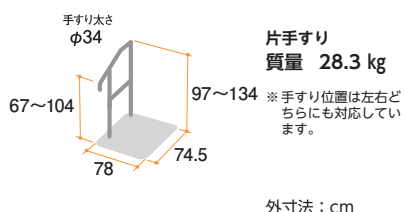



別売品 たちあっぷ 540 ステップ台

シリーズ共通情報


品番	CKH-BL・CKH-BH
材質	ステンレス プラスチック

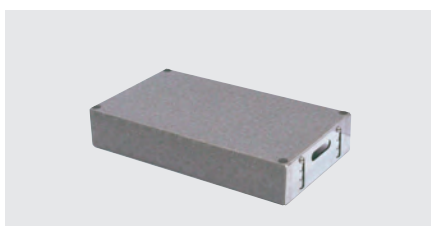

CKH-BL
29,810円 (税抜 27,100円)

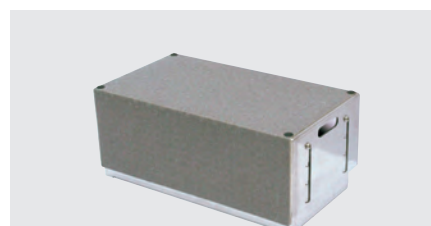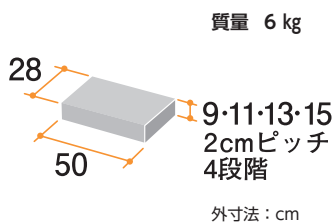


CKH-BH
40,810円 (税抜 37,100円)

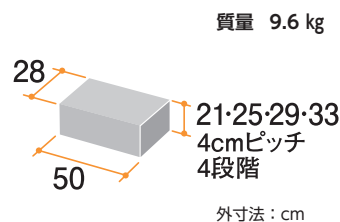


「ステップ台」取り付け仕様バリエーション

1段仕様 設置場所段差目安: 12~36cm

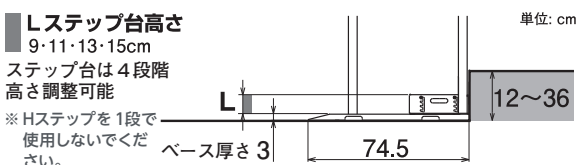

2段仕様 設置場所段差目安: 24~54cm

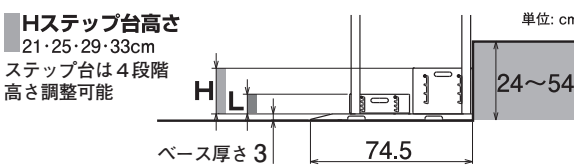

段差の上り下り補助・歩行補助

✓ 介護保険 貸与 おくだけシリーズ® **たちあっぷ® II**

屋内以外にも軒下やベランダでも使用できる万能型のたちあっぷ。



Point 1

屋内・屋外を問わず使用可能



手すり部は、耐候性に優れた屋外手すり仕様です。



ベース表面の土足マットは、滑りにくく、耐候性に優れた素材です。

Point 2

メンテナンス性の向上



スタンドの取り付けをベースの上から行うことができます。



縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換ができます。

シリーズ共通情報


品番	CKH-21		
材質	手すり：プラスチック被覆ステンレスパイプ 手すりジョイント：アルミ合金 スタンド：ステンレス ベース：ステンレス、ゴム（縁部） マット：プラスチック（表面）、マグネット（裏面）	仕様	手すり太さ：φ 34 ベース厚さ：1.6cm 高さ調整：5cm 間隔 4 段階

たちあっぷ II



CKH-21

110,660円（税抜 100,600円）

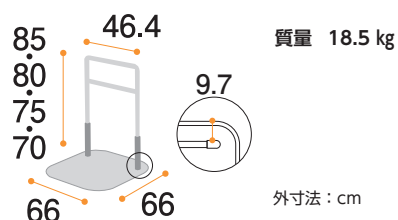

活用事例

玄関ポーチ



玄関フード（風除室）



＋ オプション品 おくだけシリーズ® つながるくん® XP

玄関ポーチや軒下での段差昇降や歩行が不安定な方に。




Point 1

上下・左右に無段階調整で取付可



「たちあつぷⅡ CKH-21」や、「たちあつぷ 540」を連結して軒下などでの歩行動線のサポートができます。伸縮機能付きで長さ調整、左右・上下に角度調整が可能です。

設置時の目安寸法

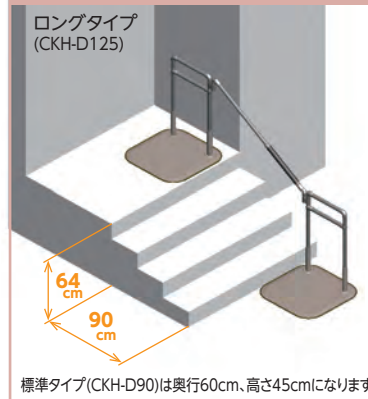

シリーズ共通情報

材質	手すり：(φ 32) プラスチック被覆ステンレスパイプ (φ 40) アルミパイプ 連結金具：アルミ合金 カバー：発泡ポリエチレン
仕様	手すり太さ：φ 32 / φ 40



つながるくん XP

CKH-D90 54,560 円 (税抜 49,600 円)

つながるくん XP ロングタイプ

CKH-D125 57,530 円 (税抜 52,300 円)

伸縮長さ
CKH-D90 64～95cm
CKH-D125 95～129cm



CKH-D90 質量 1.8 kg
CKH-D125 質量 2.1 kg

活用事例

掃き出し窓



玄関階段



たちあつぷ 540
▶ P.32

つながるくん XP
▶ P.35

たちあつぷⅡ
▶ P.34



たちあつぷ 540
▶ P.32

つながるくん XP × 2個
▶ P.35

たちあつぷⅡ × 2個
▶ P.34

たちあっぷ[®]シリーズ選定理由例

選定理由の一例です。ご利用者様の状況に合わせて選定してください。

たちあっぷ[®] サムリング[®]

シリーズ共通選定理由例



- しっかりとしたベースで、安定して設置できる手すりとして選定。
- プラスチックをコーティングした手すりにより冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- やわらかくディンプル形状の手すりので握りやすいので、安心して立ち上がりができる。
- 滑りづらい素材の手すりので、安全に手すりを握める。
- 起き上がり、立ち上がりを手すりにつかまることにより自力で行う機会を増やして、ADLの低下を防ぐために、握って立ち上がりやすく、土台が安定している汎用性のあるレンタル手すりを選定。
- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。
- 土台の端部がスロープ形状でつまずきにくいので選定。
- ベースが小さく、設置がしやすいので選定。
- 手すりを高く設定でき、安定した立位保持ができる。
- 丸い形状で手すりの端まで握みやすいので選定。


品番別選定理由例

CKM-02



- リビングで生活する時間が長く、イス(ソファー)にクッション性があるため、安全に立ち上がりができるよう選定
- 支柱が内側にあるので、歩くときに脚を引掛けにくく、安全に使用できるので選定。
- 壁際に手すりを設置でき、通路を狭めずに設置できるので選定。

CKM-02W

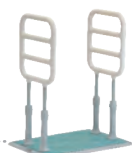

- 両側の手すりを握んでプッシュアップでの立ち上がり動作がし易くなるので選定。

CKM-04



- 壁際に手すりを設置でき、通路を狭めずに設置できるので選定。
- ソファから立ち上がり、歩き出しの動線としても使用できるので選定。

サムリング[®] かいじょくん



- 現在利用しているサムリングに後付けで使用することができるため選定。
- サムリングに対して直角に取付け可能なため選定。
- サムリングを使って立ち上がりやすさを向上させるため選定。
- サムリングを使って立ち上がった後の歩き出しを補助するため選定。

サムリング[®] ベッドでとまるくん



- サムリングをより安定させるため選定。
- サムリングの使用中にベッドからサムリングがズレにくくするため選定。

シリーズ共通選定理由例



- しっかりとしたベースで、安定して設置できる手すりとして選定。
- 蓄光ライン入りで消灯後でも手すりの位置が分かりやすく、安全に使用できる。
- オプション品が豊富なため、状況に応じて使い慣れたもので様々なケースに対応できる。
- プラスチックをコーティングした手すりにより冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- 起き上がり、立ちあがりを手すりにつかまることにより自力で行う機会を増やして、ADLの低下を防ぐために、握って立ち上がりやすく、土台が安定している汎用性のあるレンタル手すりを選定。
- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。

品番別選定理由例

ベースサイズ

CKA-01/03

CKA-02/04

外寸法: cm



CKA-11

CKA-12~14

外寸法: cm



手すり形状

はしご型

コの字型

L型



縁ゴム形状

CKA-11~14



CKA-01

- ベースが小さく、設置がしやすいため選定。
- リビングで生活する時間が長く、イス（ソファ）にクッション性があるため、安全に立ち上がりができるよう選定。

CKA-03

- ベースが小さく、設置がしやすいため選定。
- 手すり部分がベッドより前に出ているため、より安定して立ち上がり可能なため選定。
- 端座位をとった際に肘掛けのように前に取っ手があることで立ち上がりをサポートするよう選定。

CKA-11

- コの字型の手すりです立ち上がりから歩き出しまで、一連の動作ができる。
- 縁ゴムがスロープ形状でつまずきにくいいため選定。

CKA-12

- ベースが小さく、設置がしやすいため選定。
- 縁ゴムがスロープ形状でつまずきにくいいため選定。

CKA-13

- L字型の手すりです立ち上がりから歩き出しまで、一連の動作ができる。
- 手すり部分がベッドより前に出ているため、より安定して立ち上がり可能なため選定。
- 端座位をとった際に肘掛けのように前に取っ手があることで立ち上がりをサポートするよう選定。

CKA-14

- 縁ゴムがスロープ形状でつまずきにくいいため選定。

ヒヤリハットの事例

安全な福祉用具の開発・製造に最善を尽くしておりますが、状況や使い方によっては事故に繋がる恐れがあります。リスクの把握と回避によって事故を予防しましょう。ご利用者様へのご提案・ご説明の際にお役立てください。

床面とベースのわずかな段差につまづき、転倒しそうになる

ベッドへ戻ろうとした際、床置き形手すりのベースにあるわずかな段差につまづき転倒しそうになった



特にすり足の高齢者の場合、ほんの2~3cmの段差でも足を引っかけてしまうことがあります。また、白内障など視覚の障害が起因して、段差を確認しづらい場合もあります。いずれにしても、段差を認識しやすい工夫をすることで、安全を高めることが可能です。

✓参考要因

人：すり足で歩いていた・段差があることに気づいていなかった
モノ：注意表示がなかった・視力が衰えた利用者にはベースが見えづらい色だった
環境：部屋が暗くて足元が見えなかった

シーン 起居・就寝 立ち座り 移動 夜間 場所 寝室 段差・縁石
介護保険の種目 手すり

ベースごと大きく傾き、ひっくり返りそうになる

手すりを引っ張るようにして立ち上がろうとしたため、手すりが傾いてひっくり返りそうになった



床置き形の手すりは、比較的導入が簡単で効果が大きいことから、特に在宅での利用が進んでいます。ただし、手すりを引く（押す）方向によっては不安定になることがあり、使い方には注意が必要です。

✓参考要因

人：手すりが倒れると思っていたりいなかった・力のかけ方によっては倒れてしまう手すりであることを説明していなかった
環境：立ち上がりの動作と床置き手すりの特徴から、安全な使用ができるかどうかの判断をする人が関与していなかった

シーン 起居・就寝 立ち座り 移動 夜間 場所 寝室
介護保険の種目 手すり

たちあっぷ[®]シリーズ選定理由例

選定理由の一例です。ご利用者様の状況に合わせて選定してください。

たちあっぷ[®] II

シリーズ共通選定理由例



- しっかりとしたベースで、安定して設置できる手すりとして選定。
- オプション品が豊富なため、状況に応じて使い慣れたもので様々なケースに対応できる。
- プラスチックをコーティングした手すりにより冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。

品番別選定理由例

L型大型手すり

CKI-21



膝当て

CKI-22



CKA-22

- ベッド（布団）からの立ち上がりを安全にサポートするために選定。
- 蓄光ライン入りで消灯後でも手すりの位置が分かりやすく、安全に使用できる。

CKA-23

- ベッド（布団）からの立ち上がりを安全にサポートするために選定。
- 蓄光ライン入りで消灯後でも手すりの位置が分かりやすく、安全に使用できる。

CKA-24

- ベッド（布団）からの立ち上がりを安全にサポートするために選定。
- 蓄光ライン入りで消灯後でも手すりの位置が分かりやすく、安全に使用できる。
- 前方に手すりを置き、膝に負担がかからないように体重移動ができるため選定。
- ベッドからの立ち上がりを安全にサポートするために選定。

CKI-21

- L字型の手すりなので立ち上がりから歩き出しまで一連の動作ができる。
- 大型の手すりフレームで体を支えやすいため選定。

CKI-22

- 膝当てがあることで、前方へのずり落ちを防げるため選定。
- 膝当てがあることで安定して立位保持が行えるので選定。
- L字型の手すりなので立ち上がりから歩き出しまで一連の動作ができる。



CKA-31

- 高い手すりが高身長な方でも安心して使用できる。
- 高い手すりを使用しやすい方は、握みやすい手すり高さになり安全に使用できる。
- 手すりの高さ・安定性があるので立位の姿勢保持がしやすい。
- ベッドやマットレスの高さがあり立ち座りが困難な場合に、手すり高さがあるため安心して使用できる。
- 前方に手すりを置き、膝に負担が掛からないように体重移動ができる。



CKI-31

- 端座位から縦手すりを使って立ち上がり動作ができる。
- 縦手すりに掴まることで立位保持・立位介助がしやすい。
- 工事することなくL型の手すりを設置でき、立ち上がりを補助できる。
- 縦手すりとは横手すりを同時に設置ができ、安定した動作を補助できる。

かいじょくん



- 現在利用しているたちあつぶに後付けで使用することができるため選定。
- たちあつぶに対して平行・直角・45°に簡単に調整が可能のため選定。
- たちあつぶを使っての立ち上がりやすさを向上させるために選定。
- たちあつぶを使って立ち上がった後の歩き出しを補助するために選定。

ベットでとまるくん



- たちあつぶをより安定させるために選定。
- たちあつぶの使用中にベッドからたちあつぶがズレにくくするために選定。

おもしろくん



- たちあつぶとつながるくん (伸縮つながるくん) を連結使用した際の安定性を高めるために選定。

たちあっぷ[®]シリーズ選定理由例

選定理由の一例です。ご利用者様の状況に合わせて選定してください。

あがりかまち用 たちあっぷ[®]

シリーズ共通選定理由例



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。
- 玄関に段差があり、昇降をサポートするために選定。
- つかみやすいφ32のディンプル加工がされている置くだけのレンタル手すりを選定。
- プラスチックをコーティングした手すりにより、冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- 重量があり安定して設置でき、安全に使えるため選定。

伸縮つながるくん[®]



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりと組み合わせて選定。
- 取り付けることで段差を越える際に掴まり、安定して移動ができるため選定。
- 手すり長さ・角度を調整できるため選定。

あがりかまち用 たちあっぷ[®] ミニ

シリーズ共通選定理由例



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。
- 玄関に段差があり、昇降をサポートするために選定。
- つかみやすいφ32のディンプル加工がされている置くだけのレンタル手すりを選定。
- プラスチックをコーティングした手すりにより、冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- ミニタイプで狭い場所に置くことができる。

品番別選定理由例



- CKG-04 MB ● 両手すりだと下駄箱を塞いでしまうため、健側をサポートできる中央手すりタイプを選定。

たちあっぷ® 540

シリーズ共通選定理由例



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりを選定。
- 出入り箇所に段差があり、昇降をサポートするために選定。
- 軒下・ベランダ・玄関ポーチに設置できるため選定。
- つかみやすいφ 34のディンプル加工がされている置くだけのレンタル手すりを選定。
- プラスチックをコーティングした手すりにより、冷たさを感じにくく、丈夫で安全に使用できる。
- 重量があり安定して設置でき、安全に使えるため選定。
- 他の手すりでは設置できない段差の高い場所に設置できるので選定。

品番別選定理由例

CKH-01 MGR CKH-02 MGR



- CKH-01 MGR
CKH-02 MGR ● 段差に合わせて適正な手すりの設置高さ、角度を設定できるので選定。

CKH-03 MGR CKH-04 MGR



- CKH-03 MGR
CKH-04 MGR ● 段差を降りる際に握りやすい水平な手すり部分があり、安全に降りられるので選定。

たちあっぷ® II

CKH-21



- CKH-21 MGR ● 軒下・ベランダ・玄関ポーチに設置することができるため選定。

つながるくん® XP



- 賃貸住宅につき、住宅改修ができないため床置き型手すりと組み合わせて選定。
- 軒下・ベランダ・玄関ポーチで使用できるため選定。
- 取り付けることで段差を越える際に握まり、安定して移動ができるため選定。
- 手すり長さ・角度を調整できるため選定。

TAIS コード一覧






「福祉用具貸与価格を把握するための商品コード」として取得済の TAIS コードです。

たちあっぷ サムリング

タイプ	スタンダードタイプ				
形状					
品番	CKM-02 SET GR	CKM-02 SET DGR	CKM-02 SET BR	CKM-02 SET B	CKM-02 SET G
本体 TAIS コード	00055-000302	00055-000303	00055-000304	00055-000305	00055-000306

⊕ オプション品セット

サムリング ベッドでとまるくんセット					
ベッドでとまるくん CKM-CK	00055-000320	00055-000321	00055-000322	00055-000323	00055-000324

タイプ	ダブルタイプ				
形状					
品番	CKM-02W SET GR	CKM-02W SET DGR	CKM-02W SET BR	CKM-02W SET B	CKM-02W SET G
本体 TAIS コード	00055-000308	00055-000309	00055-000310	00055-000311	00055-000312

タイプ	ロングタイプ				
形状					
品番	CKM-04 SET GR	CKM-04 SET DGR	CKM-04 SET BR	CKM-04 SET B	CKM-04 SET G
本体 TAIS コード	00055-000314	00055-000315	00055-000316	00055-000317	00055-000318

⊕ オプション品セット

サムリング ベッドでとまるくんセット					
ベッドでとまるくん CKM-CK	00055-000326	00055-000327	00055-000328	00055-000329	00055-000330

⊕ オプション品セット






サムリング (CKM-02)・かいじょくんセット

タイプ	スタンダードタイプ				
形状					
品番	CKM-02 SET GR +CKM-K	CKM-02 SET DGR +CKM-K	CKM-02 SET BR +CKM-K	CKM-02 SET B +CKM-K	CKM-02 SET G +CKM-K
TAISコード	00055-000345	00055-000346	00055-000347	00055-000348	00055-000349

サムリング (CKM-04)・かいじょくんセット

タイプ	ロングタイプ				
形状					
品番	CKM-04 SET GR +CKM-K	CKM-04 SET DGR +CKM-K	CKM-04 SET BR +CKM-K	CKM-04 SET B +CKM-K	CKM-04 SET G +CKM-K
TAISコード	00055-000351	00055-000352	00055-000353	00055-000354	00055-000355











サムリング (CKM-02)・かいじょくんセット (ベッドでとまるくん付)

タイプ	スタンダードタイプ				
形状					
品番	CKM-02 SET GR +CKM-K+CKM-CK	CKM-02 SET DGR +CKM-K+CKM-CK	CKM-02 SET BR +CKM-K+CKM-CK	CKM-02 SET B +CKM-K+CKM-CK	CKM-02 SET G +CKM-K+CKM-CK
TAISコード	00055-000333	00055-000334	00055-000335	00055-000336	00055-000337

サムリング (CKM-04)・かいじょくんセット (ベッドでとまるくん付)

タイプ	ロングタイプ				
形状					
品番	CKM-04 SET GR +CKM-K+CKM-CK	CKM-04 SET DGR +CKM-K+CKM-CK	CKM-04 SET BR +CKM-K+CKM-CK	CKM-04 SET B +CKM-K+CKM-CK	CKM-04 SET G +CKM-K+CKM-CK
TAISコード	00055-000339	00055-000340	00055-000341	00055-000342	00055-000343

たちあっぷ

タイプ	スタンダードシリーズ						ベース・スタンド「ステンレス製」シリーズ			
形状										
品番	CKA-01	CKA-01-1	CKA-02	CKA-02-1	CKA-03	CKA-04	CKA-11	CKA-12	CKA-13	CKA-14
本体 TAIS コード	00055-000071	00055-000119	00055-000072	00055-000120	00055-000073	00055-000074	00055-000111	00055-000112	00055-000113	00055-000114

+ オプション品セット

ベットでとまるくんセット

ベットでとまるくん CKA-CK MB	00055-000075	00055-000121	00055-000076	00055-000122	00055-000077	00055-000078	00055-000115	00055-000116	00055-000117	00055-000118
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

つながるくんセット (ベットでとまるくん付)

つながるくん 60 CKA-E60 MB + ベットでとまるくん CKA-CK MB	00055-000217	00055-000220	00055-000223	00055-000226	00055-000229	00055-000232	00055-000235	00055-000238	00055-000241	00055-000244
つながるくん 90 CKA-E90 MB + ベットでとまるくん CKA-CK MB	00055-000218	00055-000221	00055-000224	00055-000227	00055-000230	00055-000233	00055-000236	00055-000239	00055-000242	00055-000245
つながるくん 120 CKA-E120 MB + ベットでとまるくん CKA-CK MB	00055-000219	00055-000222	00055-000225	00055-000228	00055-000231	00055-000234	00055-000237	00055-000240	00055-000243	00055-000246

つながるくんセット (おもしろくん付)

つながるくん 60 CKA-E60 MB + おもしろくん CKA-J MB	00055-000186	00055-000187	00055-000188	00055-000189	00055-000190	00055-000191	00055-000247	00055-000250	00055-000253	00055-000256
つながるくん 90 CKA-E90 MB + おもしろくん CKA-J MB	00055-000192	00055-000193	00055-000194	00055-000195	00055-000196	00055-000197	00055-000248	00055-000251	00055-000254	00055-000257
つながるくん 120 CKA-E120 MB + おもしろくん CKA-J MB	00055-000198	00055-000199	00055-000200	00055-000201	00055-000202	00055-000203	00055-000249	00055-000252	00055-000255	00055-000258

伸縮つながるくんセット (ベットでとまるくん付)

伸縮つながるくん CKE-D + ベットでとまるくん CKA-CK MB	00055-000165	00055-000166	00055-000167	00055-000168	00055-000169	00055-000170	00055-000171	00055-000172	00055-000173	00055-000174
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

伸縮つながるくんセット (おもしろくん付)

伸縮つながるくん CKE-D + おもしろくん CKA-J MB	00055-000175	00055-000176	00055-000177	00055-000178	00055-000179	00055-000180	00055-000181	00055-000182	00055-000183	00055-000184
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

かいじょくんセット

かいじょくん CKA-K	00055-000147	00055-000148	00055-000149	00055-000150	00055-000151	00055-000152	00055-000153	00055-000154	00055-000155	00055-000156
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

かいじょくんセット (ベットでとまるくん付)

かいじょくん CKA-K + ベットでとまるくん CKA-CK MB	00055-000133	00055-000134	00055-000135	00055-000136	00055-000137	00055-000138	00055-000139	00055-000140	00055-000141	00055-000142
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

たちあっぷⅡ

タイプ	スタンダードタイプ			ハイタイプ
形状				
品番	CKA-22	CKA-23	CKA-24	CKA-31
本体 TAIS コード	00055-000205	00055-000206	00055-000207	00055-000289

+ オプション品セット







伸縮つながるくんセット				
伸縮つながるくん CKE-D	00055-000271	00055-000272	00055-000273	00055-000294
つながるくんセット				
つながるくん 60 CKA-E60 MB	00055-000259	00055-000262	00055-000265	00055-000291
つながるくん 90 CKA-E90 MB	00055-000260	00055-000263	00055-000266	00055-000292
つながるくん 120 CKA-E120 MB	00055-000261	00055-000264	00055-000267	00055-000293
かいじょくんセット (ベットでとまるくん付)				
かいじょくん CKA-K + ベットでとまるくん CKA-CK MB	00055-000268	00055-000269	00055-000270	00055-000295
ベットでとまるくんセット				
ベットでとまるくん CKA-CK MB	00055-000274	00055-000275	00055-000276	00055-000296

タイプ	でらっくす	ひざたち	たててすり
形状			
品番	CKI-21	CKI-22	CKI-31
本体 TAIS コード	00055-000208	00055-000209	00055-000290

+ オプション品セット

伸縮つながるくんセット			
伸縮つながるくん CKE-D	-	-	00055-000297

あがりかまち用 たちあっぷ

タイプ	かまち対応高さ 18～36cm				かまち対応高さ 4～18cm	
形状						
品番	CKE-01 MB	CKE-01-1 MB	CKE-02 MB	CKE-02-1 MB	CKE-03 MB	CKE-04 MB
本体 TAIS コード	00055-000105	00055-000109	00055-000106	00055-000110	00055-000107	00055-000108

+ オプション品セット

伸縮つながるくんセット						
伸縮つながるくん CKE-D	—	00055-000158	—	00055-000159	00055-000160	00055-000161





あがりかまち用 たちあっぷミニ

タイプ	スライドベース付き		スライドベースなし	
形状				
品番	CKG-01 MB	CKG-02 MB	CKG-03 MB	CKG-04 MB
本体 TAIS コード	00055-000123	00055-000124	00055-000125	00055-000126

+ オプション品セット

伸縮つながるくんセット				
伸縮つながるくん CKE-D	—	—	00055-000162	00055-000163

たちあっぷ 540

タイプ	たちあっぷ 540			
形状				
品番	CKH-01 MGR	CKH-02 MGR	CKH-03 MGR	CKH-04 MGR
本体 TAIS コード	00055-000127	00055-000128	00055-000300	00055-000301

たちあっぷⅡ

タイプ	万能型
形状	
品番	CKH-21
本体 TAIS コード	00055-000204

+ オプション品セット

つながるくん XP セット	
つながるくん XP CKH-D90	00055-000287
つながるくん XP ロングタイプ CKH-D125	00055-000288

JANコード一覧

商品名	品番	JANコード
たちあっぷ サムリング	CKM-02 SET GR	4979652620569
たちあっぷ サムリング	CKM-02 SET DGR	4979652620545
たちあっぷ サムリング	CKM-02 SET BR	4979652620552
たちあっぷ サムリング	CKM-02 SET B	4979652620576
たちあっぷ サムリング	CKM-02 SET G	4979652620583
たちあっぷ サムリング	CKM-02W SET GR	4979652620620
たちあっぷ サムリング	CKM-02W SET DGR	4979652620606
たちあっぷ サムリング	CKM-02W SET BR	4979652620613
たちあっぷ サムリング	CKM-02W SET B	4979652620637
たちあっぷ サムリング	CKM-02W SET G	4979652620644
たちあっぷ サムリング	CKM-04 SET GR	4979652620682
たちあっぷ サムリング	CKM-04 SET DGR	4979652620668
たちあっぷ サムリング	CKM-04 SET BR	4979652620675
たちあっぷ サムリング	CKM-04 SET B	4979652620699
たちあっぷ サムリング	CKM-04 SET G	4979652620705
サムリング ベッドでとまるくん	CKM-CK	4979652619372
サムリング かいじょくん	CKM-K	4979652623409
たちあっぷⅡ	CKA-31	4979652605528
蓄光リング	CKA-JB170 10 ｲﾝ	4979652607058
たちあっぷⅡ たててすり	CKI-31	4979652605535
たちあっぷⅡ	CKA-24	4979652527424
たちあっぷⅡ	CKA-22	4979652527400
たちあっぷⅡ	CKA-23	4979652527417
たちあっぷⅡ	CKI-21	4979652527387
たちあっぷⅡ	CKI-22	4979652527394
伸縮つながるくん	CKE-D	4979652525529
伸縮つながるくんカバー	CKE-DK 10 ｲﾝ	4979652526984
かいじょくん	CKA-K	4979652523105
ベットでとまるくん	CKA-CK MB	4979652513427
おもしろくん	CKA-J MB	4979652513625
たちあっぷマット	CKA-DA 5 ｲﾝ	4979652490247
たちあっぷマット	CKA-DB 5 ｲﾝ	4979652490254
あがりかまち用 たちあっぷ	CKE-01 MB	4979652513786
あがりかまち用 たちあっぷ	CKE-01-1 MB	4979652515209
あがりかまち用 たちあっぷ	CKE-02 MB	4979652513793
あがりかまち用 たちあっぷ	CKE-02-1 MB	4979652515216
あがりかまち用 たちあっぷ	CKE-03 MB	4979652513809
あがりかまち用 たちあっぷ	CKE-04 MB	4979652513816
あがりかまち用 たちあっぷ ステップ台	CKE-B MB	4979652513830
あがりかまち用 たちあっぷミニ	CKG-01 MB	4979652519375
あがりかまち用 たちあっぷミニ	CKG-02 MB	4979652519382
あがりかまち用 たちあっぷミニ	CKG-03 MB	4979652519399
あがりかまち用 たちあっぷミニ	CKG-04 MB	4979652519405
あがりかまち用 たちあっぷミニ スライドベース	CKG-B	4979652519429
たちあっぷⅡ	CKH-21	4979652527325
たちあっぷ 540 両手すり	CKH-01 MGR	4979652520326
たちあっぷ 540 片手すり	CKH-02 MGR	4979652520333
たちあっぷ 540 両手すり	CKH-03 MGR	4979652618511
たちあっぷ 540 片手すり	CKH-04 MGR	4979652618542
たちあっぷ 540 ステップ台	CKH-BL	4979652520364
たちあっぷ 540 ステップ台	CKH-BH	4979652520357
つながるくん XP	CKH-D90	4979652602794
つながるくん XP ロングタイプ	CKH-D125	4979652602800

サムリング 病院・施設 導入事例

検査室での姿勢保持に



ベッドでの立ち座りに



トイレでの移乗・立ち座りに



洗面所・脱衣所の姿勢保持に



立ち上がり・歩行補助商品

入浴補助商品

トイレ介助商品

病院・施設用福祉用具

病院・施設用設備商品

施工品・手すり部材