



Support your life **たちあっぷ[®]**
サムリング[®] オプション品

かいじょくん



取扱説明書

品番

CKM-K

サムリングに取り付けて、立ち座り、移乗補助、立位保持、座位保持としてご使用できます。

！ 安全に関する表示	2
1. 使用上のご注意	2
2. ご使用方法	4
3. 設置上のご注意	4
4. 仕様	6
5. 構成部品	7
6. 組立手順	8
7. ご使用前の確認	10
8. お手入れ方法	11

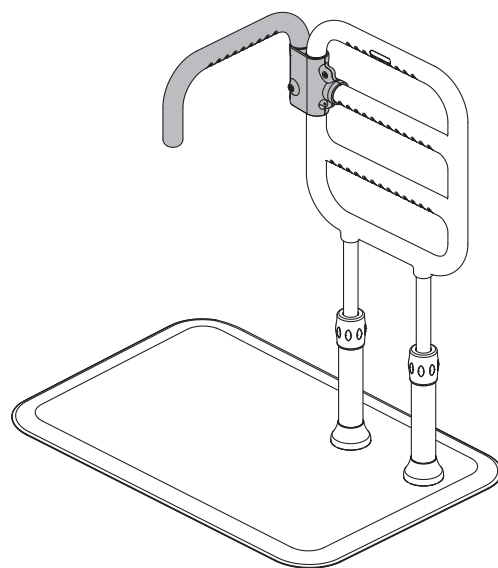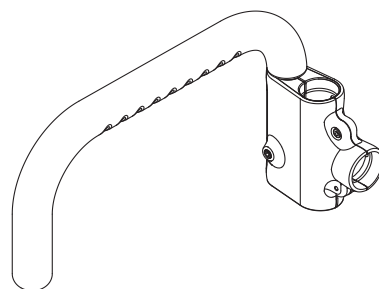

サムリング CKM-02

お買い上げありがとうございます。

☐ 販売店様

この説明書は必ずお客様に説明してからお渡しください。

☐ ご利用者様

ご使用前にこの説明書を必ずお読みになり大切に保管してください。

※「サムリング」の取扱説明書と合わせてご覧ください。

※本書で「サムリング」と表現している部分は、特にことわりを記載している場合を除き、弊社商品「たちあっぷサムリング」を指します。

！安全に関する表示

※いずれも安全に関する内容ですので必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。	 禁止	してはいけない内容です。
⚠ 注意	誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。	 必ず守る	必ず守っていただく内容です。

1. 使用上のご注意

⚠ 警告

●手すり以外の用途では使用しない。


踏み台、いす、はしごなどの用途では使用しないでください。

●子供を遊ばせるなど遊具として使用しない。

事故のおそれがあります。手すりにぶら下がったり、手すりの上に乗ったりしないでください。

●手すりに力をかけた際、「サムリング」のベースが持ち上がり、床面とのすき間が発生するような使用はしない。

取り付けが不安定な状態で使用すると事故やケガの原因になります。

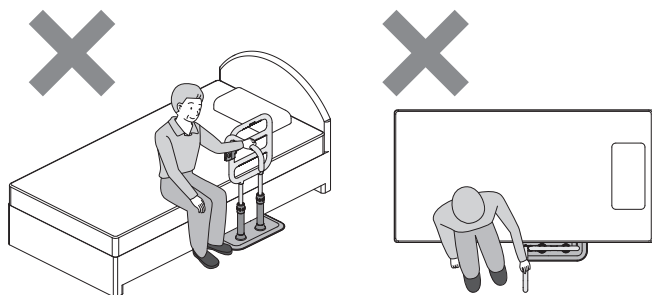

●フレームの上に乗ったり、ぶら下がったり、寄り掛かったりしない。

製品の外れや破損により転倒、ケガをするおそれがあります。

●濡れた手、脚で使用しない。



滑って転倒するおそれがあります。

●「かいじょくん」が濡れた状態で使用しない。

滑って転倒するおそれがあります。布などで拭き取り、乾いた状態で使用してください。

●「かいじょくんフレーム」や「サムリングフレーム」に身体の一部または頭や首、手、脚を入れない。

すき間に身体をはさむと窒息や骨折または重大事故につながるおそれがあります。

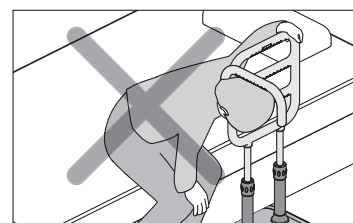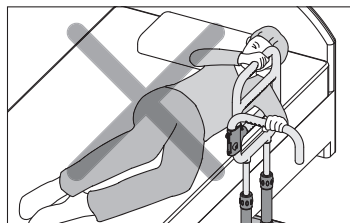

●予測できない行動をとる・自力で危険な状態から回避することができない利用者は使用しない。

利用者の心身の状態や利用環境により、サムリングフレームとベッドのすき間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては生命に関わる重大事故につながるおそれがあります。特にベッドの上で予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避することができない利用者（認知症など）につきましては、ご使用を控えてください。

※重度者（特に介護度4・5）の方が使用する場合は、十分モニタリング、フィッティングを行った上で使用してください。

また、ご使用に適さなくなった場合は、直ちに使用をやめ、お買い上げの販売店または医師や介護士、ケアマネジャーなど専門家に相談し、適切な処置を受けてください。




禁止

⚠ 警告

- 「かいじょくんフレーム」下部に衣類が引っかからないように注意する。

転倒、ケガをするおそれがあります。

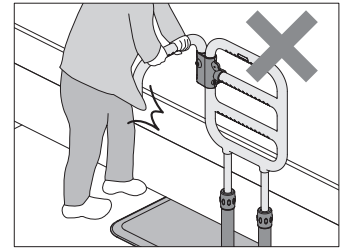

- 固定式でないため設置後の安定性、利用者の状況を確認の上、使用する。

- 利用者の状況や環境などに応じて「ベッドでとまるくん」を使用する。

「ベッドでとまるくん」は「サムリング」をベッドで使用する際の安定性を向上させるオプション品です。詳しくは「6. 組立手順」を参照してください。

- 使用に際しては、利用者の身体の状態により介護者が付き添うなど、安全には十分な配慮をする。

お買い上げの販売店または医師や介護士、ケアマネジャーなど専門家に相談することをお勧めします。

- 使用の際は介護者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認する。

利用者の健康状態や体調が変化した場合には、お買い上げの販売店または医師や介護士、ケアマネジャーなど専門家に相談してください。

ご使用の際は介護者が付き添って使用することをお勧めします。

ご使用に合わない場合は直ちにご使用をおやめください。




必ず守る

⚠ 注意

- 「かいじょくんフレーム」と「サムリングフレーム」とのすき間に指を入れない。

手指をはさみケガをするおそれがあります。

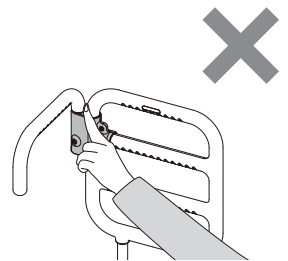

- 2人以上同時に使用しない。

本製品は1人用です。

- 利用者体重が100kgを超える場合は使用しない。

使用中に破損するおそれがあります。

- 移動させる場合は、「サムリング」のベース部分を持って移動させる。

「かいじょくん」を持ち上げるとねじのゆるみなどでベースが落下し、ケガをするおそれがあります。また、引きずると床面を傷つけたり、本体が倒れるなどで破損するおそれがあります。

- 製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。

正しく設置できない場合や機能を損なう状態の場合は直ちにご使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。




禁止




必ず守る

2.ご使用方法

- ベッドサイドで「サムリング」に取り付けてご使用ください。

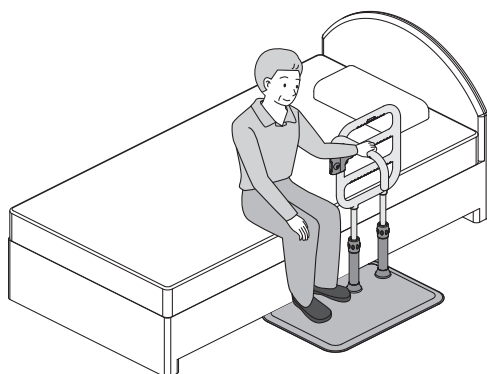

- 「かいじょくんフレーム」を床面に向かって押さえつける方向に力をかけてご使用ください。

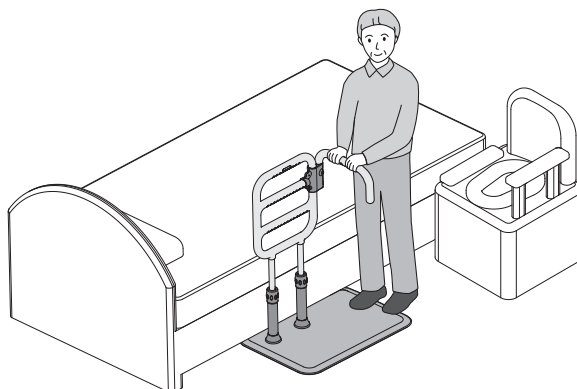

3.設置上のご注意


⚠ 警告

- 弊社製品と他社製品を組み合わせない。
破損やケガの原因になります。また、他社製品と組み合わせた製作物の安全は保証できません。
- 改造・加工は絶対に行わない。
事故の原因になります。
- 昇降機能のある電動ベッドには、「かいじょくん」を使用しない。
- お使いの電動ベッドに装着しているサイドレール、介助バーと組み合わせて使用しない。
組み合わせて使用すると、首や手、脚をはさむすき間が生じる場合があります、事故の原因になります。




禁止

- 「かいじょくん」は頭側に取り付けない。
身体がはさまれやすくなり、事故の原因になります。

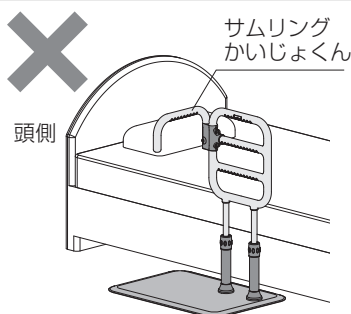

- 「かいじょくん」はベッド側に向けない。
身体がはさまれやすくなり、事故の原因になります。

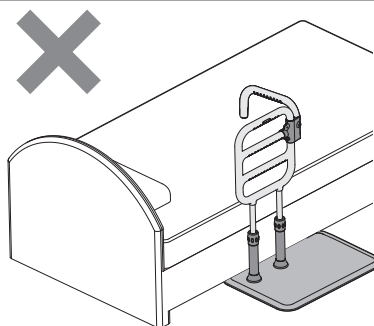


- 「サムリング」に複数の「かいじょくん」を取り付けない。

⚠ 警告	
禁止	●「かいじょくんフレーム」の下にベースがない位置に設置しない。 「かいじょくんフレーム」の下にベースがない状態で使用するとベースが浮き上がってしまう可能性があり、事故の原因になります。 × ○
	●設置後、ガタつき・ねじのゆるみ・締め忘れがないことを必ず確認する。 取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。
必ず守る	●「ベッドでとまるくん」を使用する場合は、「サムリング」とベッドとの間にすき間がないように設置する。 「ベッドでとまるくん」はサムリングをベッドで使用する際の安定性を向上させるオプション品です。 「ベッドでとまるくん」を使用しない場合は、かいじょくんフレームに力をかけた際に「サムリング」のベースが持ち上がり、ベースと床面に隙間が発生しないよう、安全を十分確保の上、設置してください。
	●ベッドやマットレスの横に置く場合は、原則として寝具とのすき間がないように設置する。 ベッドの構造やマットレスの厚みによりやむを得ずすき間が生じる場合は、心身の状況によりクッション材や毛布などで隙間を埋めるなどの対策を施す。 ベッドやマットレスのすき間に頭や身体が挟まると、事故やケガの原因になるおそれがあります。 利用者の心身の状況を確認の上、安全に使用できることを確認してください。 ○ ×
	●パイプベッドなど軽量なベッドに設置する際は安定性を確認して使用する。 ベッドが使用中に浮き上がったり、動いてしまう可能性があり大変危険です。


⚠ 注意	
禁止	●指定締め付けトルク値以上で締め付けない。 破損するおそれがあります。(「6. 組立手順」で示すトルク値に従って締め付けてください。)
	●屋外や直射日光の当たる場所では使用しない。 金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。
	●火のそば・熱器具(ストーブ等)の近くでは使用しない。 金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。
	●水やお湯に濡れる場所では使用しない。 変質や破損するおそれがあります。
必ず守る	●室内で使用する。
	●平らで水平な場所で使用する。
	●組み立ては納入業者が行う。
	●定期的にガタつき・ねじのゆるみ・部品の破損がないことを確認する。

4.仕様


単位：mm

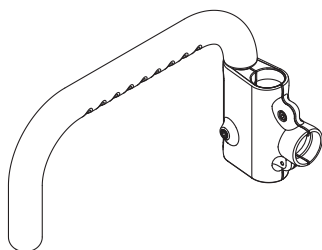

品名	サムリングかいじょくん
品番	CKM-K
質量	1.1kg

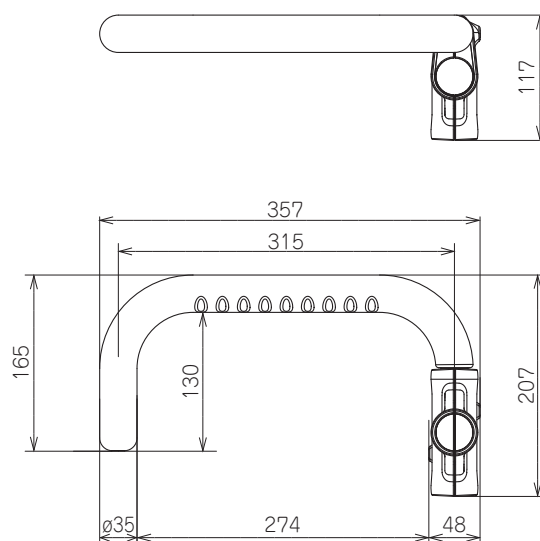


CKM-02

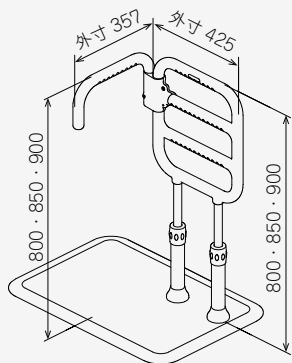


CKM-02

かいじょくんを下段に取り付けた場合

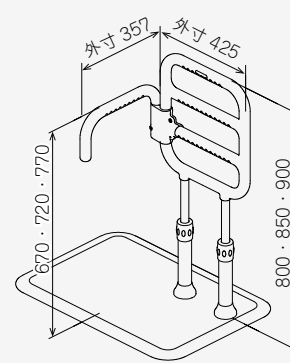


CKM-04

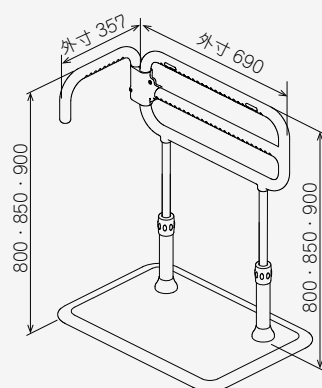

5.構成部品

※部品が揃っていない、または破損している場合は直ちにお買い上げの販売店へご連絡ください。

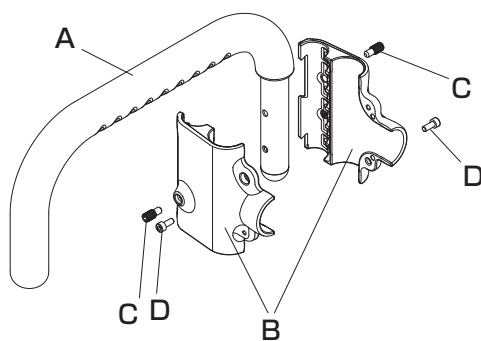

記号	名 称	部 品 図	材 質	サイズ (単位 : mm)	数量
A	かいじょくんフレーム		フレーム：ウレタン樹脂 被覆スチールパイプ その他：プラスチック	Φ 35 × 350 × 205	1
B	サムリング連結金具		アルミ合金	120 × 117 × 48	1
C	かいじょくん 六角トメネジ		ステンレス	M8 × 20 - 8.5	2
D	かいじょくん 六角ネジ		ステンレス	M5 × 12	2
ー	六角レンチ (対辺 4mm)		スチール	対辺 4mm	1

■「かいじょくん」を取付可能なサムリング

下記のサムリングに取り付けることができます。

サムリング	 CKM-02	 CKM-04	※ CKM-02W には取り付けることができません。
-------	------------	------------	----------------------------

6.組立手順

● 設置方法について

設置する際は以下の条件を守ってください。

【設置 OK】




全ての場所で使用OK


- ・かいじょくんは足が乗る状態で使用すること

※ 身体の状態や設置環境により安定性が不足する場合は、「ベッドでとまるくん」を使用してください

CKM-02

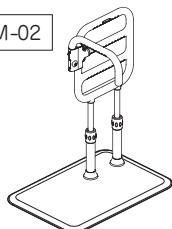

< 使用例 >

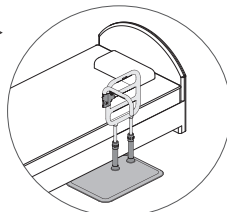


条件付きで使用OK


条件付き

- ・ベッド横で使用する場合は「ベッドでとまるくん」を使用すること
- ・それ以外の場所で使用する場合、ベースに足がのる状態で使用すること


CKM-02

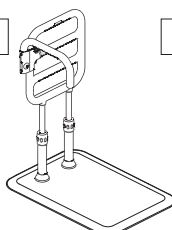


CKM-02

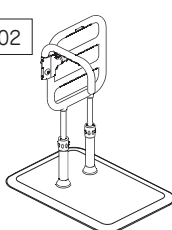


CKM-02

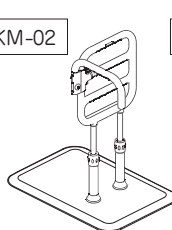




CKM-02

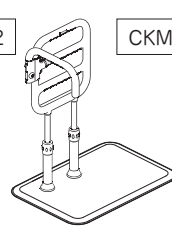

CKM-04

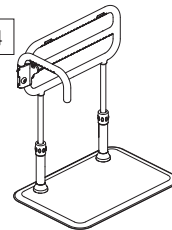

< 使用例 >

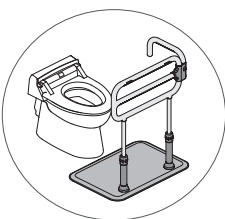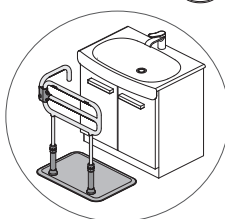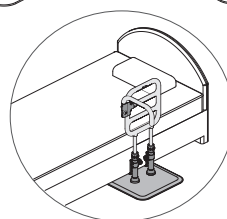


【設置 NG】




かいじょくんのフレームがベースから大きくはみ出すため使用NG
※「ベッドでとまるくん」を取り付けても使用NG


CKM-02

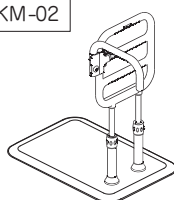

CKM-02

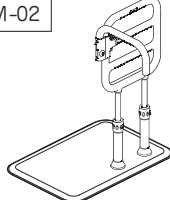

CKM-04

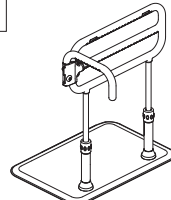


⚠ 警告



禁止

- 「かいじょくんフレーム」の下にベースがない状態で設置しない。
ベースが浮き上がり転倒するおそれがあります。

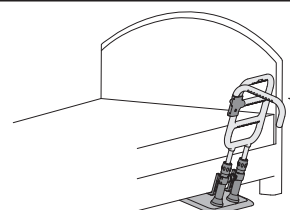


※ 組み立ては納入業者が行ってください。

● 六角レンチ (対辺 4mm) は本製品に添付されているものをご使用ください。


6-1. 連結金具の取り付け

「サムリングフレーム」に図のような形で連結金具を嵌め込み、六角ネジ (M5 x 12) 2本で仮止めします。

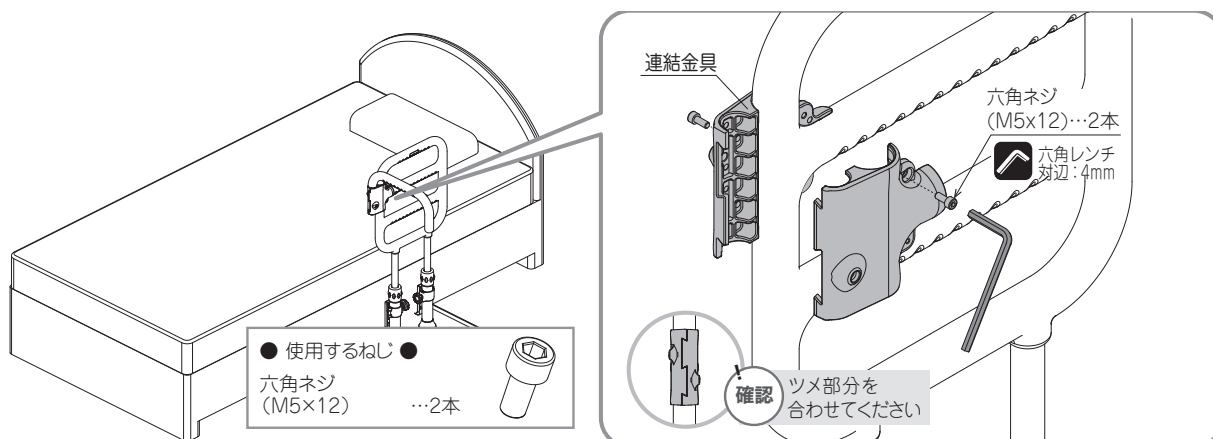


6-2. 「かいじょくんフレーム」の取付け

「かいじょくんフレーム」を連結金具に差し込みます。

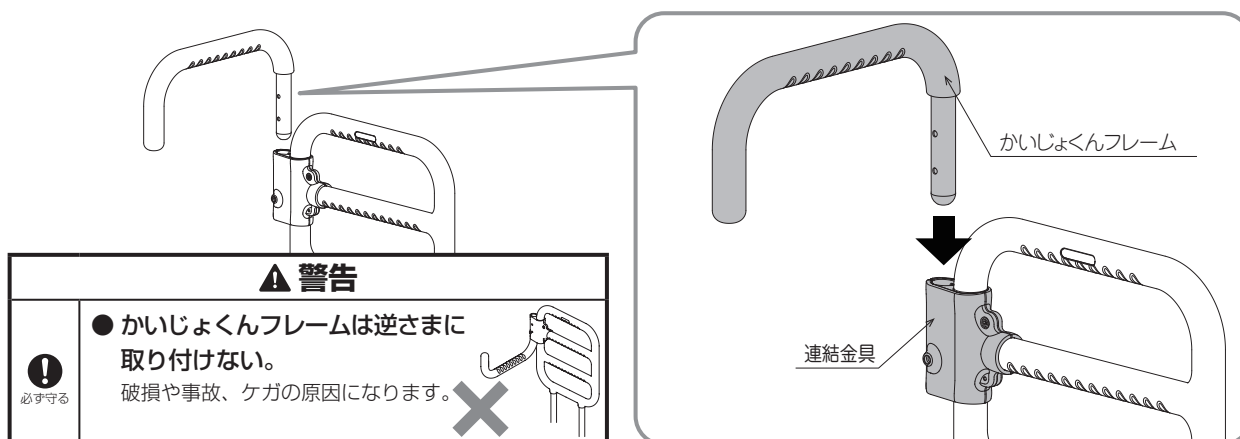

6-3. 「かいじょくんフレーム」の固定

「六角トメネジ」を仮締めします。「かいじょくんフレーム」がしっかり入っていることを確認し、「六角ネジ」→「六角トメネジ」の順で本締めします。

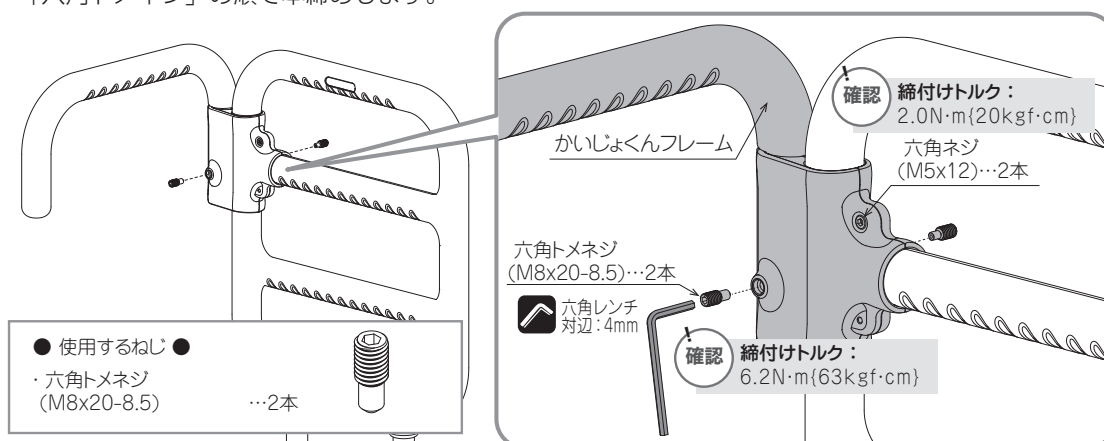

6-4. 「かいじょくん」の取付確認

ガタつき・ねじのゆるみ・締め忘れがないことを確認してください。

警告	
必ず守る	● 設置後、ガタつき・ねじなどのゆるみ・締め忘れがないことを確認する。 取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。

7.ご使用前の確認

！ 設置完了後、また定期点検時に、ガタつき・ねじのゆるみ・部品の破損がないか確認してください。



■ 確認チェックは下記番号順に進めてください。

①

サムリング連結金具にガタつきはありませんか？
→ガタつきや異音がある場合は、ねじの締め具合を確認してください。

チェック✓

【締付け該当箇所】

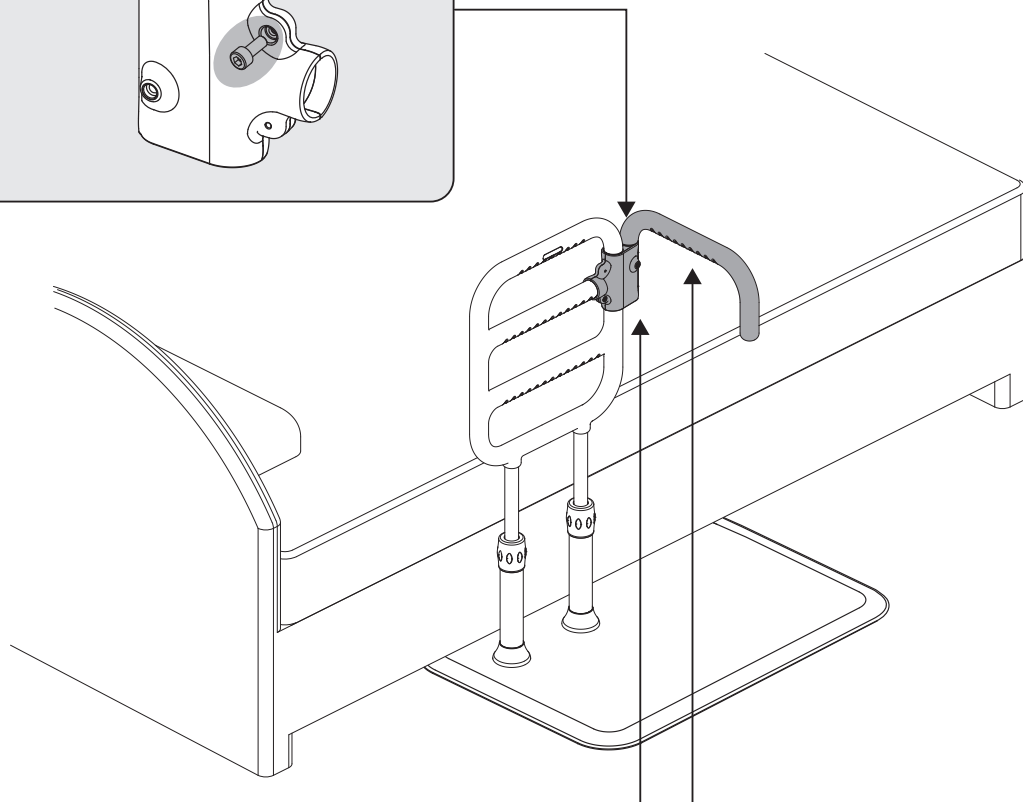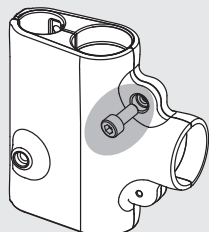


②の確認へ

②

かいじょくんフレームにガタつきはありませんか？
→ガタつきや異音がある場合は、ネジの締め具合を確認してください。

チェック✓

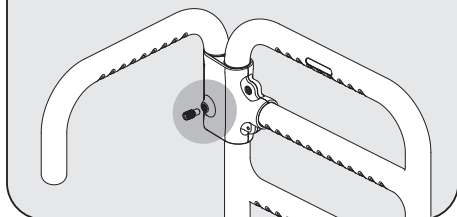

サムリング取扱説明書も合わせてご確認ください。

上記の確認をしても異常がある場合は、お買い上げの販売店またはレンタル事業者、ケアマネジャーにご相談ください。

8.お手入れ方法

8-1. 日常のお手入れ

- 水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。
- 水分が残ったまま放置すると、製品に錆が発生する原因となります。濡れた場合は、すぐに水分を拭き取ってください。

⚠ 注意	
 禁止	● 酸性・アルカリ性洗剤は使用しない。 錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。 必ず中性洗剤を使用してください。
	● シンナー・ベンジンなどは使用しない。 変質して破損するおそれがあります。
	● たわしや磨き粉などで磨かない。 傷がつくおそれがあります。
 必ず守る	● 直射日光を避けて、陰干しする。

8-2. 点検

- 定期的に点検を行い、ガタつき・ねじのゆるみ・部品の破損・その他異常がないことを確認してください。

⚠ 注意	
 必ず守る	● 定期的にガタつき・ねじのゆるみ・部品の破損・その他異常がないことを確認する。 異常があった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

8-3. 消毒方法

- 消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
- アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。消毒後は、仕上げに水拭きをしてください。
- この製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。
- 塩素系の消毒液を使用する場合は、使用する消毒液の使用方法及び使用上の注意に従い、希釈して使用し、仕上げに水拭きをしてください。
(参考：次亜塩素酸ナトリウム 6%水溶液なら
120 倍～300 倍程度に希釈)

⚠ 注意	
 禁止	● オゾンガス・ホルムアルデヒドガスは使用しない。 変質して破損するおそれがあります。
	● 手すり部をアルコールで強く擦らない。 色落ちするおそれがあります。
 必ず守る	● アルコール系の消毒液や逆性石鹼、塩素系の消毒液が付着した場合は水拭きをし、製品表面に消毒液が残らないようにする。 錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。

8-4. 保管方法

- 製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管してください。
- ウレタン素材について下記に注意してください。
 - ・ クッション性に優れているウレタン素材は、使用頻度に関わらず経年変化を起こし、割れ、ヒビ、崩れを起こし、破損するおそれがあります。
 - ・ 特に通気の悪い場所での長期間の保管は避けてください。
 - ・ 割れやヒビ、崩れなどの症状が発生した場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

⚠ 注意	
 必ず守る	● 製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管する。 高温多湿の場所で保管すると、変形、結合部の外れの原因になります。

8-5. 長期使用について

- 経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあることを注意喚起するために、製造年月日を表示しております。これは、使用開始時期とは異なります。
- 安全使用期間とは、かいじょくんが適正な取扱い・維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、製造年月日から想定される期間です。
これは、無償保証期間とは異なります。



想定上の安全使用期間 8 年

安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化によるケガなどの事故に至るおそれがあります。

- 不特定多数の方が使用される施設や病院などで使用される場合は、安全使用期間よりも劣化が早まるおそれがあります。
- 経年劣化とは、長期間にわたる使用や処置の他、雨風・湿気・温度変化・日照などによる品質の低下からくる劣化のことをいいます。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

● 矢崎化工株式会社

■ 本 社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

介護支援ページ
kaigo-web
<https://www.kaigo-web.info/>

■ 北 海 道 支 店 福祉介護課
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459

■ 仙 台 支 店 福祉介護課
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099

■ 関 東 支 店 福祉介護課
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)4562 FAX 0276(38)3522

■ 東 京 支 店 福祉介護課
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007

■ 神 奈 川 支 店 福祉介護課
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316

■ 名 古 屋 支 店 福祉介護課
〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219

■ 大 阪 支 店 福祉介護課
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

■ 広 島 支 店 福祉介護課
〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

■ 九 州 支 店 福祉介護課
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026

24102504

DW-315-02