

yazaki



たちあっぶ®
サニタリング®

かいじょくん



Support your life



かいじょくんの特長




ポイント 1

L型手すりの構築

かいじょくんは、サムリングと組み合わせることでL型手すりが構築できます。

立ち上がりが安定

歩き出しがスムーズに

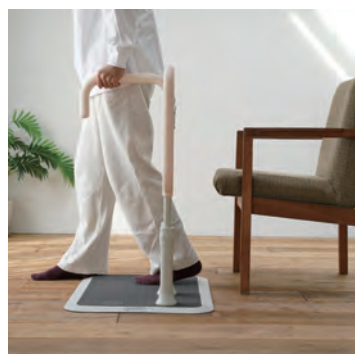

ポイント 2

設置バリエーション

ベッドサイド以外の場所でも使用可能です。リビングや洗面所などでもご使用いただけます。

ソファやイスに



洗面所に



トイレに



ポイント 3

足元すっきり

かいじょくんの下に支柱がないため、使用時に動作の邪魔になりません。



起き上がりから移乗までをサポート



起き上がり補助

サムリングの手すりを上からつかむことで、ベッドからの起き上がりがスムーズに行えます。



姿勢保持

座位が安定しないご利用者様も、安心して座った姿勢を保つことができます。




立ち上がり補助

かいじょくんの手すりをしっかりとつかみ、体を押し上げるようにして立ち上がります。



移動または移乗の補助

かいじょくんの手すりを支えに歩き出せます。車いすなどへの移乗も安心して行えます。

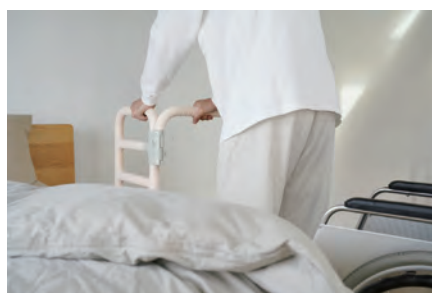

かいじょくんで サ ム リ ン グ®の使い道が広がる！

ベッドサイド設置例



サムリング CKM-02

サムリング CKM-02、かいじょくん CKM-K



サムリング CKM-02 ベッドでとまるくん

サムリング CKM-02、かいじょくん CKM-K、ベッドでとまるくん CKM-CK



サムリング CKM-04 ベッドでとまるくん

サムリング CKM-04、かいじょくん CKM-K、ベッドでとまるくん CKM-CK



サムリング CKM-02 かいじょくんを下段に取り付けた場合

サムリング CKM-02、かいじょくん CKM-K

ベッドサイド以外の設置例



1人掛けソファ



ソファ



洗面所





トイレ

設置
OK

●「ベッドでとまるくん」が不要な使用方法




かいじょくんを使用するときに、サムリングのベースに足が乗る場合は「ベッドでとまるくん」が不要です。

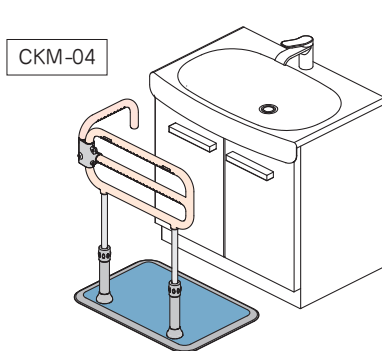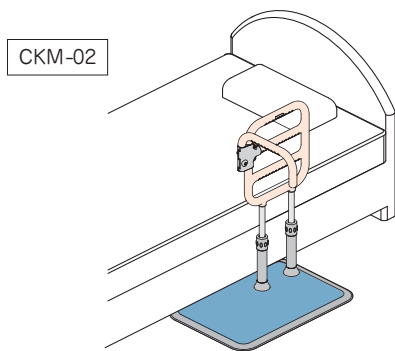

※身体状況や設置環境によって安定性が不足する場合は、「ベッドでとまるくん」を使用してください。





●「ベッドでとまるくん」が必要な使用方法

かいじょくんを使用するときに、サムリングのベースに足が乗らない場合は「ベッドでとまるくん」が必要です。

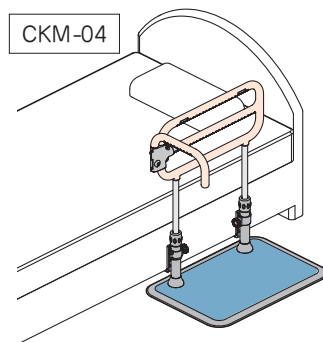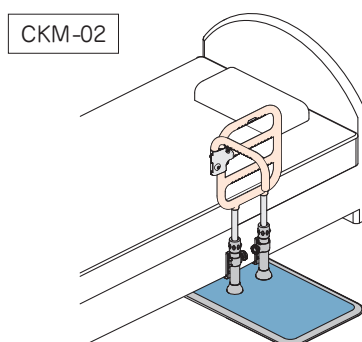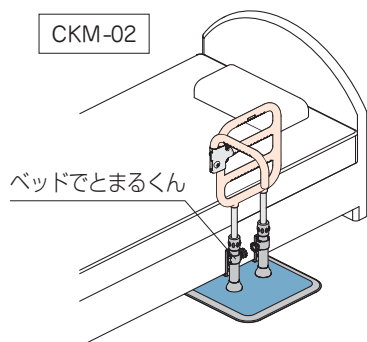

設置
NG

「かいじょくんフレーム」がベースから大きくはみ出した状態で設置しない。

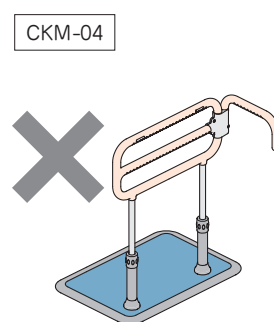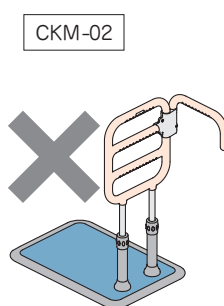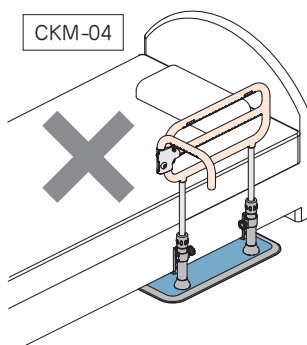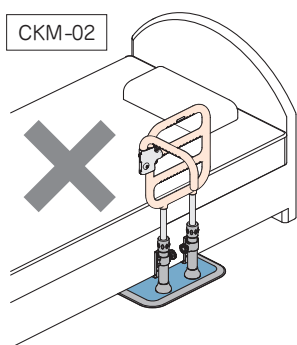


※この設置方法は「ベッドでとまるくん」を取り付けても不可です。

⚠ 警告



禁止

●「かいじょくんフレーム」の下にベースがない状態で設置しない。
ベースが浮き上がり転倒するおそれがあります。

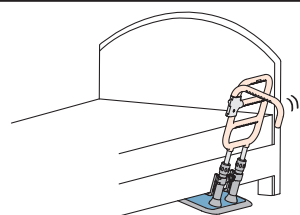

「かいじょくん」で サ ム リ ン グ® の使い道が広がる！




サムリング かいじょくん CKM-K

● 仕様

質量：1.1 k g
手すり太さ：φ35

● 材質

フレーム：ウレタン樹脂被覆
スチールパイプ
連結金具：アルミ合金
ネジ・ボルト：ステンレス

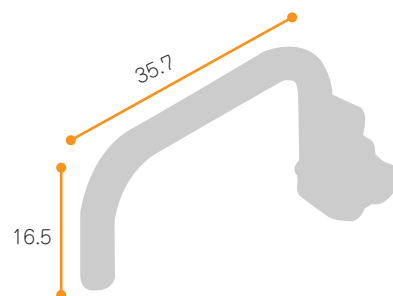


(単位：cm)



CKM-02


(単位：cm)

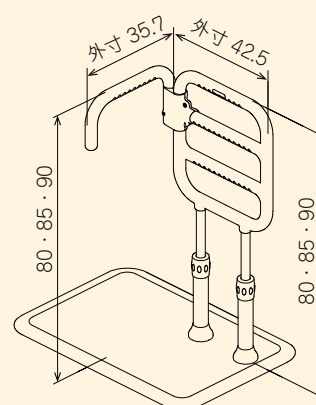

CKM-02


かいじょくんを下段
に取り付けた場合

(単位：cm)

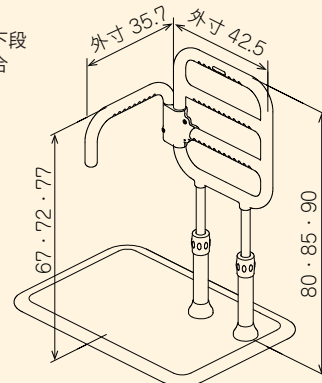

CKM-04



(単位：cm)

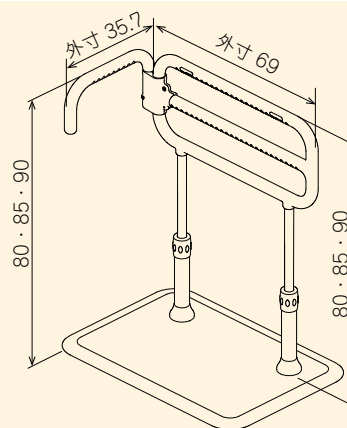

サムリングかいじょくん TAISコード一覧

※マットカラー：GR(グレー)・DGR(ダークグレー)・BR(ブラウン)・B(ブルー)・G(グリーン)

●サムリング(CKM-02)・かいじょくんセット

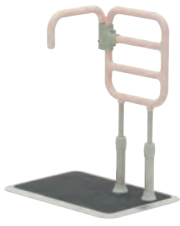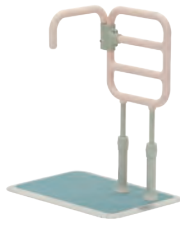写真					
品番	CKM-02 SET GR +CKM-K	CKM-02 SET DGR +CKM-K	CKM-02 SET BR +CKM-K	CKM-02 SET B +CKM-K	CKM-02 SET G +CKM-K
TAISコード	00055-000345	00055-000346	00055-000347	00055-000348	00055-000349

●サムリング(CKM-04)・かいじょくんセット

写真					
品番	CKM-04 SET GR +CKM-K	CKM-04 SET DGR +CKM-K	CKM-04 SET BR +CKM-K	CKM-04 SET B +CKM-K	CKM-04 SET G +CKM-K
TAISコード	00055-000351	00055-000352	00055-000353	00055-000354	00055-000355

●サムリング(CKM-02)・かいじょくん・ベッドでとまるくんセット

写真					
品番	CKM-02 SET GR +CKM-K+CKM-CK	CKM-02 SET DGR +CKM-K+CKM-CK	CKM-02 SET BR +CKM-K+CKM-CK	CKM-02 SET B +CKM-K+CKM-CK	CKM-02 SET G +CKM-K+CKM-CK
TAISコード	00055-000333	00055-000334	00055-000335	00055-000336	00055-000337

●サムリング(CKM-04)・かいじょくん・ベッドでとまるくんセット

写真					
品番	CKM-04 SET GR +CKM-K+CKM-CK	CKM-04 SET DGR +CKM-K+CKM-CK	CKM-04 SET BR +CKM-K+CKM-CK	CKM-04 SET B +CKM-K+CKM-CK	CKM-04 SET G +CKM-K+CKM-CK
TAISコード	00055-000339	00055-000340	00055-000341	00055-000342	00055-000343

たさあっぱ®
サポリング®
かいじょくん
Support your life



●製品の仕様・価格等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

 **矢崎化工株式会社**

■本社
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

介護支援ページ
kaigo-web
<https://www.kaigo-web.info/>



お問い合わせ先

■北海道支店

〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■仙台支店

〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■関東支店

〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276-38-4562 FAX 0276-38-3522

■東京支店

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

■神奈川支店

〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■名古屋支店

〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

■大阪支店

〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

■広島支店

〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

■九州支店

〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026