

保管用

よくお読みください

あがりかまち用 たちあっぷ®

FitOne®


フィットワン

## メンテナンスマニュアル


品番

CKP-01

- ！安全に関する表示 ..... 2
- 1. メンテナンスの目安 ..... 2
- 2. メンテナンス方法 ..... 3
- 3. 消毒方法 ..... 9
- 4. メンテナンス部品表 ..... 10

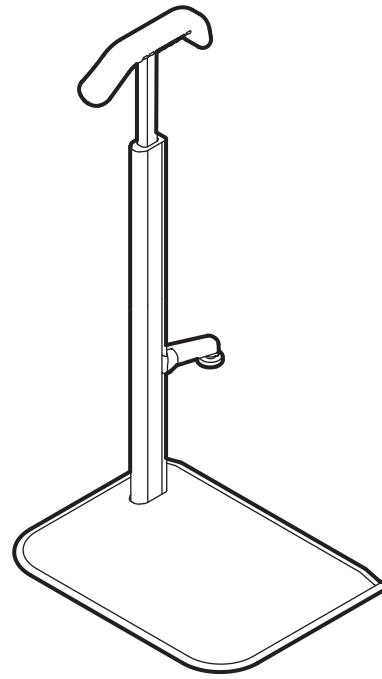

CKP-01

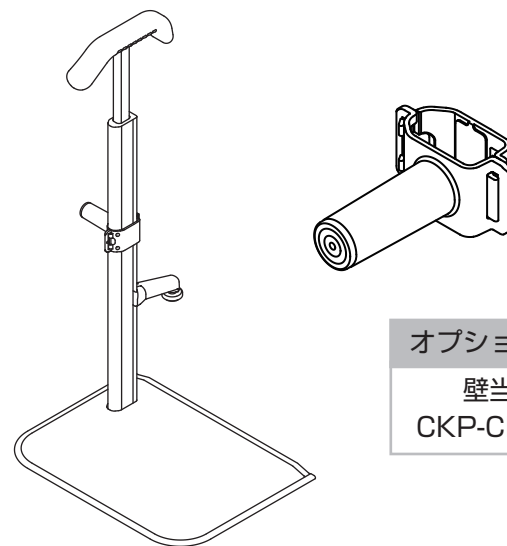





オプション部品

壁当て  
CKP-CE SET

## お買い上げありがとうございます

販売店様

このメンテナンスマニュアルを必ずお読みになり大切に保管してください。

|   |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
|  <b>警告</b> | 誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。     |  禁止   | してはいけない内容です。   |
|  <b>注意</b> | 誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。 |  必ず守る | 必ず守っていただく内容です。 |

# 1. メンテナンスの目安



● 対処方法は「2. メンテナンス方法」をご確認ください。

| 場 所              | 状 態                       | 対 処 方 法<br>(「2. メンテナンス方法」参照) |
|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 全体               | 汚れ                        | [1] 拭き取り                     |
|                  | ガタつきがある                   | [2] ねじのゆるみ点検<br>[8] 部品交換     |
|                  | 部品の変形、深い傷、亀裂              | [8] 部品交換                     |
|                  | 部品がうまく取り付けられない            | [3] 取付方法の確認<br>[8] 部品交換      |
| ベース部             | 錆                         | [4] 錆の除去<br>[8] 部品交換         |
|                  | 縁ゴムの外れ、破損                 | [5] 縁ゴムの交換、再取付               |
|                  | ベースシールの剥がれ、摩耗             | [8] 部品交換                     |
| 手すり部             | 手すり部の割れ、ヒビ、表面の剥がれ         | [8] 部品交換                     |
|                  | ねじ・アジャスターがスムーズに回らない       | [8] 部品交換                     |
|                  | ねじ・アジャスターを締めてもガタつきがある     | [8] 部品交換                     |
| 壁当て<br>(オプション部品) | 勘合不良、深い傷や亀裂がある            | [8] 部品交換                     |
| マット部             | 表面に深い傷や亀裂がある              | [8] 部品交換                     |
|                  | マグネットの剥がれ                 | [6] マグネットの貼り直し<br>[8] 部品交換   |
|                  | 手すり取付位置を変更することによってできる穴の補修 | [7] マット穴の補修方法                |

## 2. メンテナンス方法



### [1] 拭き取り

- 水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。


| <b>⚠ 注意</b>   |   |
|---|---|
| <br>禁止   | <b>● 酸性・アルカリ性洗剤は使用しない。</b><br>錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。必ず中性洗剤を使用してください。 |
|   | <b>● シンナー・ベンジンなどは使用しない。</b><br>変質して破損するおそれがあります。                      |
|   | <b>● たわしや磨き粉などで磨かない。</b><br>傷がつくおそれがあります。                             |
| <br>必ず守る | <b>● 直射日光は避けて、陰干しする。</b>  |

### [2] ねじのゆるみ点検

- 必要工具：六角レンチ（対辺 4 mm、対辺 3 mm）
- 下図の①～④のねじが指定締付けトルクで締め付けられていること、⑤のアジャスターにゆるみがないことを確認してください。ねじがゆるんでいる場合は、指定締付けトルクで締め付けを行ってください。
- 全てのねじ・アジャスターを締め付けてもガタつきがある場合は、部品に変形や深い傷、亀裂がないか確認し、「[8] 部品交換」を行ってください。

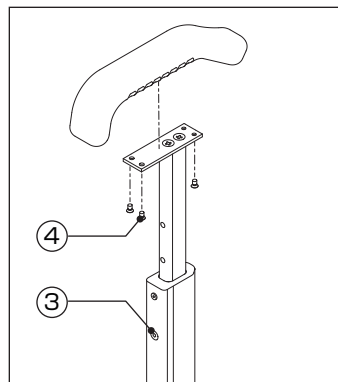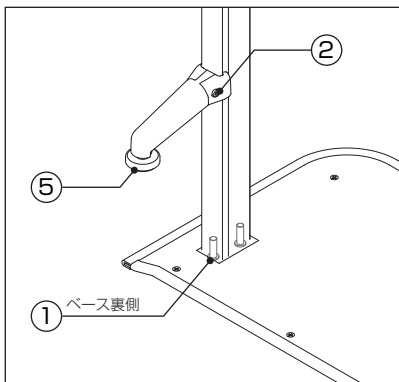

| 締付けトルク |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| ①      | 低頭ネジ (M8 × 25)<br>12.5N・m {128kgf・cm} |
| ②      | 六角ネジ (M5 × 32)<br>1.5N・m {15kgf・cm}   |
| ③      | 六角皿ネジ (M6 × 20)<br>5.2N・m {53kgf・cm}  |
| ④      | 六角皿ネジ (M5 × 8)<br>3.0N・m {31kgf・cm}   |
| ⑤      | アジャスター (M10)<br>※ゆるみがないか確認する          |

| <b>⚠ 注意</b>   |  |
|---|--|
| <br>禁止 | <b>● 指定締付けトルク以上で締め付けない。</b>  |
|   | <b>● 電動工具（電動ドライバー等）を使用しない。</b><br>過剰トルクで締め付けるとねじの破損の原因になります。<br>（ねじの締め付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締め付け・取外しができなくなる可能性があります。） |

### [3] 取付方法の確認

- 正しく取り付けられているか、「あがりかまち用たちあがり フィットワン 取扱説明書」で取付方法をご確認ください。取扱説明書通りの取付方法でも部品がうまく取り付けられない場合は、部品に変形や深い傷、亀裂がないか確認し、適切に「[8] 部品交換」を行ってください。



### [4] 錆の除去

- 錆が発生した場合は、防錆潤滑剤を塗布し、ウエスで拭き取ってください。

## [5] 縁ゴムの交換、再取付

### 再取付

(縁ゴムが外れた場合)

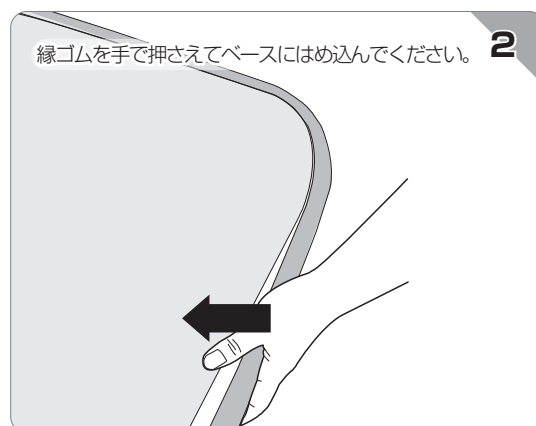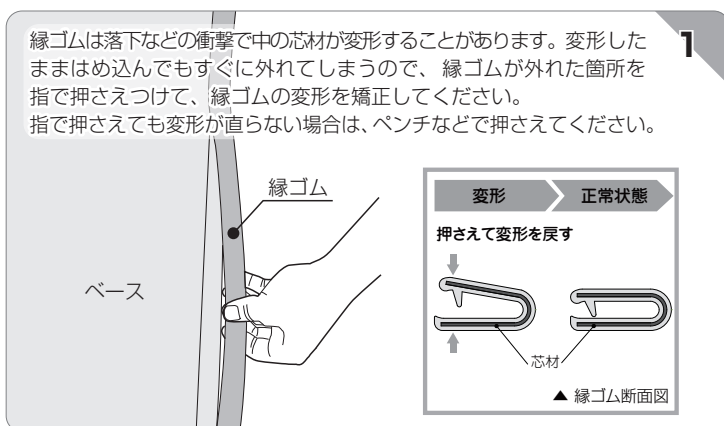


### 交換


(縁ゴムに破損や劣化がある場合)

#### <交換する前の確認事項>

・縁ゴムの突起が上側になるように取り付けてください。



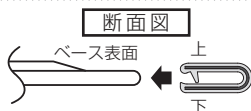


・縁ゴムの端面が貼りついている場合は、手ではがしてからめ込んでください。

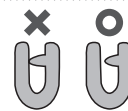



#### <縁ゴム前の交換手順>


● 部品：フィットワン 縁ゴム前 (CKP-AC 5 巾)

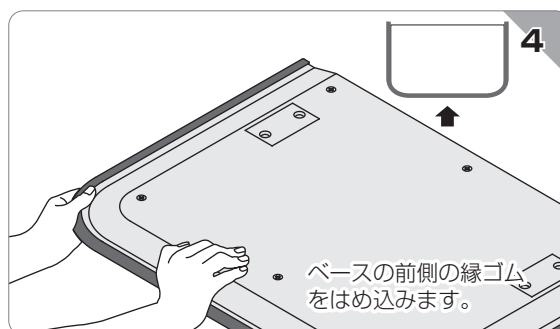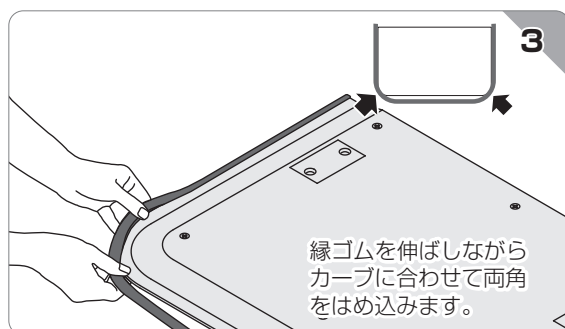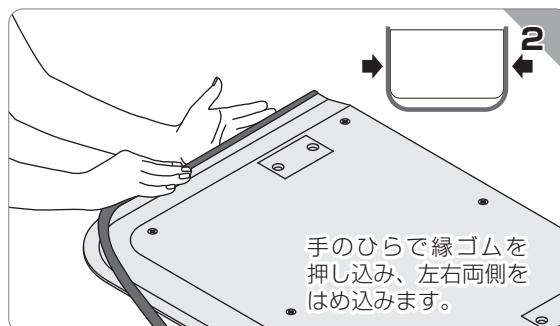

#### <縁ゴム後の交換手順>

● 部品：フィットワン 縁ゴム後 (CKP-AD 5 巾)

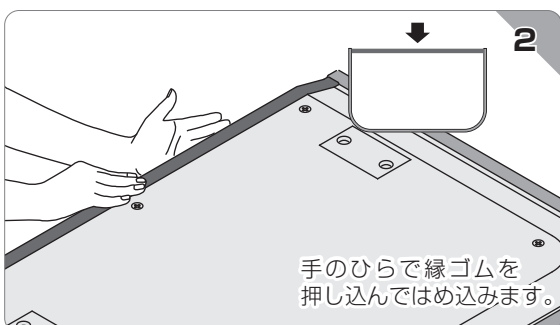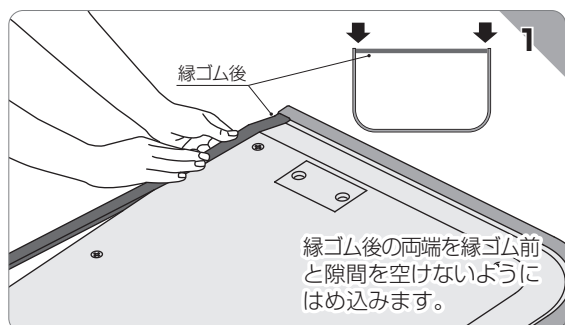
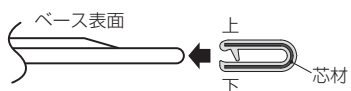
| <b>⚠ 注意</b>      |  |
|------------------|--|
| <b>🚫</b><br>禁止   | <b>● 縁ゴムを取り付ける際はハンマーを使用しない。</b><br>縁ゴムの性能が低下する原因になります。   |
|                  | <b>● ベースを引きずらない。</b><br>縁ゴムが外れやすくなります。また摩耗により芯材が出てケガをするおそれがあります。   |
|                  | <b>● 縁ゴムをカットしない。</b><br>中の芯材が出てケガをするおそれがあります。  |
| <b>!</b><br>必ず守る | <b>● 縁ゴム開口部の突起が上側になるように取り付ける。</b><br>下側に取付けると、突起部分がつぶれてしまい、縁ゴムの性能が低下する原因になります。  |
|                  | <b>● 気温の影響を受け、縁ゴムが縮む場合があるので注意する。</b><br>ベースより短い場合は伸ばしながら取り付けてください。   |
|                  | <b>● 縁ゴムのはめ込みがしっかりできていることを必ず確認する。</b><br>はめ込みが不十分だと外れるおそれがあります。  |
|                  | <b>● ベースはなるべく平置きで保管する。</b><br><b>縦置きで保管する場合はベースが倒れないように注意する。</b><br>重量物のため、倒れてケガをするおそれがあります。<br>また立てかけて保管すると、縁ゴムに負荷がかかり、縁ゴムが外れやすくなる場合があります。                        |
|                  | <b>● ベースは重いので注意する。</b><br>落下させたり、縁で手を切らないよう、注意して作業を行ってください。  |

## [6] マグネットの貼り直し

マットのマグネットが剥がれたり浮いたりした場合は、以下の手順で貼り直してください。

- 使用する両面テープ：塩化ビニル用両面テープ #577SA-L（積水化学工業社製）推奨幅は20mm
- 必要工具：スクレーパー、はさみ

### ①古いテープを剥がす

マットとマグネットに付いている古い両面テープをスクレーパーできれいに取り除きます。

### ②新しいテープを貼る



新しい両面テープをマグネットにこれまでのものと同じように貼ります。  
 角の部分は、はみ出さないよう両面テープをカットしてください。

### ③マグネットをマットに貼り付ける

配置図を参考にしながら、マグネットを貼り付けます。

マグネットはマットの端と折れ線の中央にくるように貼り付けてください。（マット端・折れ線から6mm程度の位置）  
 貼り付けた後は、手のひらで全体をしっかりと押さえて密着させます。

■：マグネット貼り付け位置

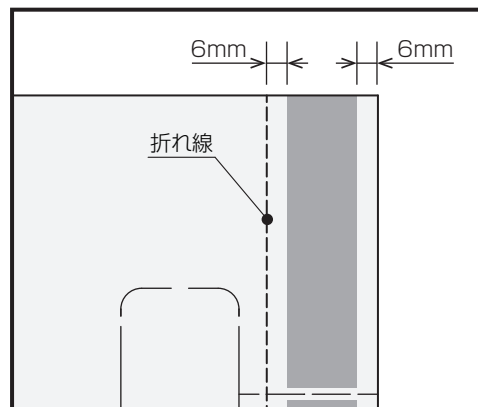
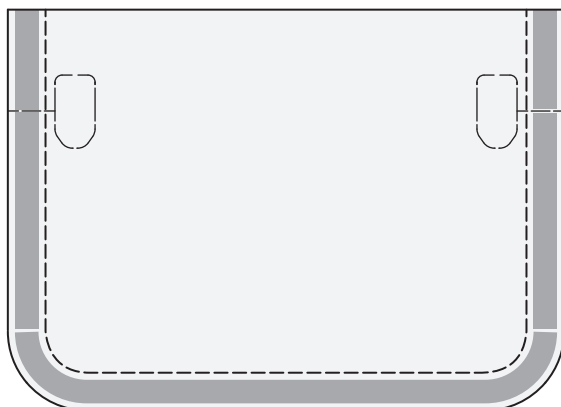


<フィットワン ベースマット：マグネット配置図>

## [7] マット穴の補修方法

支柱の取付位置を変えることによってできる穴を「マット穴補修、マット穴補修シール」を使って埋めてください。

- 部 品：フィットワン マット穴補修 (CKP-AF 10巾)、フィットワン マット穴補修シール (CKP-AG 10巾)
- 必要工具：はさみ

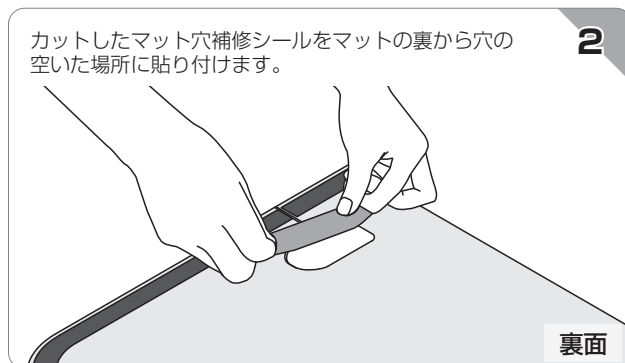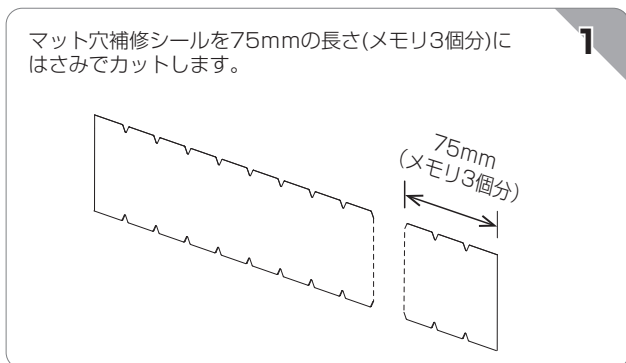



| <b>⚠ 注意</b> |  |
|-------------|--|
| <br>禁止      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>靴底でこすらない。</b><br/>靴の裏などで強くこすった場合、剥がれるおそれがあります。</li> </ul>          |
| <br>禁止      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>水に濡らさない。</b><br/>部品や補修シールが水に濡れた場合、剥がれるおそれがあります。</li> </ul>         |
| <br>必ず守る    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>砂やほこりなどの汚れに注意する。</b><br/>補修シールに砂やほこりなどが付着すると剥がれやすくなります。</li> </ul> |

## [8] 部品交換

メンテナンス部品は「4. メンテナンス部品表」を参照してください。

部品の交換は「あがりかまち用たちあがび フィットワン 取扱説明書」をあわせてご確認ください。

縁ゴムの部品交換の方法は「[5] 縁ゴムの交換、再取付」をご参照ください。


| <b>⚠ 注意</b>   |  |
|---|--|
| <br>禁止   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 指定締め付けトルク以上で締め付けない。</li> <li>● 電動工具（電動ドライバー等）を使用しない。<br/>過剰トルクで締め付けるとねじの破損の原因になります。<br/>（ねじの締め付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締め付け・取外しができなくなる可能性があります。）</li> </ul> |
| <br>必ず守る | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 部品交換を行う際は、指定部品を使用する。</li> <li>● 部品交換を行った際は、使用前にガタつき・ねじのゆるみ・締め忘れがないことを必ず確認する。</li> <li>● 定期的にガタつき・ねじのゆるみ・部品の破損がないことを確認する。</li> </ul>                 |


### < ベースシールの交換方法 >

ベースシールに剥がれや摩耗がある場合は、以下の手順で交換してください。

- 部 品：フィットワン ベースシール（CKP-AE 50㍓）
- 必要工具：スクレーパー、粘着除去剤

- ①古いシールを剥がす  
ベースに付いている古いベースシールをスクレーパーできれいに取り除きます。  
※粘着残りがあがる場合は、必要に応じて粘着除去剤を使用してください。
- ②新しいシールを貼る  
新しいベースシールをベース支柱穴位置に合わせて貼り付けます。

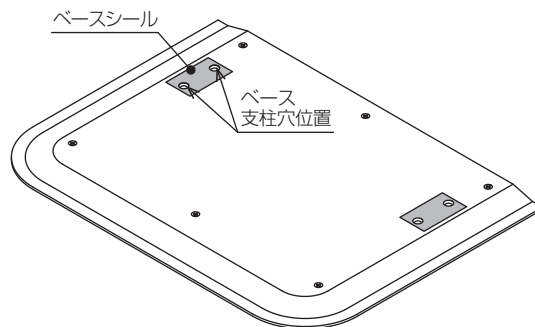


| <b>⚠ 注意</b>   |   |
|---|---|
| <br>必ず守る | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ベースシールに剥がれや摩耗がある場合は、新しいベースシールに貼り替える。<br/>ベースシールに剥がれや摩耗がある状態で使用すると、ベースと支柱部分が接触し、錆の原因になります。</li> </ul> |

### < 注意喚起シールの交換方法 >

- 部 品：フィットワン 注意喚起シール（CKP-CB 50㍓）
- 必要工具：スクレーパー、粘着除去剤

- ①古いシールを剥がす  
支柱に付いている古い注意喚起シールをスクレーパーできれいに取り除きます。  
※粘着残りがあがる場合は、必要に応じて粘着除去剤を使用してください。
- ②新しいシールを貼る  
貼付位置図を参考にしながら、新しい注意喚起シールを貼り付けます。  
※床当てや壁当て（オプション部品）の取付位置に干渉するので、注意喚起シールは貼付位置図の設定範囲内に貼り付けてください。

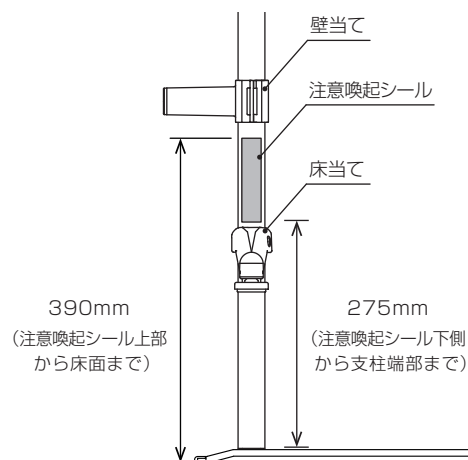

< 注意喚起シール貼付位置図 >

## <スライド部品セットの交換方法>

- 部 品：フィットワン スライド部品セット (CKP-CC SET LGR)
- 必要工具：六角レンチ (対辺 4mm、対辺 2mm)、⊖ドライバー

支柱裏側上部の六角ネジを六角レンチ(対辺2mm)で取り外します。

六角レンチ  
(対辺 2mm)

支柱裏側下部の六角皿ネジを六角レンチ(対辺4mm)で取り外します。ねじを外すと手すり下がってくるので、手すりフレームを持ちながら行ってください。

手すりフレーム

六角レンチ  
(対辺 4mm)

手すりフレームを上を持ち上げて支柱から取り外します。

手すりフレーム

支柱

手すりフレームからスライド部品セットを取り外します。スライド部品セット下部が取外しにくい場合は、⊖ドライバーを差し込んで外してください。

⊖ドライバー

スライド部品セット  
下部

スライド部品セット  
上部

向きに注意しながら、手すりフレームにスライド部品セット上部を差し込みます。

スライド部品セット  
上部

スライド部品セットの  
尖った方を手すりの  
緩やかな方に合わせる。

向きに注意しながら、手すりフレームにスライド部品セット下部を差し込みます。

スライド部品セット  
下部

スライド部品セットの切り  
込みと手すりフレームの穴の  
向きをそろえる。

手すりフレームを支柱に差し込みます。スライド部品セット上部は両側に突起があたるため、挿入時に突起部を押さえながら差し込んでください。

突起  
(両側)

手すりフレームを持ち上げながら、支柱裏側上部のねじ穴に六角ネジ(M4×10)を六角レンチ(対辺2mm)で取り付けます。

締付けトルク  
1.2N・m(12kgf・cm)

六角ネジ  
(M4×10)


六角レンチ  
(対辺 2mm)


手すりフレームを持ち上げながら、支柱裏側下部のねじ穴の設定高さに、六角皿ネジ(M6×20)を六角レンチ(対辺4mm)で取り付けます。

締付けトルク  
5.2N・m(53kgf・cm)

六角皿ネジ  
(M6×20)

六角レンチ  
(対辺 4mm)


| <b>⚠ 警告</b>      |  |
|------------------|--|
| <b>!</b><br>必ず守る | <p>● <b>ねじの締付け・取外しの際は、手すりフレームを持ちながら行う。</b><br/>手すりフレームが落下し、手・指をはさみケガをするおそれがあります。</p>  |
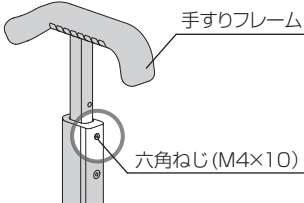
| <b>⚠ 注意</b>      |   |
|------------------|---|
| <b>!</b><br>必ず守る | <p>● <b>手すりフレームの取外しの際は、支柱裏側上部の六角ねじ (M4 × 10) を外してから行う。</b><br/>無理に引き抜くと、スライド部品セットが破損するおそれがあります。</p>  |

### < 手すりの交換方法 >

- 部 品：フィットワン 手すり (CKP-CA)
- 必要工具：六角レンチ (対辺 3 mm)

- ①六角皿ネジを六角レンチで取り外し、手すりを取り外します。
- ②新しい手すりを取り付け、六角皿ネジを六角レンチで締め付けて固定します。  
手すり支柱の向きに注意して、手すりを取り付けてください。

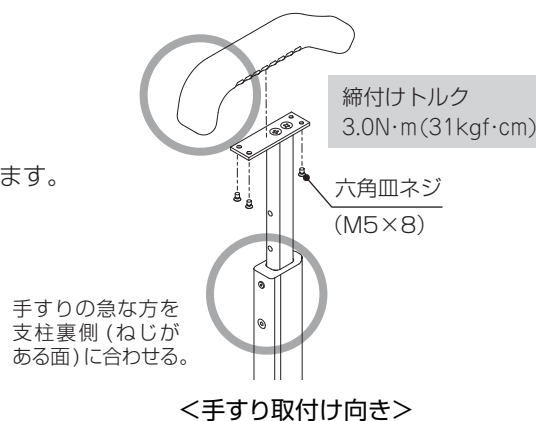







## 3. 消毒方法

- 消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
- アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。消毒後は、仕上げに水拭きをしてください。
- この製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。
- 塩素系の消毒液を使用する場合は、使用する消毒液の使用方法及び使用上の注意に従い、希釈して使用し、仕上げに水拭きをしてください。(参考：次亜塩素酸ナトリウム 6%水溶液なら 120 倍～ 300 倍程度に希釈)

| <b>⚠ 注意</b>      |  |
|------------------|--|
| <b>⊘</b><br>禁止   | <p>● <b>オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しない。</b><br/>変質して破損するおそれがあります。</p>  |
| <b>!</b><br>必ず守る | <p>● <b>アルコール系の消毒液や逆性石鹼、塩素系の消毒液が付着した場合は水拭きをし、製品表面に消毒液が残らないようにする。</b><br/>錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。</p> |
| <b>!</b><br>必ず守る | <p>● <b>手すり部をアルコールで強く擦らない。</b><br/>強く擦ると色落ちすることがあります。</p>  |

## 4. メンテナンス部品表

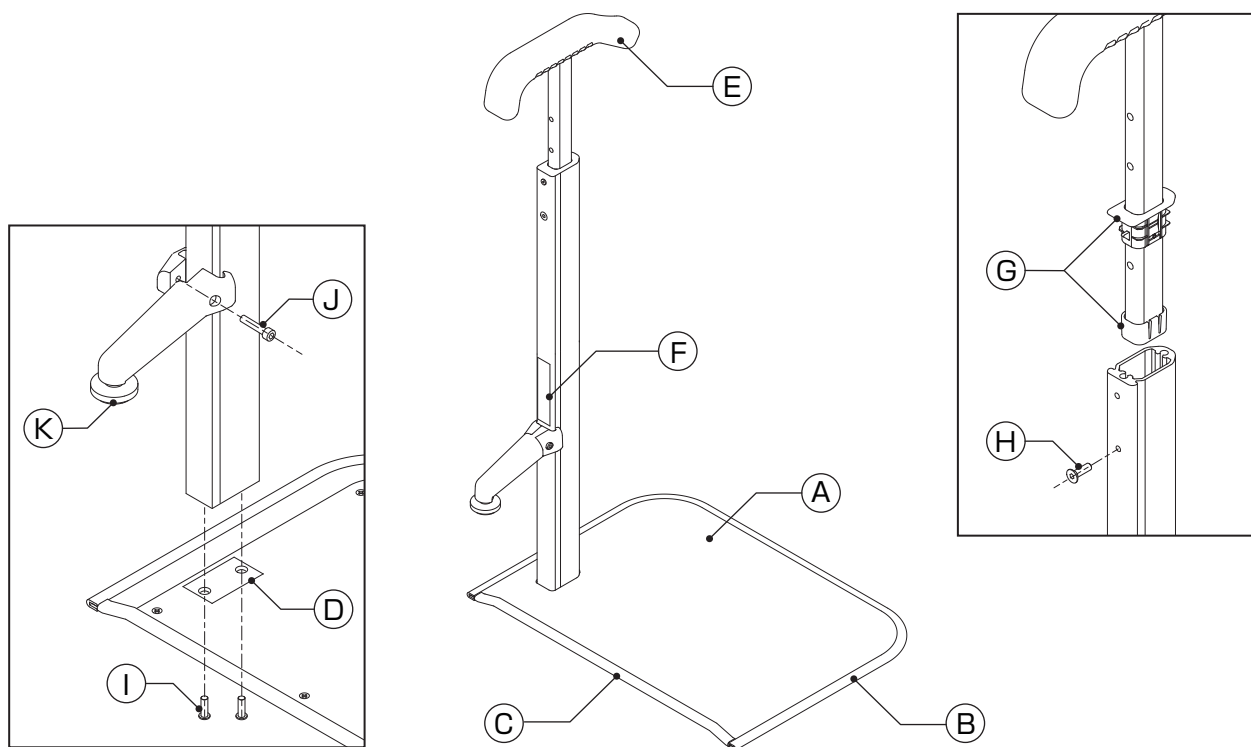
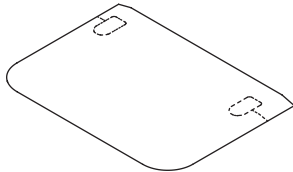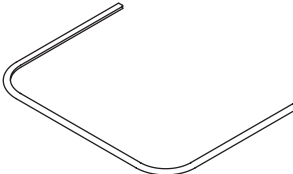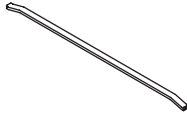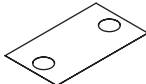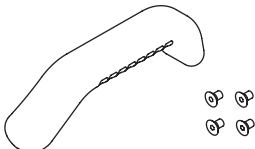
| 記号 | 区分   | 部品名              | 部品番号       | 部品図  | 材質                  | 入数   |
|----|------|------------------|------------|--|---------------------|------|
| A  | ベース部 | フィットワン<br>ベースマット | CKP-AB MBB | <br>マットカラー：MBB<br>(マーブルブラウン) | プラスチック<br>(マグネット付き) | 1枚   |
| B  | ベース部 | フィットワン<br>縁ゴム前   | CKP-AC 5付  | <br>長さ：1130mm                | プラスチック<br>アルミ       | 5本   |
| C  | ベース部 | フィットワン<br>縁ゴム後   | CKP-AD 5付  | <br>長さ：475mm                 | プラスチック<br>アルミ       | 5本   |
| D  | ベース部 | フィットワン<br>ベースシール | CKP-AE 50付 |                              | プラスチック              | 50枚  |
| E  | 手すり部 | フィットワン<br>手すり    | CKP-CA     | <br>六角皿ネジ (M5 × 8) …4本付き     | ウレタン<br>スチール        | 1セット |

| 記号 | 区分   | 部品名                          | 部品番号           | 部品図   | 材質             | 入数    |
|----|------|------------------------------|----------------|---|----------------|-------|
| F  | 手すり部 | フィットワン<br>注意喚起シール            | CKP-CB 50枚     |                     | プラスチック         | 50 枚  |
| G  | 手すり部 | フィットワン<br>スライド部品セット          | CKP-CC SET LGR |                     | プラスチック         | 1 セット |
| H  | 手すり部 | フィットワン<br>六角皿ネジ<br>(M6 × 20) | CKP-CF 10枚     |                     | ステンレス          | 10 本  |
| I  | 手すり部 | フィットワン<br>低頭ネジ<br>(M8 × 25)  | CKP-CG 10枚     |                     | ステンレス          | 10 本  |
| J  | 手すり部 | フィットワン<br>六角ネジ<br>(M5 × 32)  | CKP-CH 10枚     |                    | ステンレス          | 10 本  |
| K  | 手すり部 | フィットワン<br>アジャスター<br>(M10)    | CKP-CJ 10枚     |                   | スチール<br>プラスチック | 10 個  |
| —  | ベース部 | フィットワン<br>マット穴補修             | CKP-AF 10枚     | 支柱穴埋め用部品<br>      | プラスチック         | 10 枚  |
| —  | ベース部 | フィットワン<br>マット穴補修シール          | CKP-AG 10枚     | <br>(50 × 300 mm) | プラスチック         | 10 枚  |
| —  | 共通   | 六角レンチ<br>(対辺 4 mm)           | CKA-MH 4M 5枚   |                   | スチール           | 5 本   |

※製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

## 矢崎化工株式会社

■ 本 社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

■ 北海道支店 福祉介護課  
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1  
TEL 0126(63)4285

■ 神奈川支店 福祉介護課  
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4  
TEL 0463(81)4315

■ 九州支店 福祉介護課  
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1  
TEL 0948(72)0310

■ 仙台支店 福祉介護課  
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280  
TEL 022(382)2145

■ 名古屋支店 福祉介護課  
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2  
TEL 0568(67)0111

介護支援ページ  
*kaigo-web*  
<https://www.kaigo-web.info/>

■ 関東支店 福祉介護課  
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88  
TEL 0276(38)4562

■ 大阪支店 福祉介護課  
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1  
TEL 072(672)8440

■ 東京支店 福祉介護課  
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3  
TEL 04(2944)7113

■ 広島支店 福祉介護課  
〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17  
TEL 0829(36)1111

25112511

DW-339-00