




たさあっぷ®サムリング® 伸縮つながるくん®

yazaki

ポイント 1 サムリングをつなげる！

家の中に連続した手すりの動線を構築します。
複数台の連結も可能です。

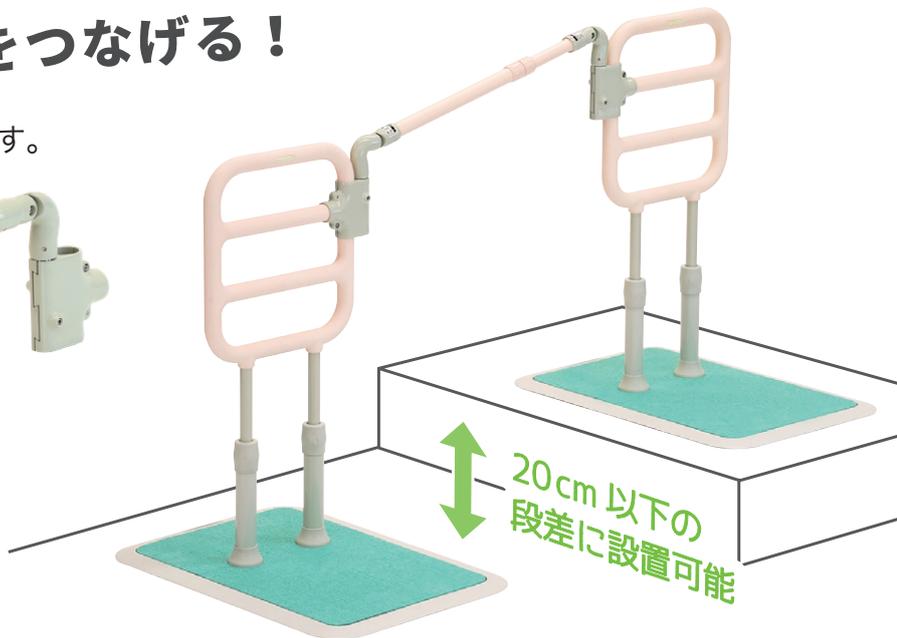


ポイント 2 動線バリエーション

狭い廊下にも両手すりを構築できるので、
片麻痺の方でも安全に移動することができます。

両手すり構築 CKM-02W + 伸縮つながるくん



75cm以上の廊下に置けます

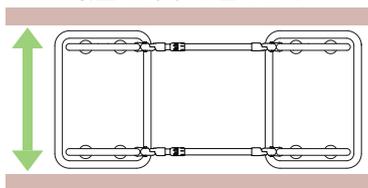

ポイント 3 「壁当て」で安定性向上

壁際で使用の際は、壁当てを取り付けて
使用時の安定性を向上させます。

※「設置上のご注意」をご確認ください。




壁当て



ポイント 4 簡単な設置と調整


●長さ調整は 65～95cmで
無段階伸縮調整

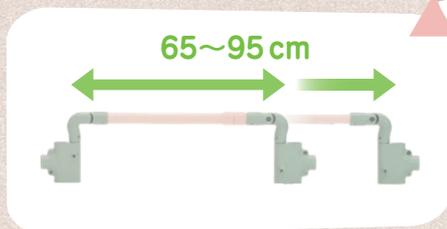

調整後、しっかりと
「締め付けキャップ」
を締め付けるだけ




角度固定ネジ

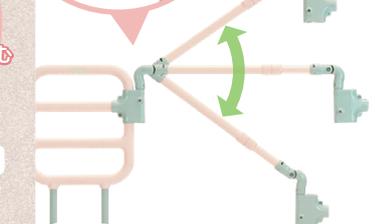

●上下角度は
段差 20cm以内で無段階

●左右角度は
可動範囲内で無段階

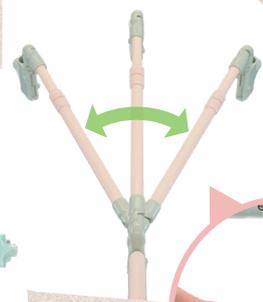

六角トメネジ

ネジは六角レンチで簡単調整！

仕様



※壁当て付き

サムリング 伸縮つなぐるくん CKM-E


- 仕様
質量：2.2kg 手すり太さ：φ32 / φ28
- 材質
フレーム：樹脂被覆スチールパイプ、アルミ合金、スチール、ステンレス、樹脂
連結金具：アルミ合金
ネジ・ボルト：ステンレス、樹脂
- 標準希望小売価格：オープンプライス



●組み合わせ長さ

CKM-02 同士の連結


142 ~ 172 cm

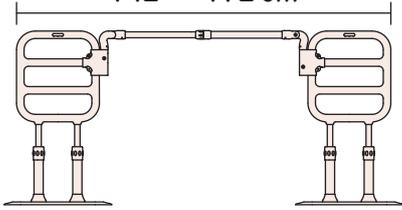

154 ~ 184 cm

CKM-02 と CKM-04 の連結


168 ~ 198 cm

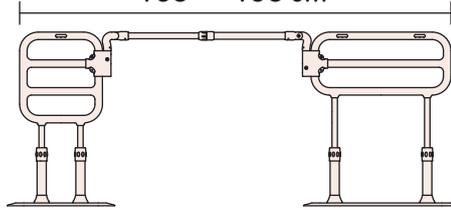

178 ~ 208 cm

CKM-04 同士の連結

195 ~ 225 cm

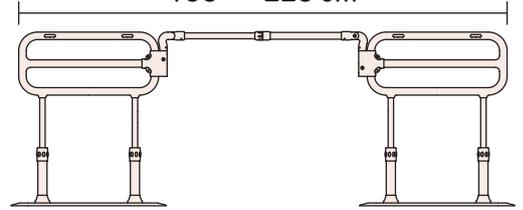


202 ~ 232 cm

設置上のご注意

設置パターンによっては「壁当て」または「ベッドでとまるくん」をご使用ください。

※設置にあたっては、取扱説明書をご確認ください。

●壁当てを使用しないケース



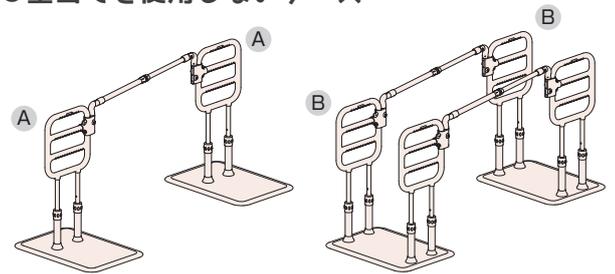


●壁当てを使用するケース



<直線で連結する場合>
両側に壁当てを取り付けます。

<直角で連結する場合>
片側に壁当てを取り付けます。

<ベッドサイドで使用する場合>
ベッドでとまるくんを取り付ける必要がある場合があります。

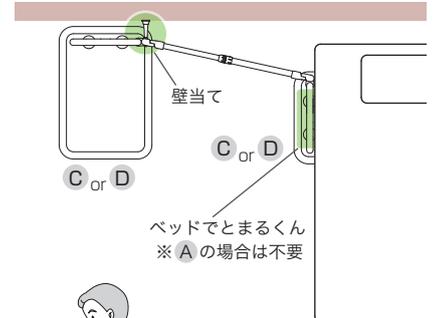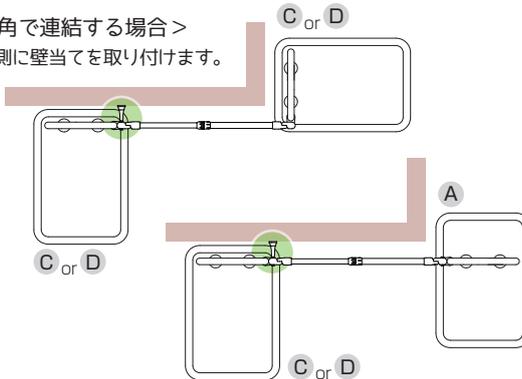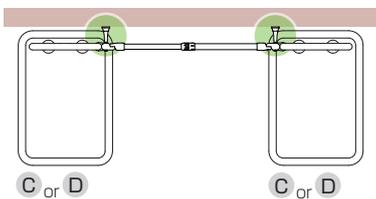

●複数台の連結が可能です。
上記の条件を守って連結してください。

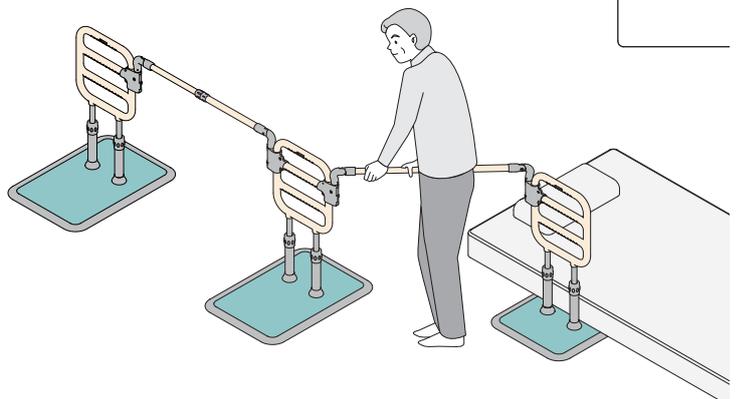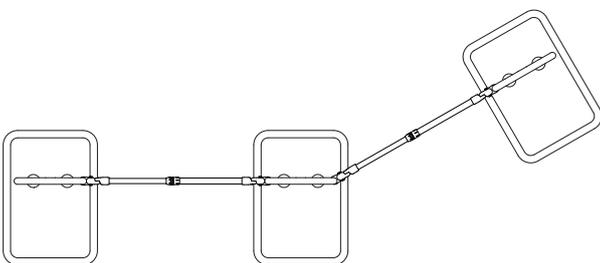

伸縮つながるくん 設置事例

玄関からの上り下りに




廊下での歩行補助に



ベッドからの立ち上がり



CKM-02 のフレームを中央に取り付けば、フレームの両側を通ることができます。

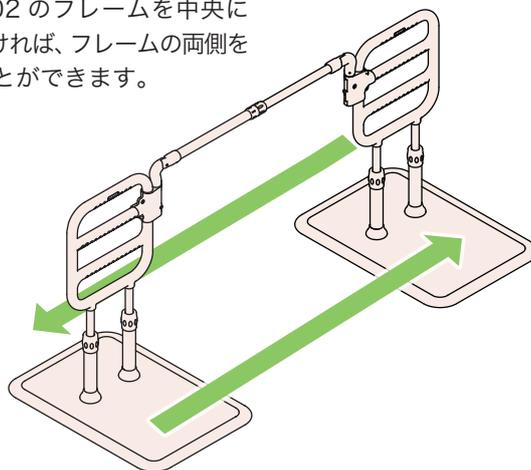

居室内での移動に



サムリング伸縮つながるくん TAISコード一覧

※マットカラー：GR(グレー)・DGR(ダークグレー)・BR(ブラウン)・B(ブルー)・G(グリーン)

●サムリング(CKM-02)・伸縮つながるくん セット

写真					
品番	CKM-02 SET GR + CKM-E	CKM-02 SET DGR + CKM-E	CKM-02 SET BR + CKM-E	CKM-02 SET B + CKM-E	CKM-02 SET G + CKM-E
TAISコード	00055-000371	00055-000372	00055-000373	00055-000374	00055-000375

●サムリング(CKM-02W)・伸縮つながるくん セット

写真					
品番	CKM-02W SET GR + CKM-E	CKM-02W SET DGR + CKM-E	CKM-02W SET BR + CKM-E	CKM-02W SET B + CKM-E	CKM-02W SET G + CKM-E
TAISコード	00055-000377	00055-000378	00055-000379	00055-000380	00055-000381

●サムリング(CKM-02W)・伸縮つながるくん セット (2本)

写真					
品番	CKM-02W SET GR + CKM-E (2本)	CKM-02W SET DGR + CKM-E (2本)	CKM-02W SET BR + CKM-E (2本)	CKM-02W SET B + CKM-E (2本)	CKM-02W SET G + CKM-E (2本)
TAISコード	00055-000383	00055-000384	00055-000385	00055-000386	00055-000387

●サムリング(CKM-04)・伸縮つながるくん セット

写真					
品番	CKM-04 SET GR + CKM-E	CKM-04 SET DGR + CKM-E	CKM-04 SET BR + CKM-E	CKM-04 SET B + CKM-E	CKM-04 SET G + CKM-E
TAISコード	00055-000389	00055-000390	00055-000391	00055-000392	00055-000393

●カタログ掲載製品の仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護部門
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

■北海道支店

〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285

■東京支店

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2944-7113

■大阪支店

〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8440

■仙台支店

〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022-382-2145

■神奈川支店

〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL 0463-81-4315

■広島支店

〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829-36-1111

介護支援ページ
kaigo-web

<https://www.kaigo-web.info/>



お問い合わせ先